

AKTIVLINE® INDIVIDUAL

06/2021


Ersatzteilkatalog
Spare parts



interco®
Aktivline!

1. Übersicht Untergestell SIMPLY® / Overview undercarriage SIMPLY®	3	3. Übersicht Untergestell ROOMY NE / Overview undercarriage ROOMY NE	46
1.1. Unterer Rahmen / Lower frame	4	3.1. Unterer Rahmen / Lower frame	47
1.1.1. Unterer Rahmen / Lower frame	4	3.1.1. Unterer Rahmen / Lower frame	47
1.1.2. Lenkräder / Front wheels	5	3.1.2. Doppelrollen / Leading pulley	48
1.1.3. Hinterräder / Rear wheels	6	3.1.3. Kugel-Puffer / Ball-buffer	49
1.1.4. Ankipphilfe / Anti-tip	7	3.1.4. Schwenkarme / Swinging arms	50
1.1.5. Stützrad / Tilting support rollers	8	3.1.5. Gasdruckfedern / Gas pressure spring	51
1.1.6. Gasdruckfeder und Halter / Gas spring and bracket	9	3.1.6. Auslösehebel mit Fußpedal / Release lever with foot pedal	52
1.1.7. Hintere Querstrebe / Rear cross brace	10	3.1.7. Adapterplatte	53
1.2. Oberer Rahmen / Upper frame	11	3.2. Oberer Rahmen / Upper frame	54
1.2.1. Oberer Rahmen / Upper frame	11	3.2.1. Oberer Rahmen / Upper frame	54
1.2.2. Beckenrückzugseinheit / Pelvic retraction unit	12	3.2.2. Beckenrückzugseinheit / Pelvis retraction unit	55
1.2.3. Halter für Rückzugseinheit / Holder for retraction unit	13	3.2.3. Rückenarretierungseinheit / Back locking unit	56
1.2.4. Rückenarretierungseinheit / Back locking unit	14	3.2.4. Trapezadapteraufnahme / Trapezoidal adapter mount	57
1.2.5. Trapezadapteraufnahme / Trapezoidal adapter mount	15	3.2.5. Linearführung / Linear guide	58
1.2.6. Linearführung / Linear guide	16	3.2.6. Drehpunkthülse / Pivot sleeve	59
1.2.7. Drehpunkthülse / Pivot sleeve	17	3.3. Rücken / Back	60
1.3. Rücken / Back	18	3.3.1. Schiebegriffwinkelverstellbleche / Push handle angle adjustment plates	60
1.3.1. Schiebegriffwinkelverstellbleche / Push handle angle adjustment plates	18	3.3.2. Rücken / Back	61
1.3.2. Rücken / Back	19	3.3.3. Abdeckblech / Cover plate	62
1.3.3. Abdeckblech / Cover plate	20	3.3.4. Linearführung / Linear guide	63
1.3.4. Linearführung / Linear guide	21	3.3.5. Rückengelenkstück / Back joint piece	64
1.3.5. Rückengelenkstück / Back joint piece	22	3.3.6. Schiebegriff / Push handle	65
1.3.6. Schiebegriff / Push-handle	23	4. Übersicht Sitzschale / Overview seat shell	66
1.3.7. Bowdenzug / Bowden cables	24	4.1. Untere Extremitäten / Lower extremities	67
2. Übersicht Untergestell SIMPLY® LIGHT / Overview undercarriage SIMPLY® LIGHT	25	4.1.1. Fußbank durchgehend / Foot plate continuous	67
2.1. Unterer Rahmen / Lower frame	26	4.1.2. Fußbank geteilt / Foot plate divided	68
2.1.1. Unterer Rahmen / Lower frame	26	4.1.3. Fußbankgabel durchgehend / Foot plate fork continuous	69
2.1.2. Lenkräder / Front wheels	27	4.1.4. Fußbankgabel geteilt / Foot plate fork divided	70
2.1.3. Hinterräder / Rear wheels	28	4.1.5. Fußbanksystem durchgehend / Foot plate system continuous	71
2.1.4. Ankipphilfe / Anti-tip	29	4.1.6. Fußbanksystem geteilt / Foot plate system divided	72
2.1.5. Stützrad / Tilting support rollers	30	4.1.7. Fußbankrückzugseinheit über Expander / Foot plate retraction unit via expander	73
2.1.6. Gasdruckfeder und Halter / Gas spring and bracket	31	4.2. Becken / Pelvis	74
2.2. Oberer Rahmen / Upper frame	32	4.2.1. Bezug für Sitzpolster / Cover for seat cushion	74
2.2.1. Oberer Rahmen / Upper frame	32	4.2.2. Klettbare Seitenpolster / Side cushions attachable with velcro	75
2.2.2. Beckenrückzugseinheit / Pelvic retraction unit	33	4.2.3. Trapezadapter / Trapezoidal adapter	76
2.2.3. Halter für Rückzugseinheit / Holder for retraction unit	34	4.2.4. Drehpunktbleche / Pivot plates	77
2.2.4. Rückenarretierungseinheit / Back locking unit	35	4.3. Oberkörper / Upper body	78
2.2.5. Trapezadapteraufnahme / Trapezoidal adapter mount	36	4.3.1. Rumpfführungspelottenhalter / Lateral side support holder	78
2.2.6. Linearführung / Linear guide	37	4.3.3. Verstellbahnen für Rumpfführungspelotten / Rail for lateral side support	79
2.2.7. Drehpunkthülse / Pivot sleeve	38	4.3.2. Rumpfführungspelotten / Lateral side support	80
2.3. Rücken / Back	39	4.3.4. Gurtführungsbleche / Belt guide for straps	81
2.3.1. Schiebegriffwinkelverstellbleche / Push handle angle adjustment plates	39	4.3.5. Bezug für Rückenpolster / Cover for back cushion	82
2.3.2. Rücken / Back	40	4.3.6. Kopfstützenaufnahme / Headrest mount	83
2.3.3. Abdeckblech / Cover plate	41		
2.3.4. Linearführung / Linear guide	42		
2.3.5. Rückengelenkstück / Back joint piece	43		
2.3.6. Schiebegriff / Push handle	44		
2.3.7. Bowdenzug / Bowden cables	45		


1. Übersicht Untergestell SIMPLY® / Overview undercarriage SIMPLY®

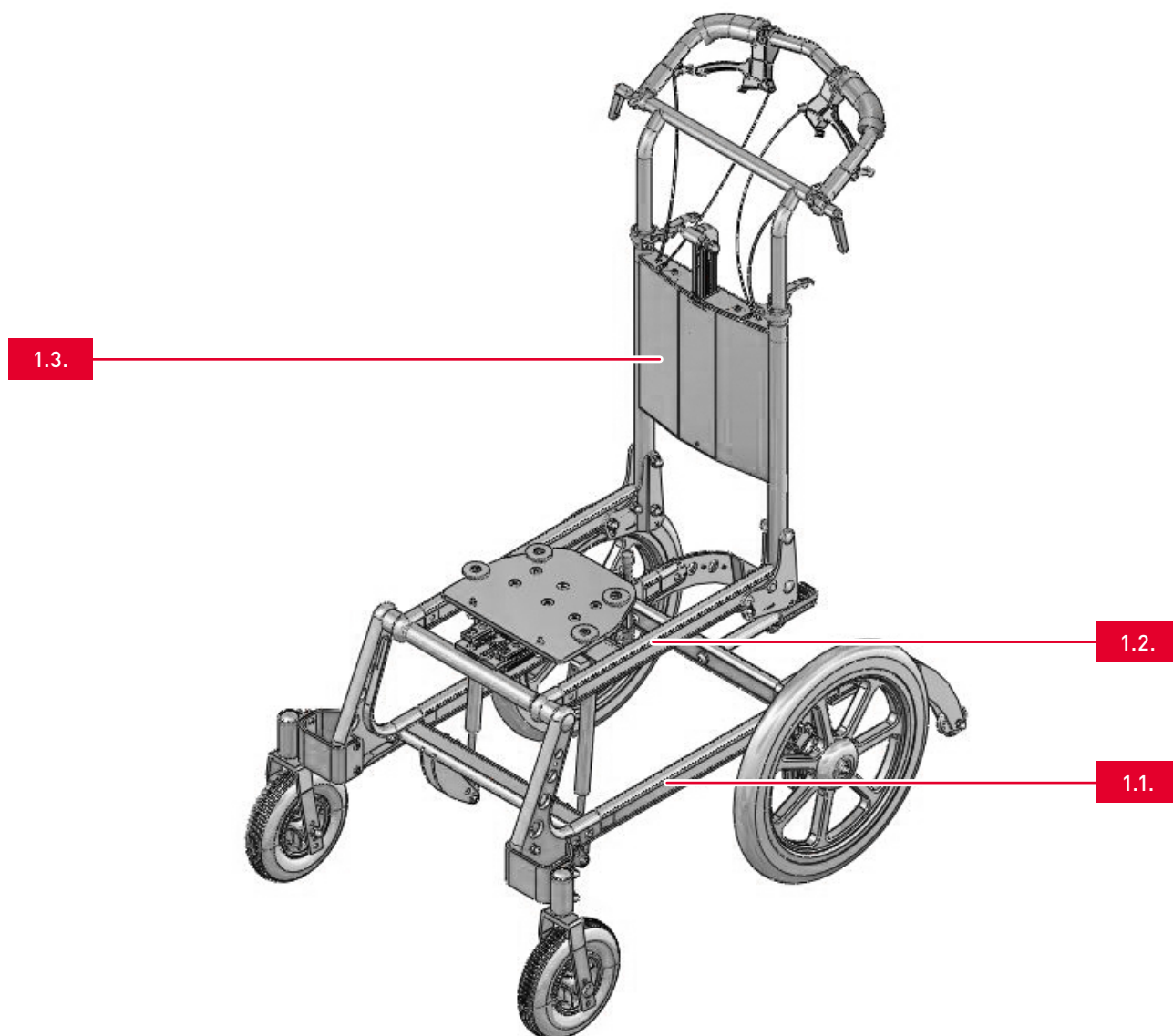

Nr./No.	Artikel/Article
1.1.	Unterer Rahmen/Lower frame
1.2.	Oberer Rahmen/Upper frame
1.3.	Rücken/Back

1.1. Unterer Rahmen/Lower frame


1.1.1. Unterer Rahmen/Lower frame

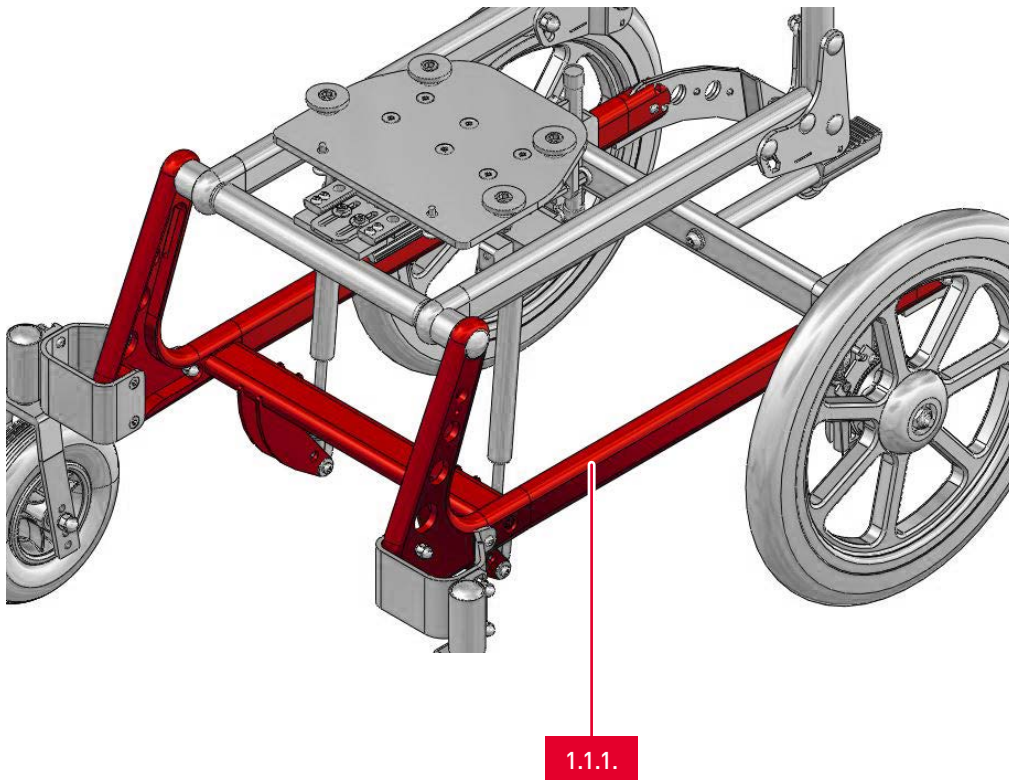

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.1.1.1.	Unterer Rahmen SB40 (bitte Farbe angeben)/ Lower frame SB40 (please indicate color)	ST	39250
1.1.1.2.	Unterer Rahmen SB45 (bitte Farbe angeben)/ Lower frame SB45 (please indicate color)	ST	39250
1.1.1.3.	Option niedrige Ausführung (bitte zusätzlich angeben)/ Option low version (to be indicated separately)	ST	39270
1.1.1.4.	Option verstärkte Ausführung (bitte zusätzlich angeben)/ Option reinforced version (to be indicated separately)	ST	39271
1.1.1.5.	Option extra leichte Ausführung (bitte zusätzlich angeben)/ Option extra light version (to be indicated separately)	ST	39272

1.1. Unterer Rahmen/Lower frame


1.1.2. Lenkräder/Front wheels

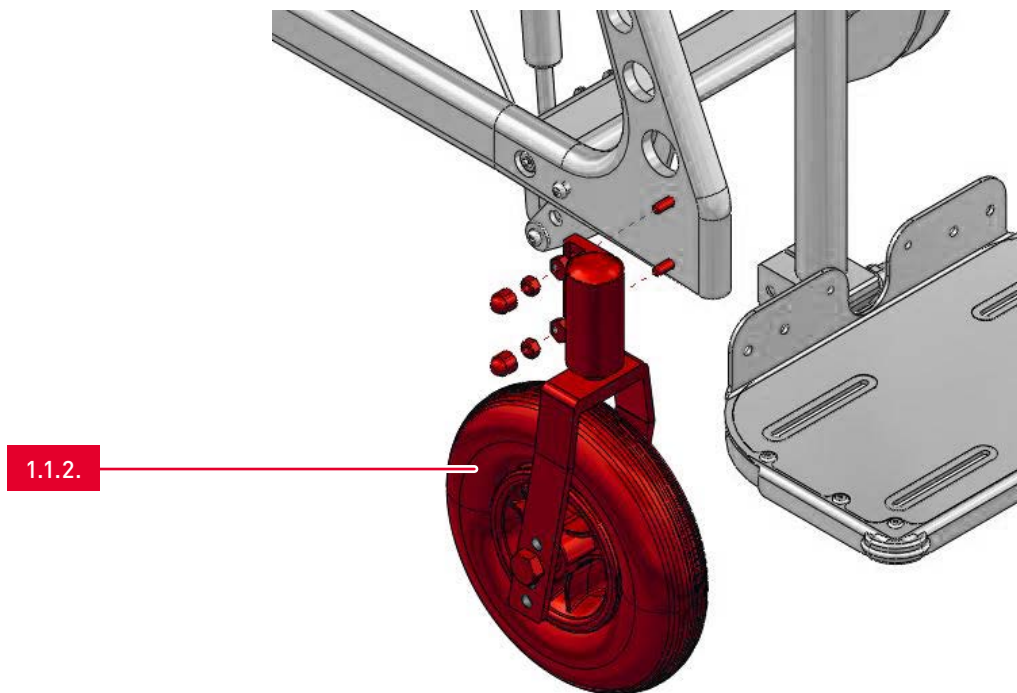

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.1.2.1.	200 x 50 Luftbereifung inkl. Lenkradgabel und Montagematerial/ 200 x 50 pneumatic tires incl. steering wheel fork and mounting material	SA	73017
1.1.2.2.	Option pannensichere Bereifung für obengenannten Artikel (bitte zusätzlich angeben)/Option solid tires for article mentioned above (to be indicated separately)	SA	39051
1.1.2.3.	Pannensichere Bereifung 6" inkl. Lenkradgabel und Montagematerial/ Solid tires 6" incl. steering wheel fork and mounting material	SA	73019
1.1.2.4.	Pannensichere Bereifung 7" inkl. Lenkradgabel und Montagematerial/ Solid tires 7" incl. steering wheel fork and mounting material	SA	73018

1.1. Unterer Rahmen/Lower frame


1.1.3. Hinterräder/Rear wheels

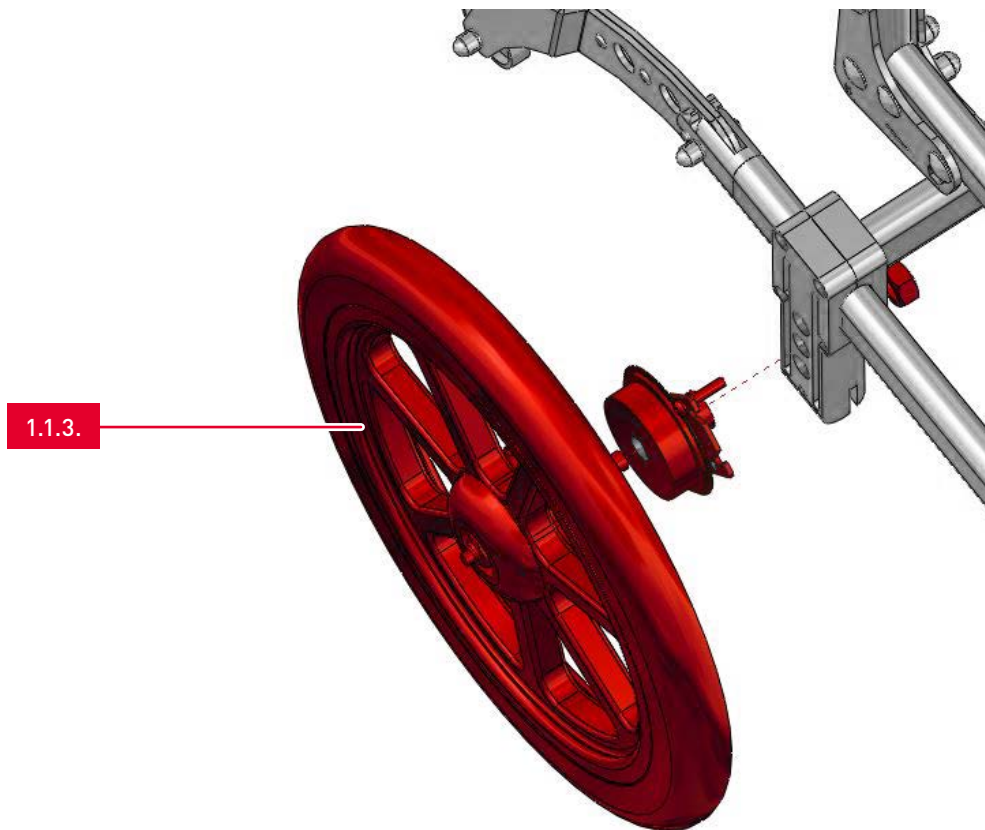

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.1.3.1.	Wechselsatz Räder 12" Luftbereifung mit Kunststoff-Felge inkl. Trommelbremsen und Steckachsen/12" interchangeable set of wheels with plastic rims incl. drum brake and quick-release axle	SA	73015-12/16
1.1.3.2.	Wechselsatz Räder 16" Luftbereifung mit Kunststoff-Felge inkl. Trommelbremsen und Steckachsen/16" interchangeable set of wheels with plastic rims incl. drum brake and quick-release axle	SA	73015-12/16
1.1.3.3.	Wechselsatz Räder 22" Luftbereifung mit Stahl-Felge inkl. Trommelbremsen und Steckachsen/22" interchangeable set of wheels with steel rims incl. drum brake and quick-release axle	SA	73015-20/24
1.1.3.4.	Wechselsatz Räder 24" Luftbereifung mit Stahl-Felge inkl. Trommelbremsen und Steckachsen/24" interchangeable set of wheels with steel rims incl. drum brake and quick-release axle	SA	73015-20/24
1.1.3.5.	Option pannensichere Bereifung für obengenannte Artikel [bitte zusätzlich angeben]/option solid tires for articles mentioned above [to be indicated separately]	SA	39052

1.1. Unterer Rahmen/Lower frame


1.1.4. Ankipphilfe/Anti-tip

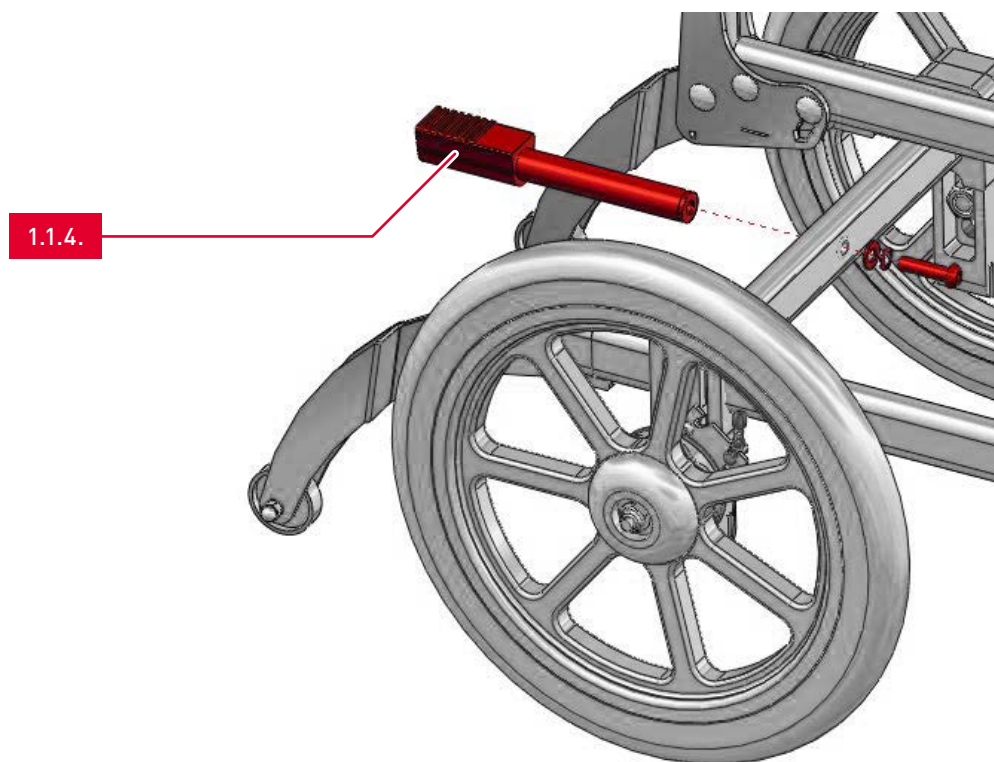

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.1.4.	Ankipphilfe inkl. Montagematerial/Anti-tip incl. mounting material	ST	39049

1.1. Unterer Rahmen/Lower frame


1.1.5. Stützrad/Tilting support rollers

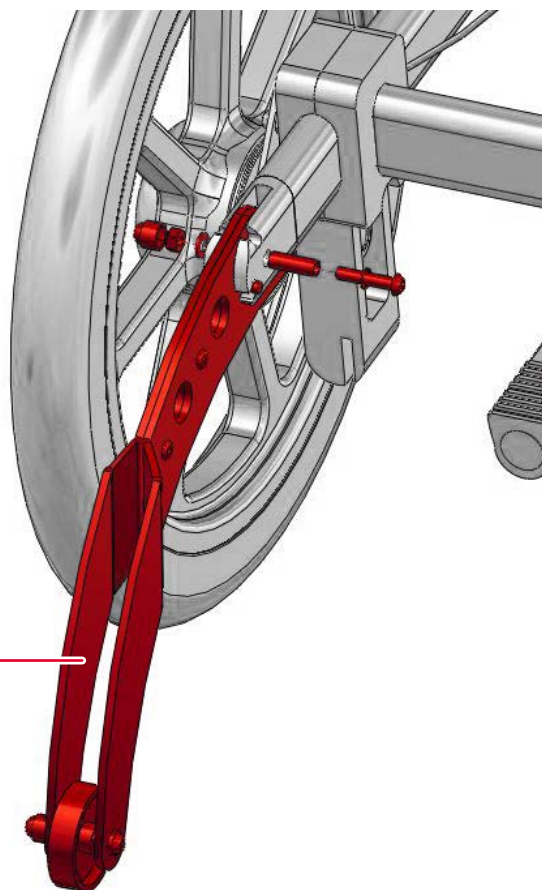

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.1.5.	Schwenkbare Stützrollen (Standardversion) inkl. Montagematerial/ Tilting support rollers (standard version) incl. mounting material	SA	39212

1.1. Unterer Rahmen/Lower frame


1.1.6. Gasdruckfeder und Halter/Gas spring and bracket

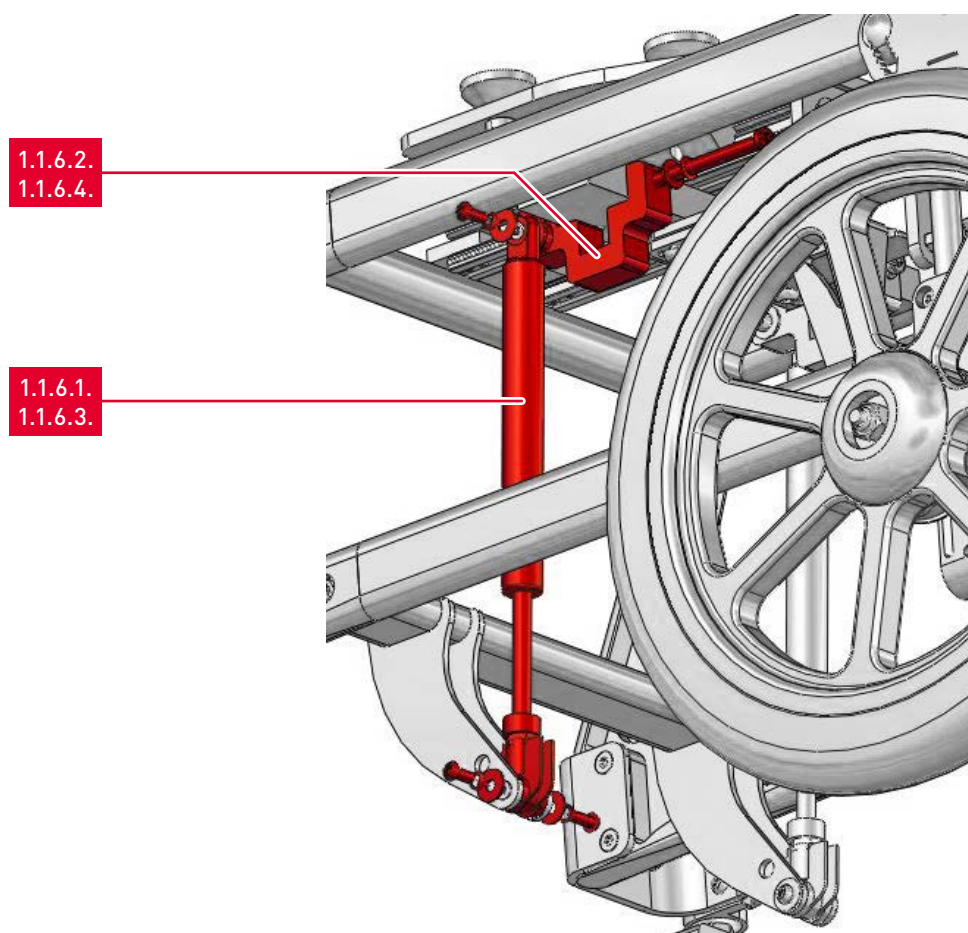

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.1.6.1.	Gasdruckfeder 300N inkl. Montagematerial/ Gas spring 300N incl. mounting material	ST	73073-300N
1.1.6.2.	Halter mit Gasdruckfeder 300N komplett vormontiert/ Holder with gas spring 300N complete pre-installed	ST	73010
1.1.6.3.	Gasdruckfeder 500N inkl. Montagematerial/ Gas spring 500N incl. mounting material	ST	73073-500N
1.1.6.4.	Halter mit Gasdruckfeder 500N komplett vormontiert/ Holder with gas spring 500N complete pre-installed	ST	73011

1.1. Unterer Rahmen/Lower frame


1.1.7. Hintere Querstrebe/Rear cross brace

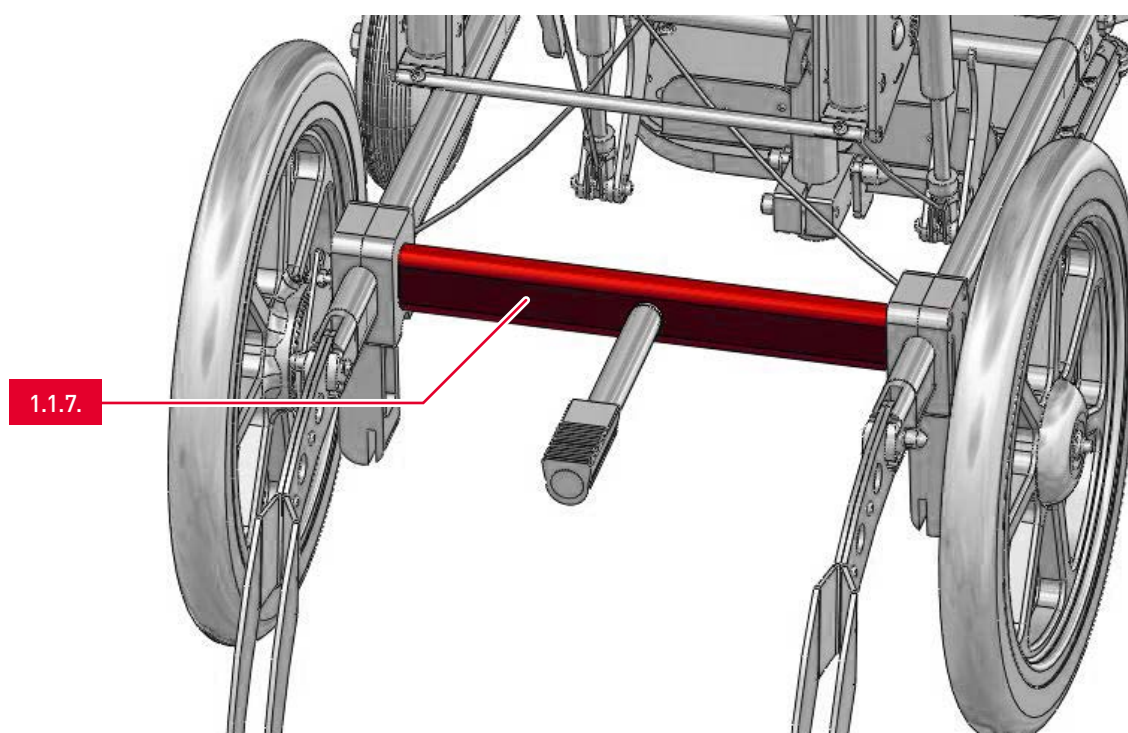

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.1.7.1.	Hintere Querstrebe für SB40 (bitte Farbe angeben)/ Rear cross brace for SB40 (please indicate color)	ST	39251
1.1.7.2.	Hintere Querstrebe für SB45 (bitte Farbe angeben)/ Rear cross brace for SB45 (please indicate color)	ST	39251

1.2. Oberer Rahmen/Upper frame


1.2.1. Oberer Rahmen/Upper frame

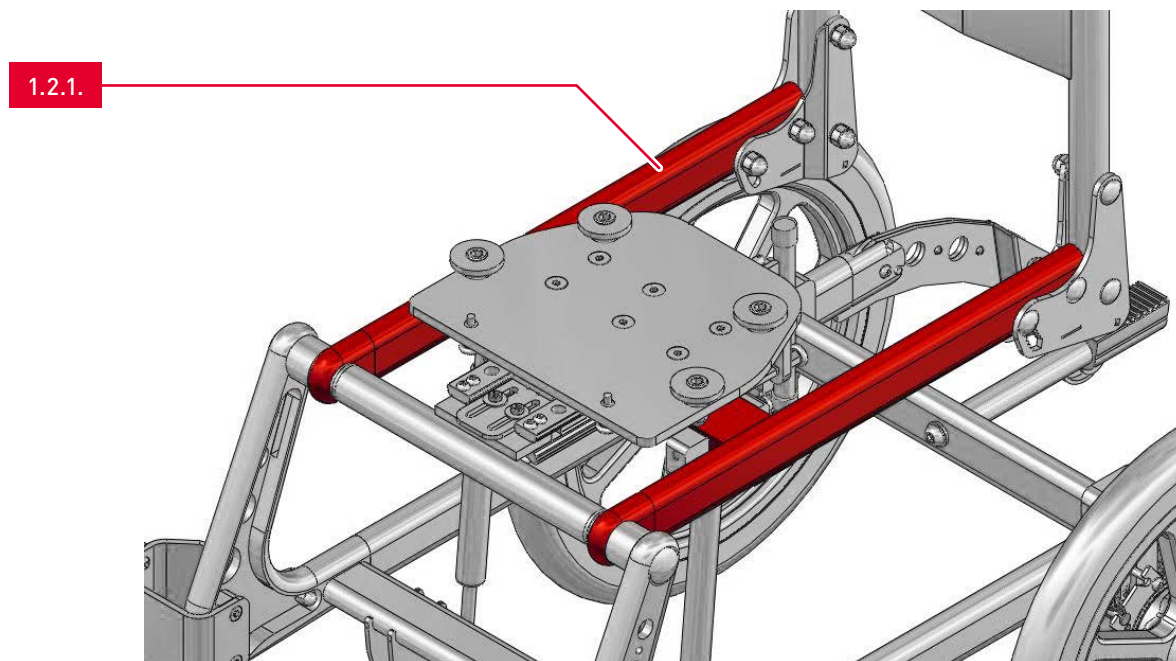

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.2.1.	Oberer Rahmen SB40/45 (bitte Commission und Farbe angeben)/ Upper frame SB40/45 (please indicate Commission and color)	ST	39245

1.2. Oberer Rahmen/Upper frame


1.2.2. Beckenrückzugseinheit/Pelvic retraction unit

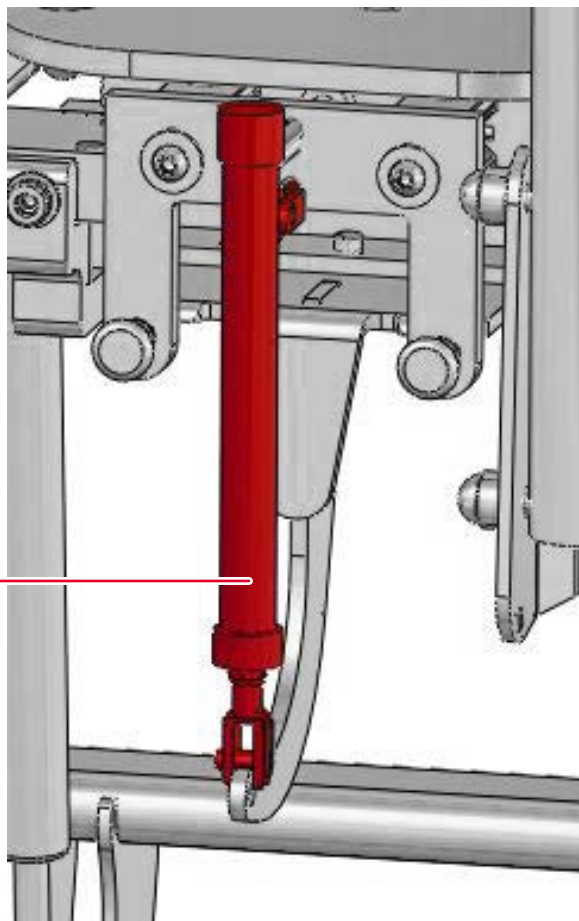

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.2.2.1.	Beckenrückzugseinheit Standard inkl. Montagematerial/ Pelvis retraction unit standard incl. mounting material	ST	39016
1.2.2.2.	Beckenrückzugseinheit für maximalen Hüftöffnungswinkel inkl. Montagematerial/Pelvis retraction unit for maximum hip opening angle incl. mounting material	ST	39016-MAX

1.2. Oberer Rahmen/Upper frame


1.2.3. Halter für Rückzugseinheit/Holder for retraction unit

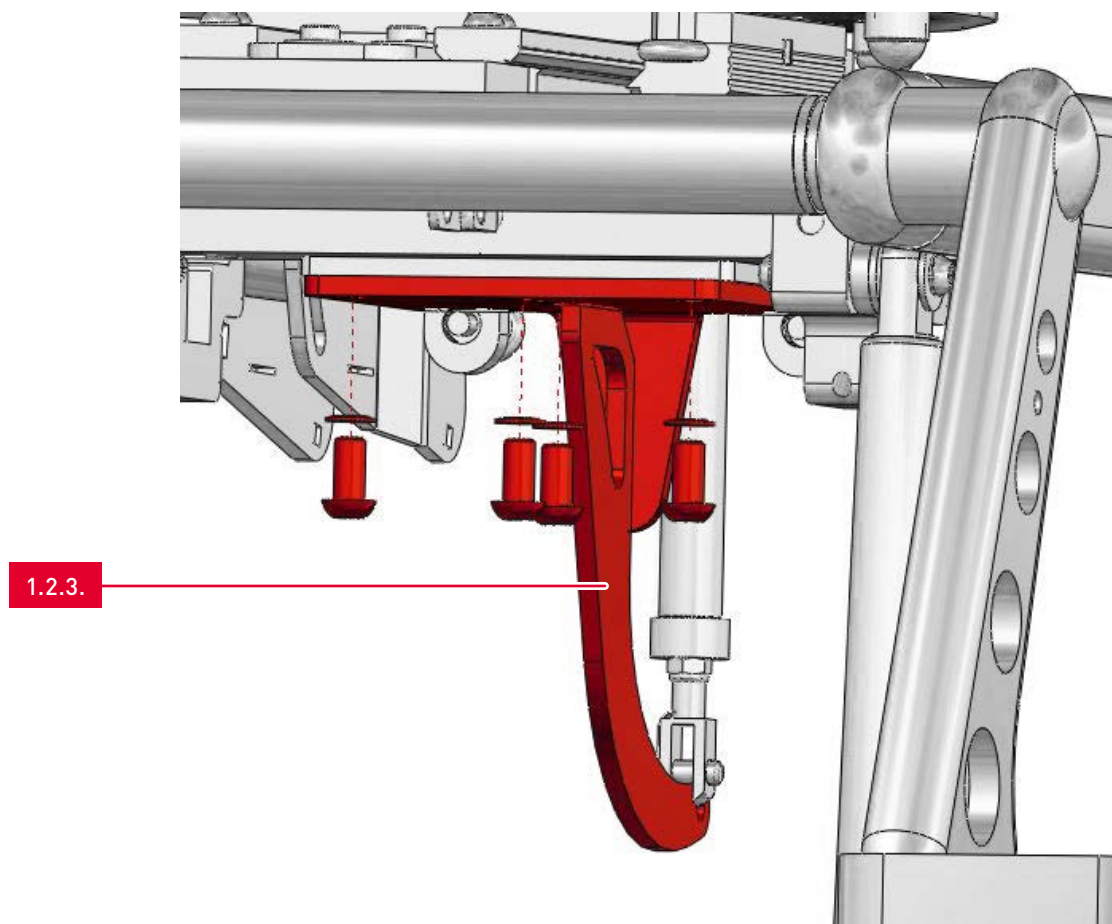

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.2.3.	Halter für Rückzugseinheit inkl. Montagematerial/ Holder for retraction unit incl. mounting material	ST	39016-Halter

1.2. Oberer Rahmen/Upper frame


1.2.4. Rückenarretierungseinheit/Back locking unit

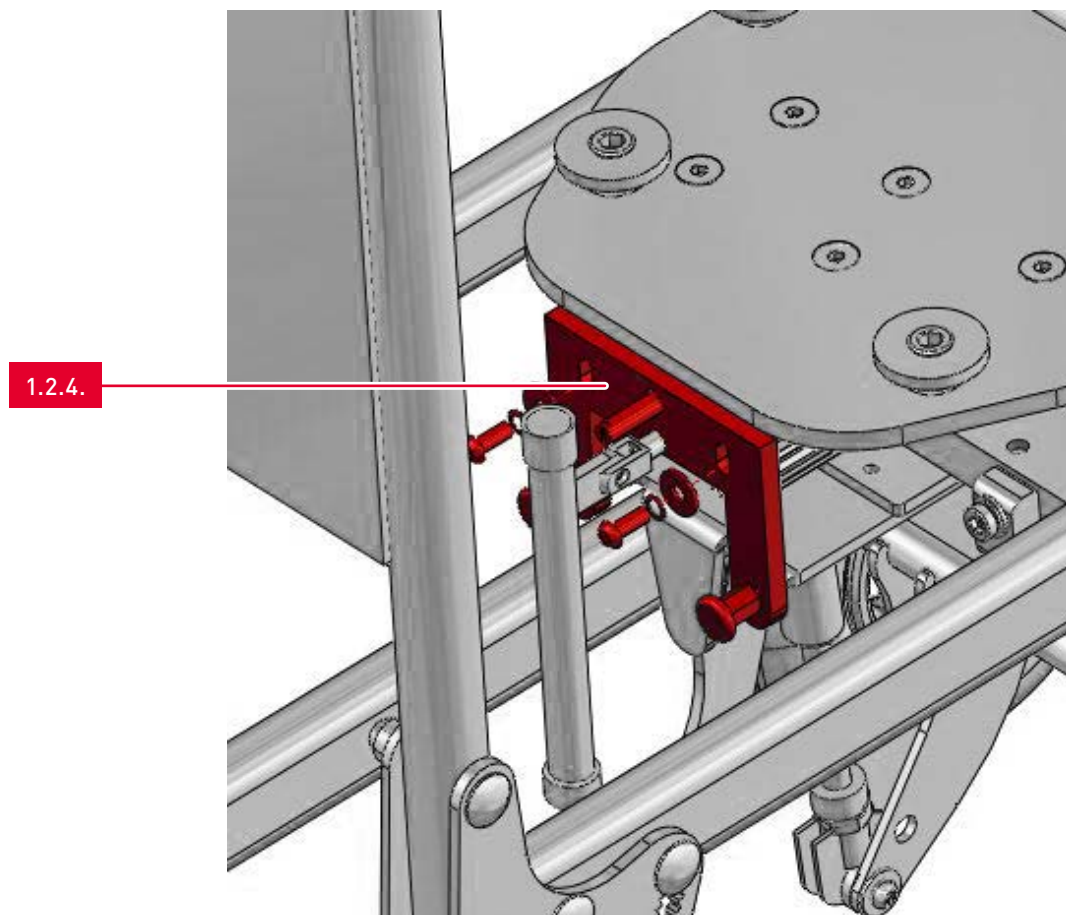

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.2.4.	Rückenarretierungseinheit inkl. Montagematerial/ Back locking unit incl. mounting material	ST	39273

1.2. Oberer Rahmen/Upper frame


1.2.5. Trapezadapteraufnahme/Trapezoidal adapter mount

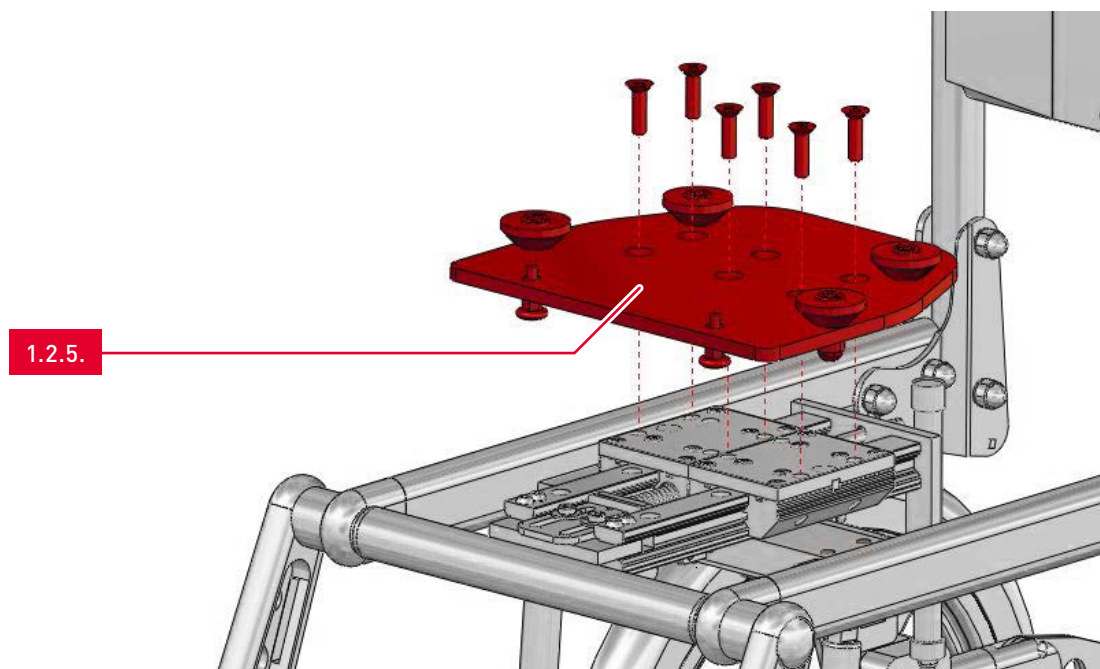

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.2.5.	Trapezadapteraufnahme für SB40/45 inkl. Montagematerial/ Trapezoidal adapter mount for SB40/45 incl. mounting material	ST	40119

1.2. Oberer Rahmen/Upper frame


1.2.6. Linearführung/Linear guide

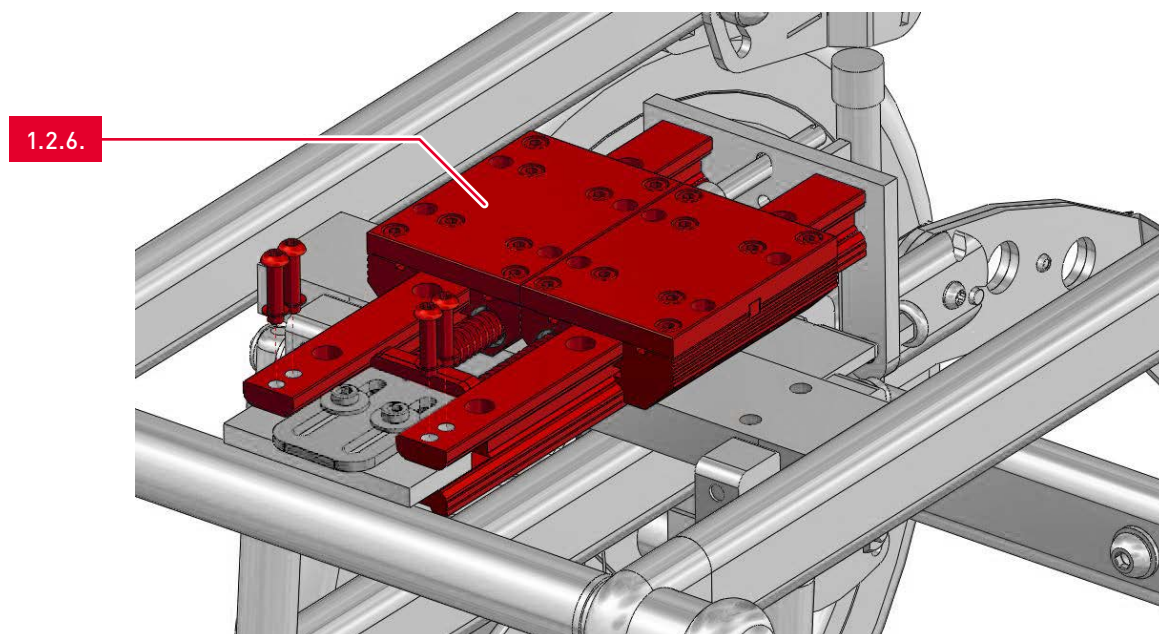

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.2.6.	Linearführung für Becken komplett inkl. Montagematerial/ Linear guide for Pelvis complete incl. mounting material	SA	39215

1.2. Oberer Rahmen/Upper frame


1.2.7. Drehpunkthülse/Pivot sleeve

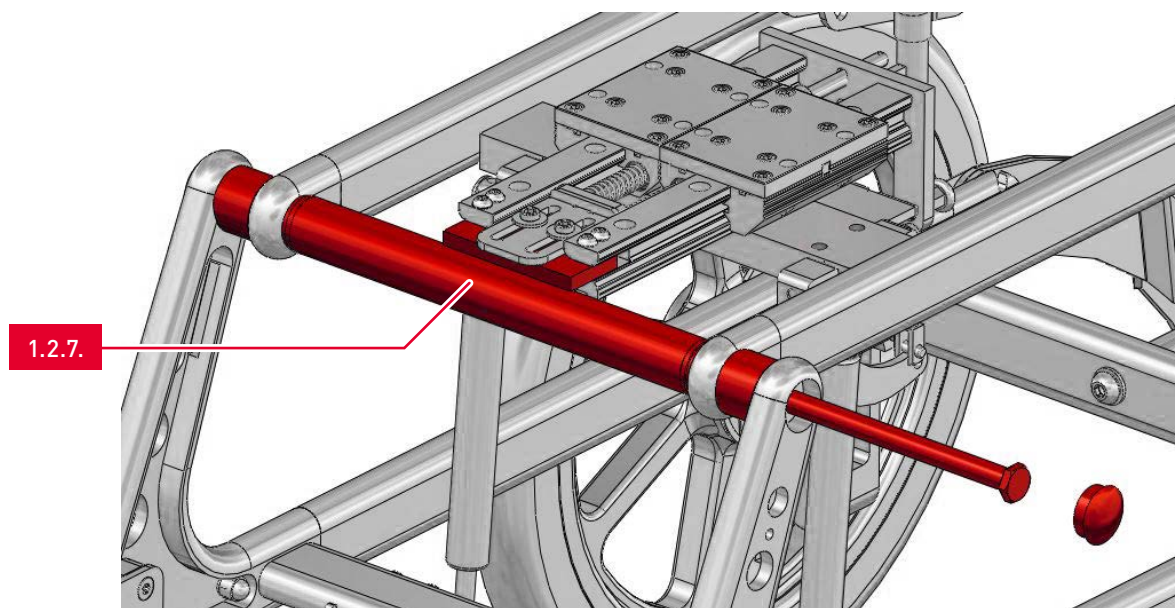

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.2.7.1.	Drehpunkthülse für SB40 inkl. Montagematerial/ Pivot sleeve for SB40 incl. mounting material	ST	39274
1.2.7.2.	Drehpunkthülse für SB45 inkl. Montagematerial/ Pivot sleeve for SB45 incl. mounting material	ST	39274

1.3. Rücken/Back


1.3.1. Schiebegriffwinkelverstellbleche/ Push handle angle adjustment plates

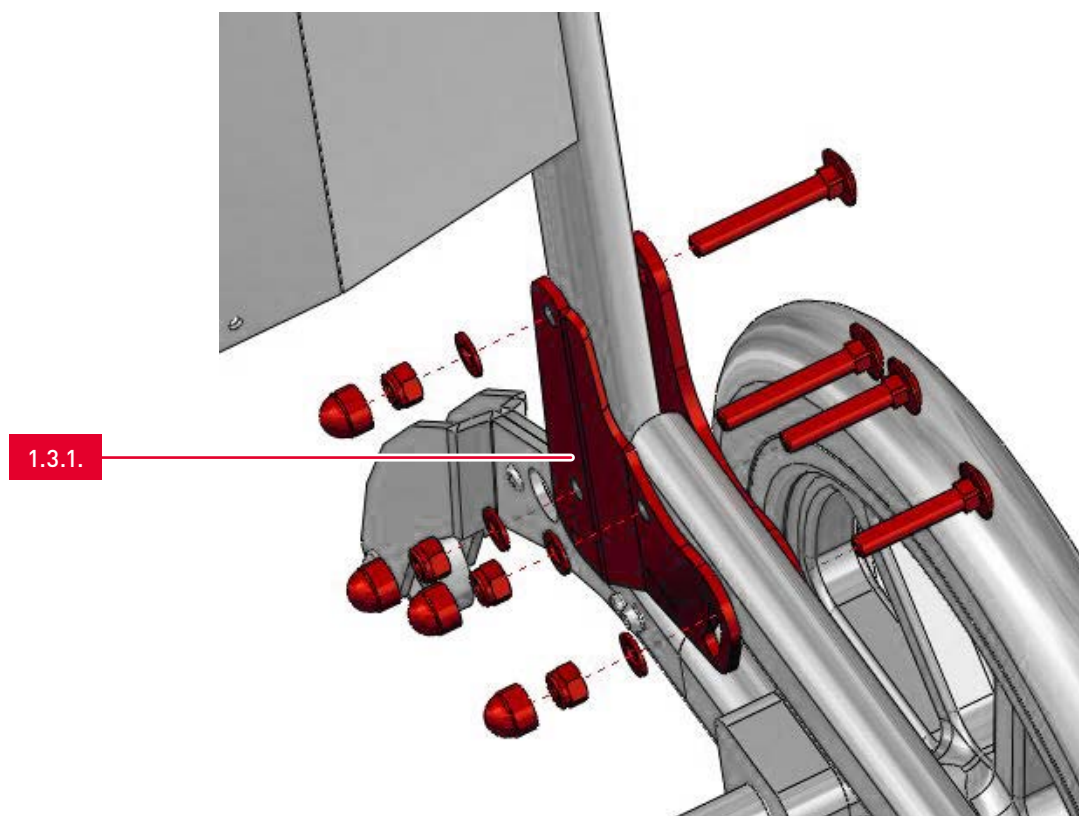

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.3.1.	Schiebegriffwinkelverstellbleche mit Raster inkl. Montagematerial/ Push handle angle adjustment plates with grid incl. mounting material	SA	39237

1.3. Rücken/Back


1.3.2. Rücken/Back

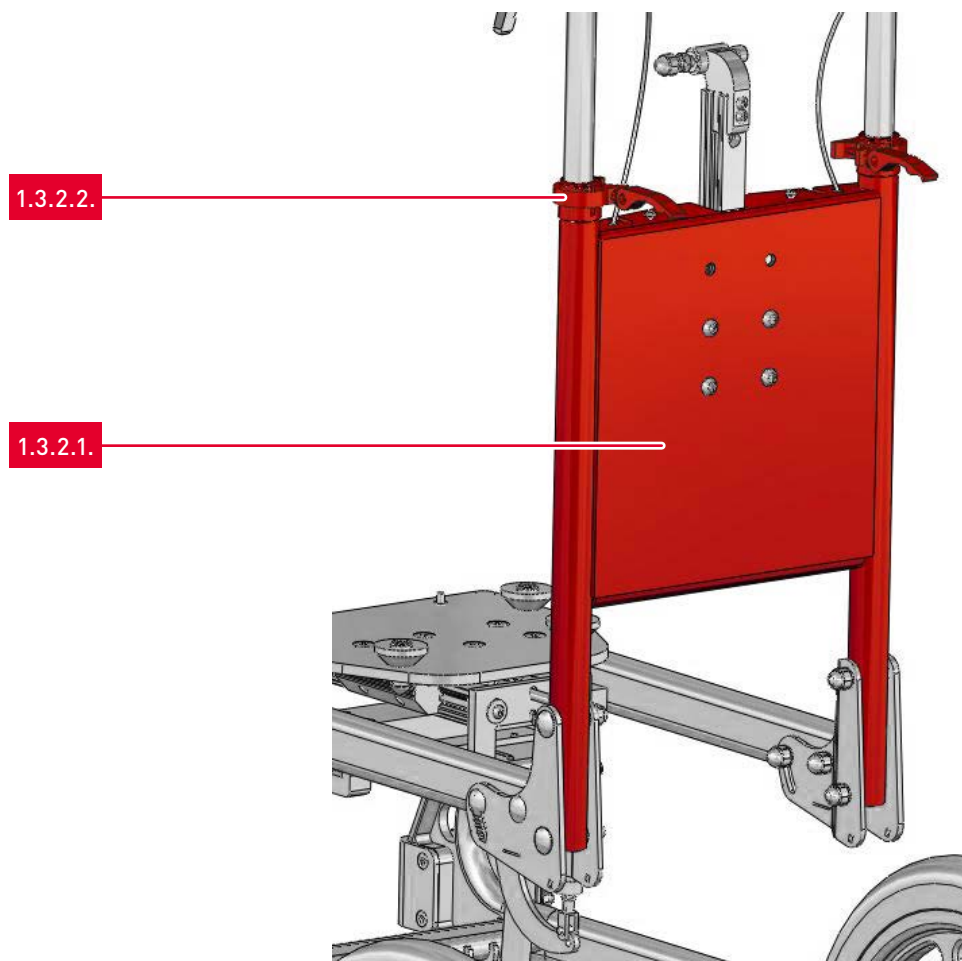

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.3.2.1.	Rücken für SB40/45 (bitte Commission und Farbe angeben)/ Back for SB40/45 (please indicate commission and color)	ST	39220
1.3.2.2.	Sattelstützklemme für Schiebegriff/Pipe clamp for push handle	SA	HW99-2080

1.3. Rücken/Back


1.3.3. Abdeckblech/Cover plate

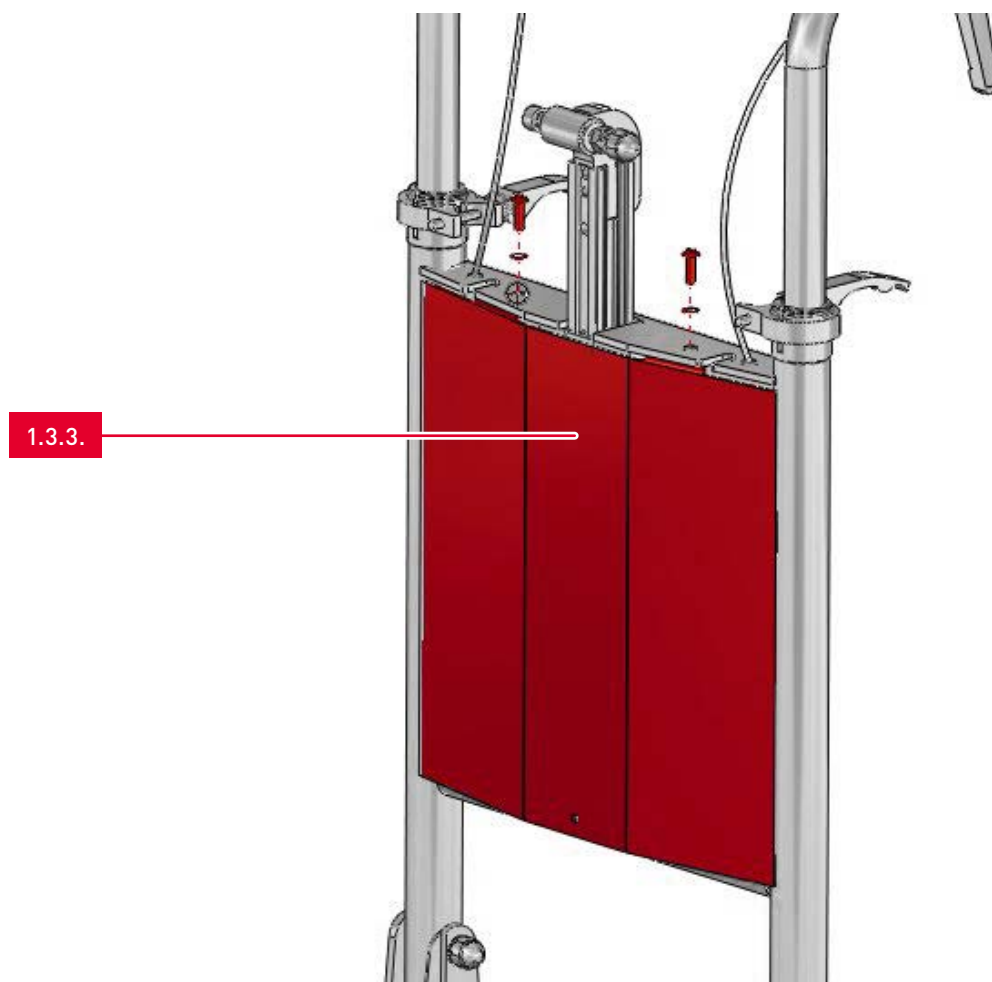

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.3.3.1.	Abdeckblech Gr. 1 (Höhe 235mm) inkl. Montagematerial (bitte Farbe angeben)/Cover plate size 1 (height 235mm) incl. mounting material (please indicate color)	ST	39275
1.3.3.2.	Abdeckblech Gr.2 (Höhe 275mm) inkl. Montagematerial (bitte Farbe angeben)/Cover plate size 2 (height 275mm) incl. mounting material (please indicate color)	ST	39276

1.3. Rücken/Back


1.3.4. Linearführung/Linear guide

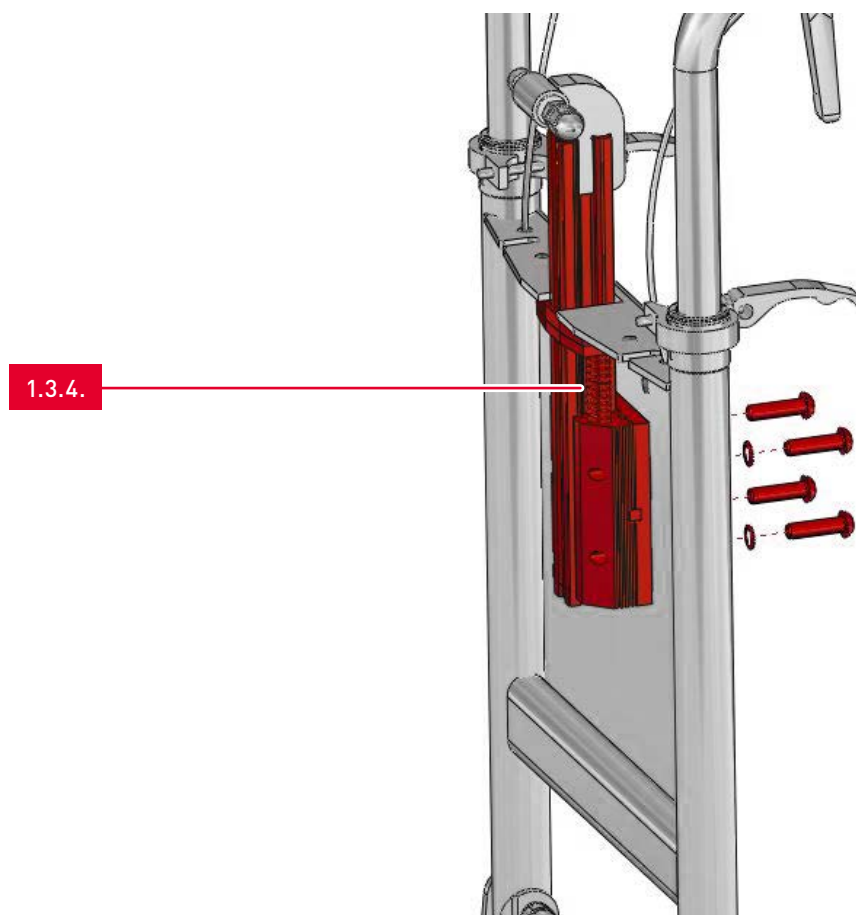

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.3.4.	Linearführung für Rücken komplett inkl. Montagematerial/ Linear guide for back complete incl. mounting material	SA	39215

1.3. Rücken/Back


1.3.5. Rückengelenkstück/Back joint piece

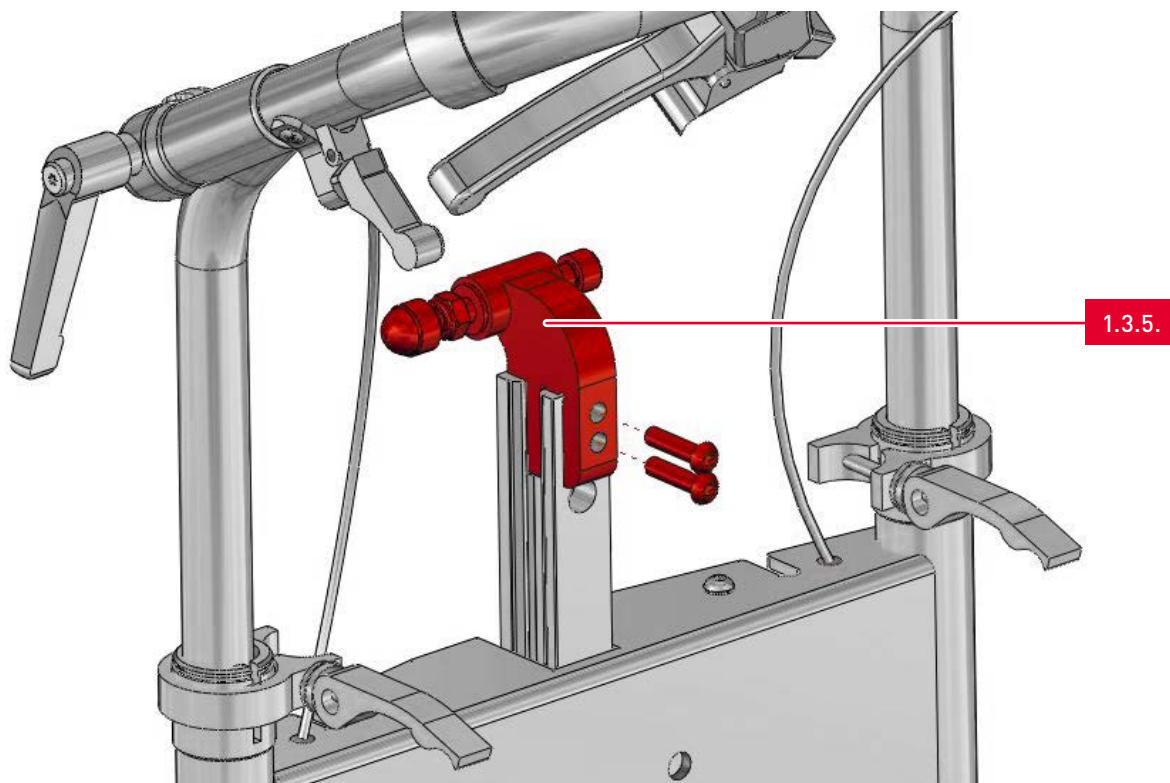

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.3.5.1.	Rückengelenkstück für Kopfstützenaufnahme Vierkant inkl. Montagematerial/Back joint piece for headrest mount square incl. mounting material	ST	39238-V
1.3.5.2.	Rückengelenkstück für Kopfstützenaufnahme ALULINE inkl. Montagematerial/Back joint piece for headrest mount ALULINE incl. mounting material	ST	39238-A

1.3. Rücken/Back


1.3.6. Schiebegriff/ Push-handle

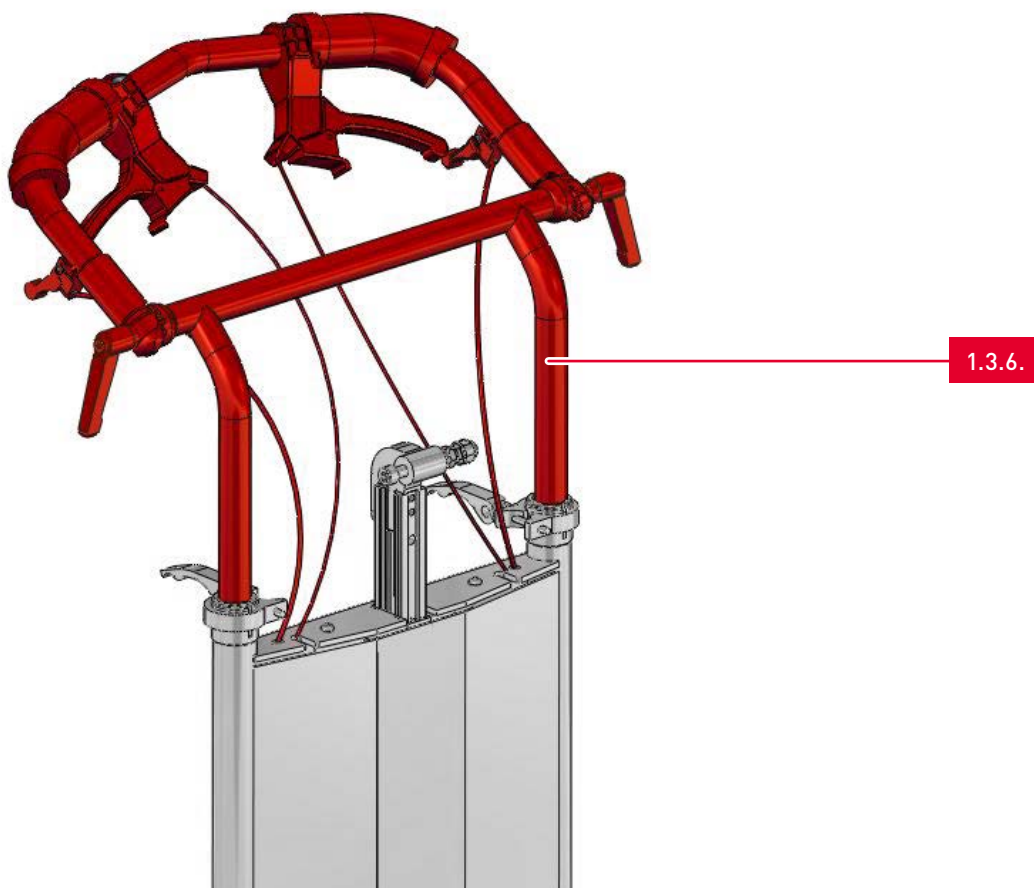

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.3.6.	Schiebegriff für SB 40/45 komplett vormontiert inkl. Bremsgriffe und Moosgummihandgriffe/ Push handle for SB40/45 complete pre-installed incl. brake handles and foam rubber handles	ST	39206


1.3. Rücken/Back

1.3.7. Bowdenzug/Bowden cables

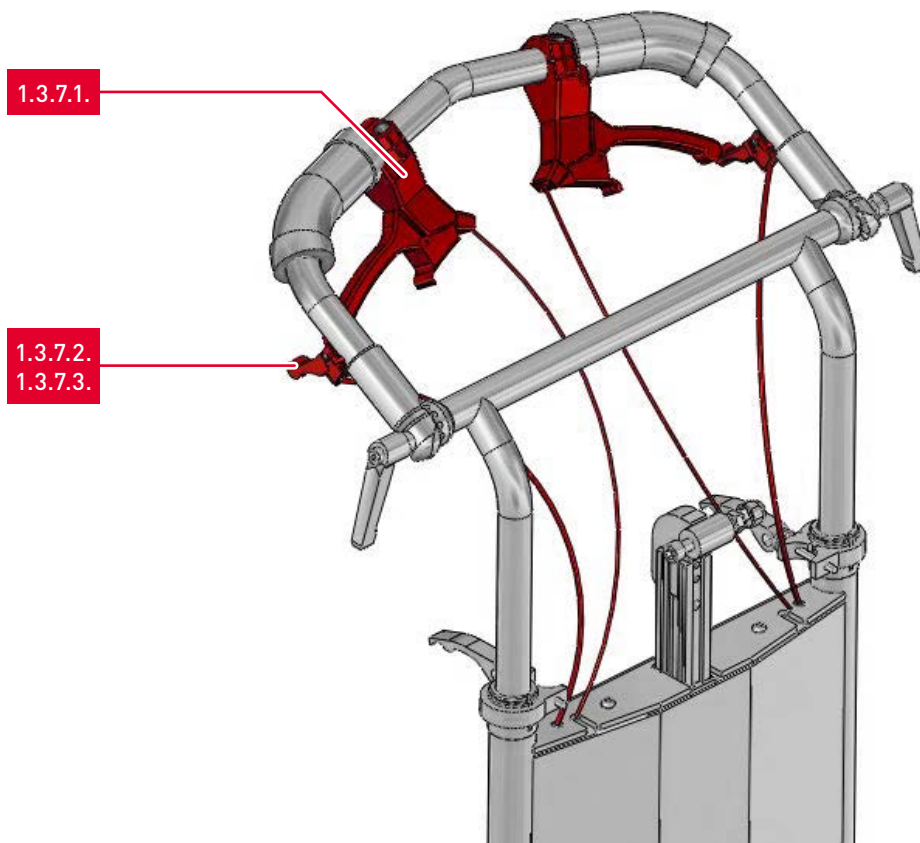

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
1.3.7.1.	Bowdenzug mit Bremsgriff (3 Rasten) für Trommelbremsrad-Bedienung als Komplettinbausatz/ Bowden cable with brake lever for drum brake incl. mounting material	SA	73072
1.3.7.2.	Bowdenzug mit Bedienhebel (kurz) einfach für Gasdruckfederverstellung als Komplettinbausatz/ Bowden cable with lever (short) for gas spring adjustment incl. mounting material	ST	73071-1
1.3.7.3.	Bowdenzug mit Bedienhebel (lang) einfach für Gasdruckfederverstellung als Komplettinbausatz/ Bowden cable with lever (long) for gas spring adjustment incl. mounting material	ST	73071-1_L


2. Übersicht Untergestell SIMPLY® LIGHT / Overview undercarriage SIMPLY® LIGHT

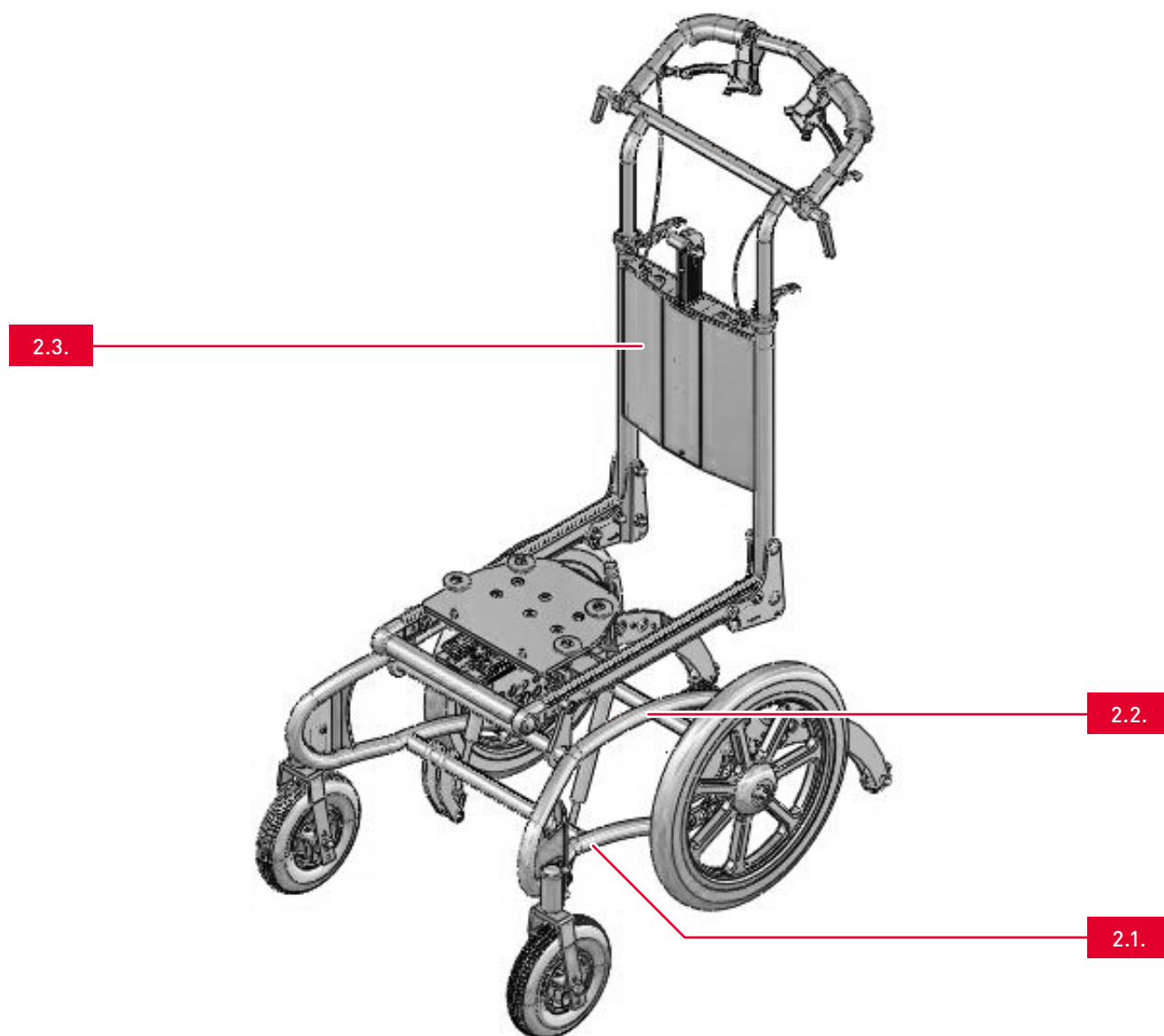

Nr./No.	Artikel/Article
2.1.	Unterer Rahmen/Lower frame
2.2.	Oberer Rahmen/Upper frame
2.3.	Rücken/Back

2.1. Unterer Rahmen/Lower frame


2.1.1. Unterer Rahmen/Lower frame

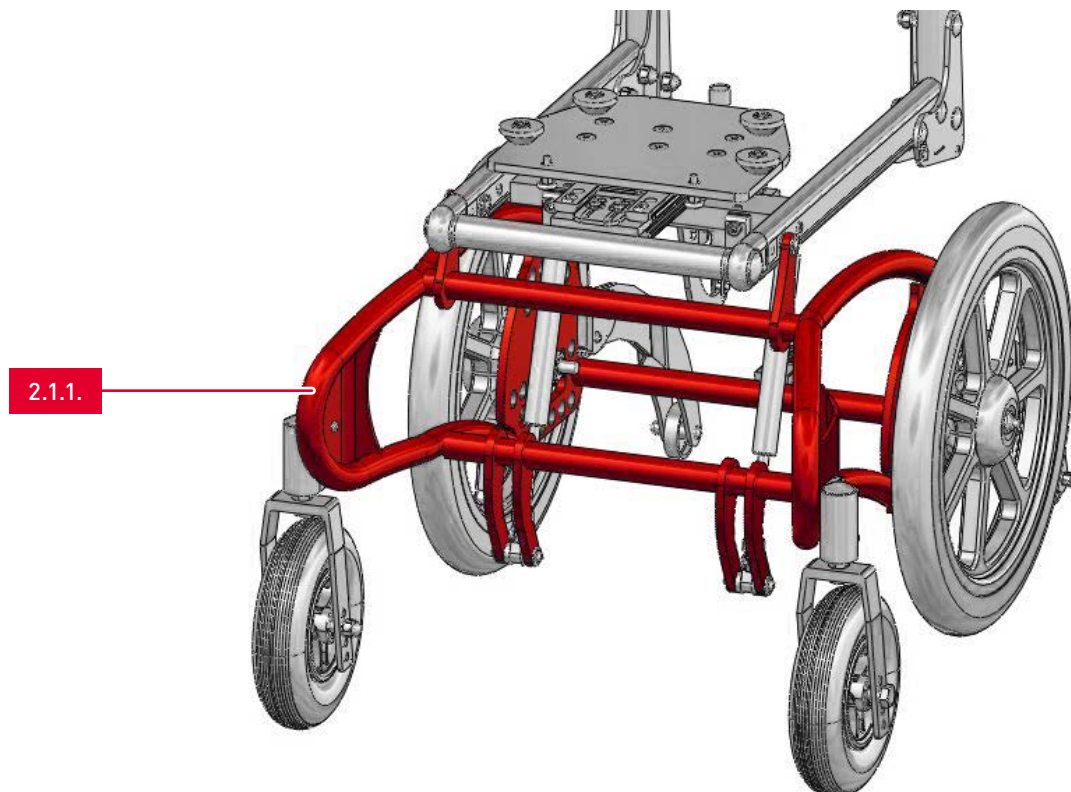

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.1.1.1.	Unterer Rahmen SB40 (bitte Farbe angeben)/ Lower frame SB40 (please indicate color)	ST	39250
2.1.1.2.	Unterer Rahmen SB45 (bitte Farbe angeben)/ Lower frame SB45 (please indicate color)	ST	39250
2.1.1.3.	Option niedrige Ausführung (bitte zusätzlich angeben)/ Option low version (to be indicated separately)	ST	39270

2.1. Unterer Rahmen/Lower frame


2.1.2. Lenkräder/Front wheels

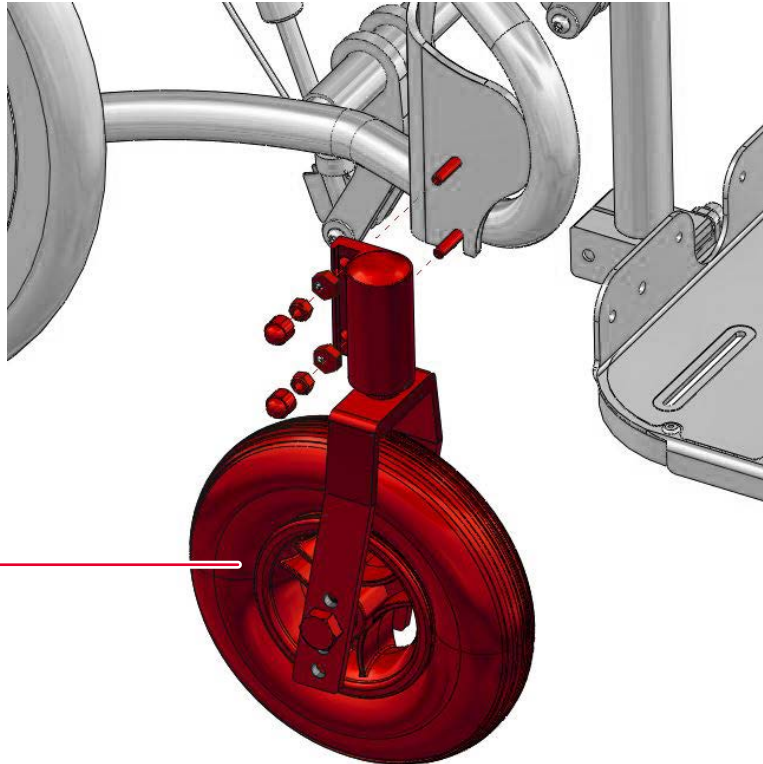

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.1.2.1.	200 x 50 Luftbereifung inkl. Lenkradgabel und Montagematerial/ 200 x 50 pneumatic tires incl. steering wheel fork mounting material	SA	75018
2.1.2.2.	Option pannensichere Bereifung für obengenannten Artikel (bitte zusätzlich angeben)/Option solid tires for article mentioned above (to be indicated separately)	SA	73022
2.1.2.3.	Pannensichere Bereifung 6" inkl. Lenkradgabel und Montagematerial/ Solid tires 6" incl. steering wheel fork and mounting material	SA	75019
2.1.2.4.	Pannensichere Bereifung 7" inkl. Lenkradgabel und Montagematerial/ Solid tires 7" incl. steering wheel fork and mounting material	SA	75020

2.1. Unterer Rahmen/Lower frame


2.1.3. Hinterräder/Rear wheels

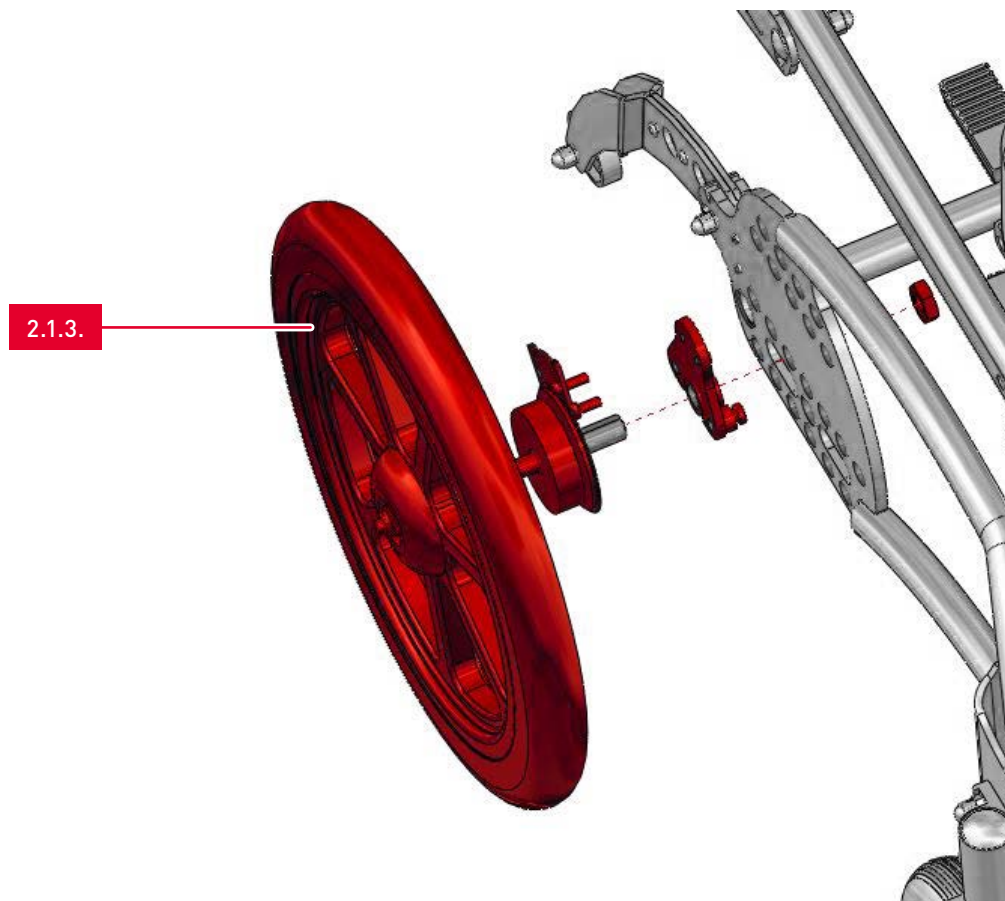

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.1.3.1.	Wechselsatz Räder 12" Luftbereifung mit Kunststoff-Felge inkl. Trommelbremsen und Steckachsen/12" interchangeable set of wheels with plastic rims incl. drum brake and quick-release axle	SA	75014-12/16
2.1.3.2.	Wechselsatz Räder 16" Luftbereifung mit Kunststoff-Felge inkl. Trommelbremsen und Steckachsen/16" interchangeable set of wheels with plastic rims incl. drum brake and quick-release axle	SA	75014-12/16
2.1.3.3.	Wechselsatz Räder 22" Luftbereifung mit Stahl-Felge inkl. Trommelbremsen und Steckachsen/22" interchangeable set of wheels with steel rims incl. drum brake and quick-release axle	SA	75014-22/24
2.1.3.4.	Wechselsatz Räder 24" Luftbereifung mit Stahl-Felge inkl. Trommelbremsen und Steckachsen/24" interchangeable set of wheels with steel rims incl. drum brake and quick-release axle	SA	75014-22/24
2.1.3.5.	Option pannensichere Bereifung für obengenannte Artikel [bitte zusätzlich angeben]/option solid tires for articles mentioned above [to be indicated separately]	SA	39052

2.1. Unterer Rahmen/Lower frame


2.1.4. Ankipphilfe/Anti-tip

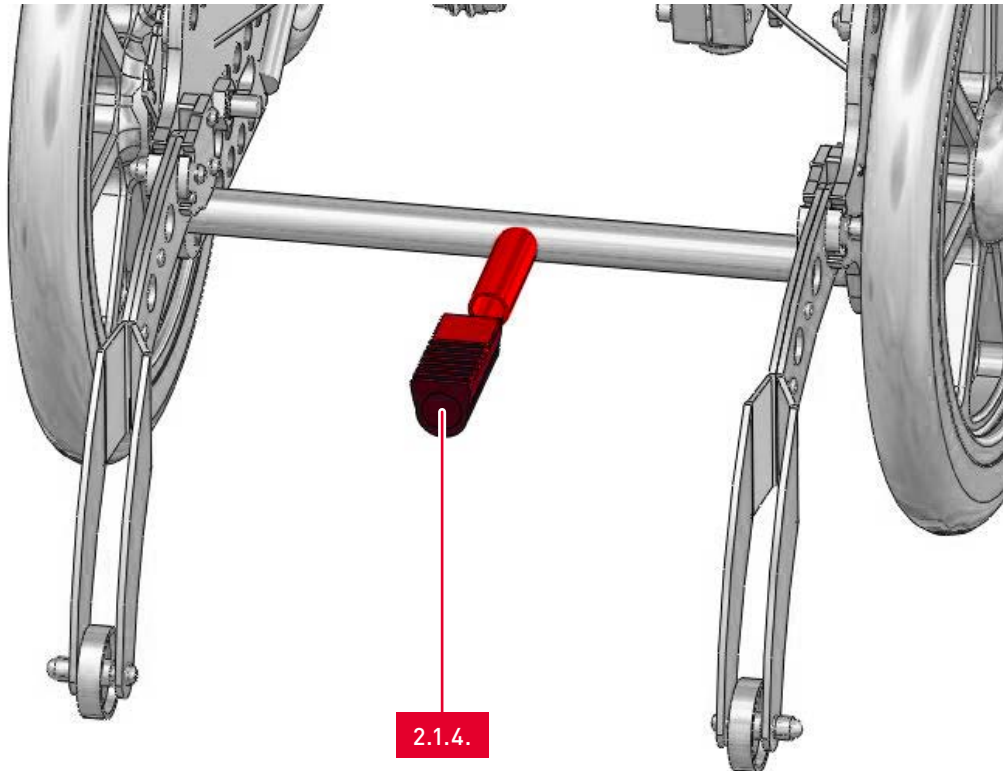

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.1.4.	Ankipphilfe inkl. Montagematerial/Anti-tip incl. mounting material	ST	39049

2.1. Unterer Rahmen/Lower frame


2.1.5. Stützrad/Tilting support rollers

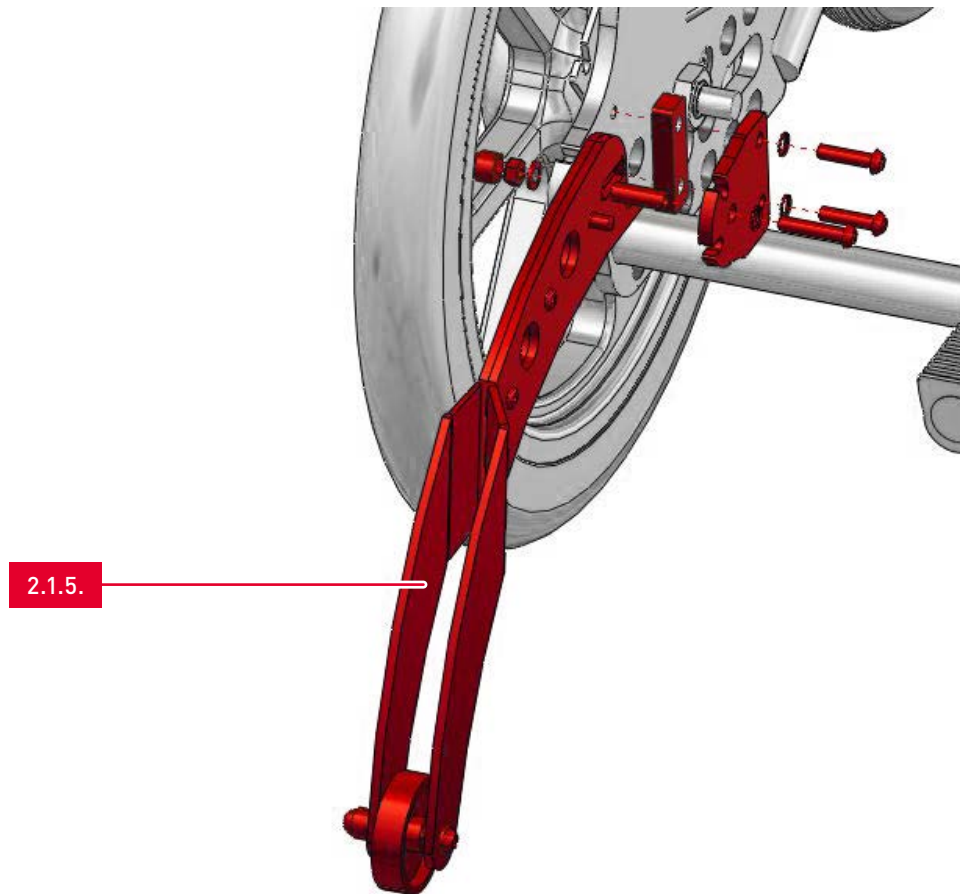

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.1.5.	Schwenkbare Stützräder (Standard Version) inkl. Montagematerial/ Tilting support rollers (standard version) incl. mounting material	SA	39212

2.1. Unterer Rahmen/Lower frame


2.1.6. Gasdruckfeder und Halter/Gas spring and bracket

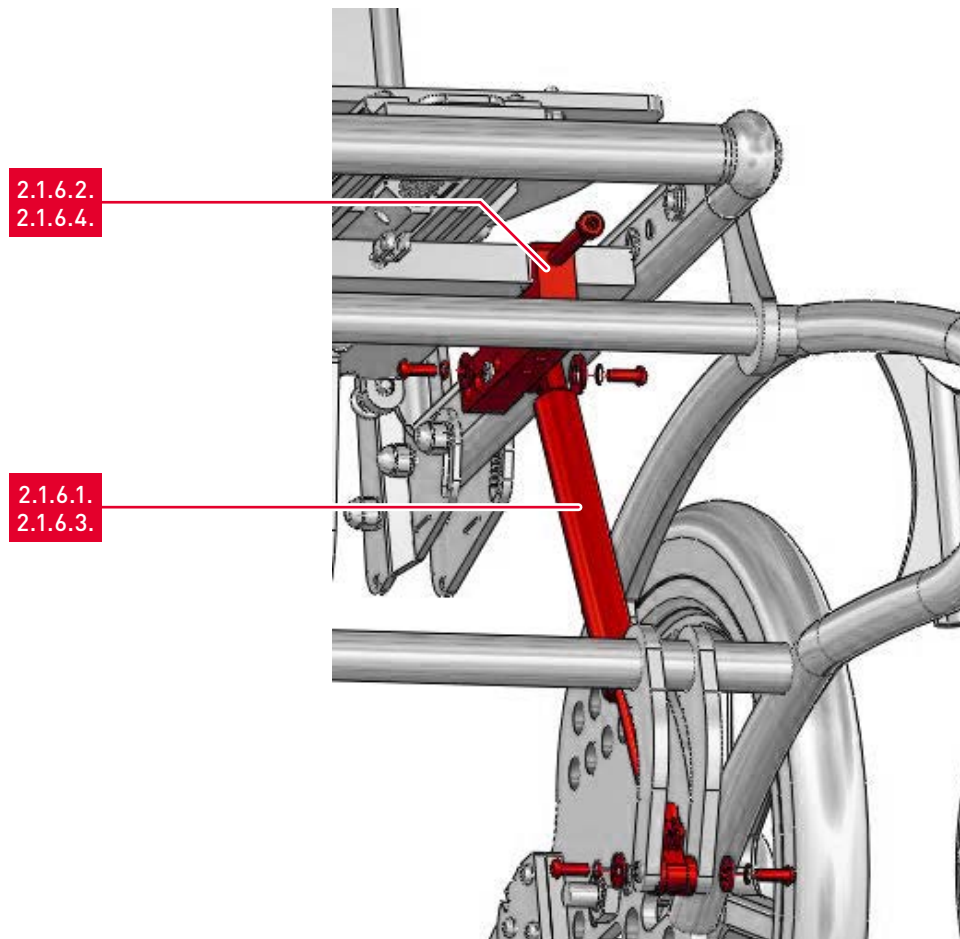

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.1.6.1.	Gasdruckfeder 300N inkl. Montagematerial/ Gas spring 300N incl. mounting material	ST	73073-300N
2.1.6.2.	Halter mit Gasdruckfeder 300N komplett vormontiert/ Holder with gas spring 300N complete pre-installed	ST	73010
2.1.6.3.	Gasdruckfeder 500N inkl. Montagematerial/ Gas spring 500N incl. mounting material	ST	73073-500N
2.1.6.4.	Halter mit Gasdruckfeder 500N komplett vormontiert/ Holder with gas spring 500N complete pre-installed	ST	73011

2.2. Oberer Rahmen/Upper frame


2.2.1. Oberer Rahmen/Upper frame

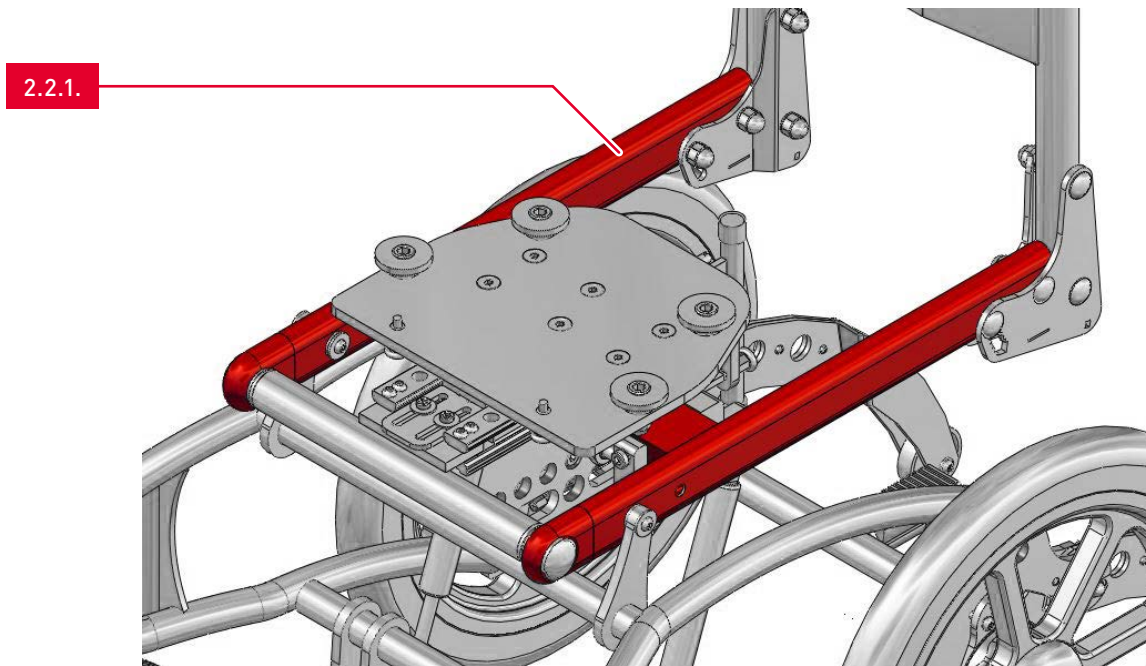

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.2.1.	Oberer Rahmen für SB40/45 (bitte Commission und Farbe angeben)/Upper frame for SB40/45 (please indicate Commission and color)	ST	39245

2.2. Oberer Rahmen/Upper frame


2.2.2. Beckenrückzugseinheit/Pelvic retraction unit

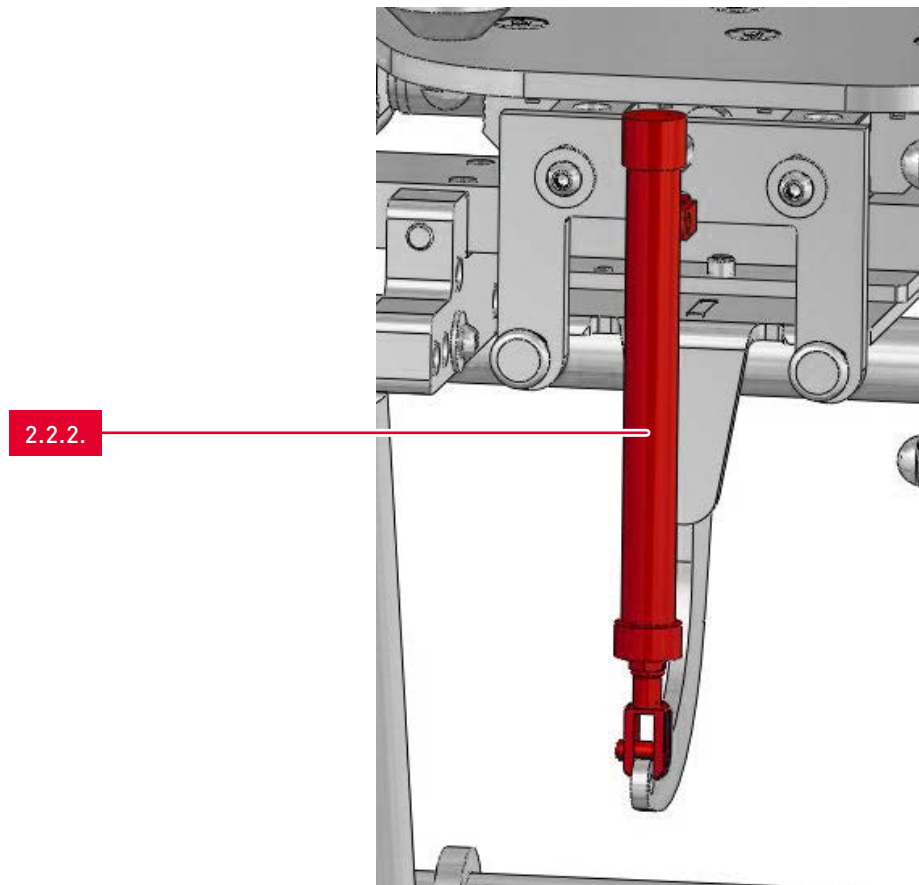

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.2.2.1.	Beckenrückzugseinheit Standard inkl. Montagematerial/ Pelvis retraction unit standard incl. mounting material	ST	39016
2.2.2.2.	Beckenrückzugseinheit für maximalen Hüftöffnungswinkel inkl. Montagematerial/Pelvis retraction unit for maximum hip opening angle incl. mounting material	ST	39016-MAX

2.2. Oberer Rahmen/Upper frame


2.2.3. Halter für Rückzugseinheit/Holder for retraction unit

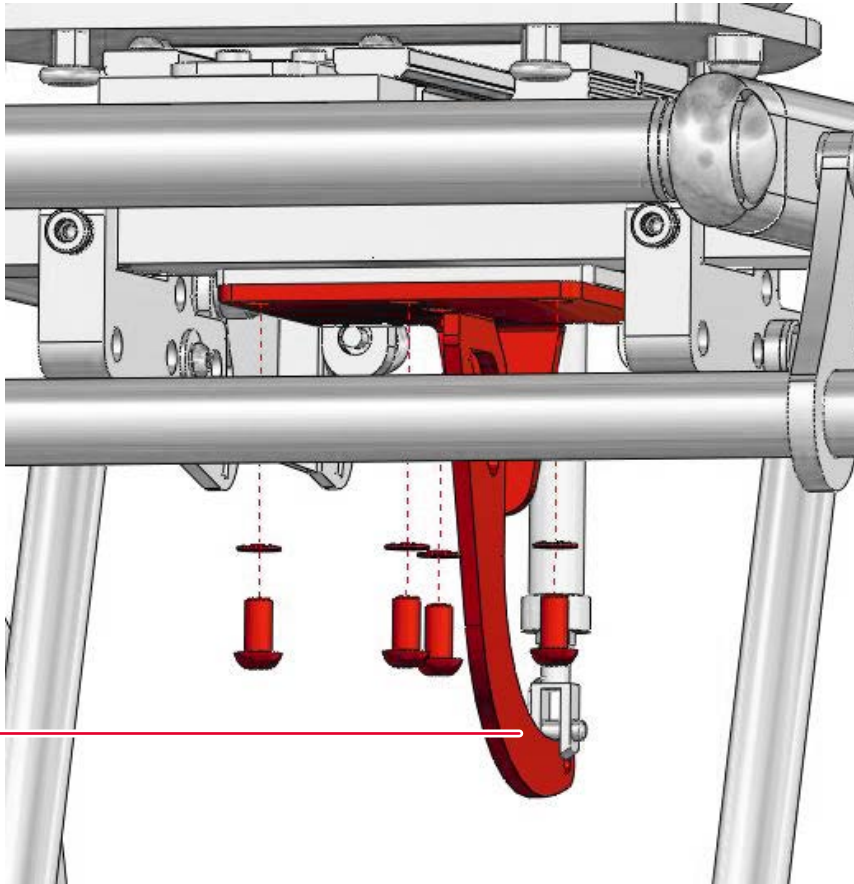

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.2.3.	Halter für Rückzugseinheit inkl. Montagematerial/ Holder for retraction unit incl. mounting material	ST	39016-Halter

2.2. Oberer Rahmen/Upper frame


2.2.4. Rückenarretierungseinheit/Back locking unit

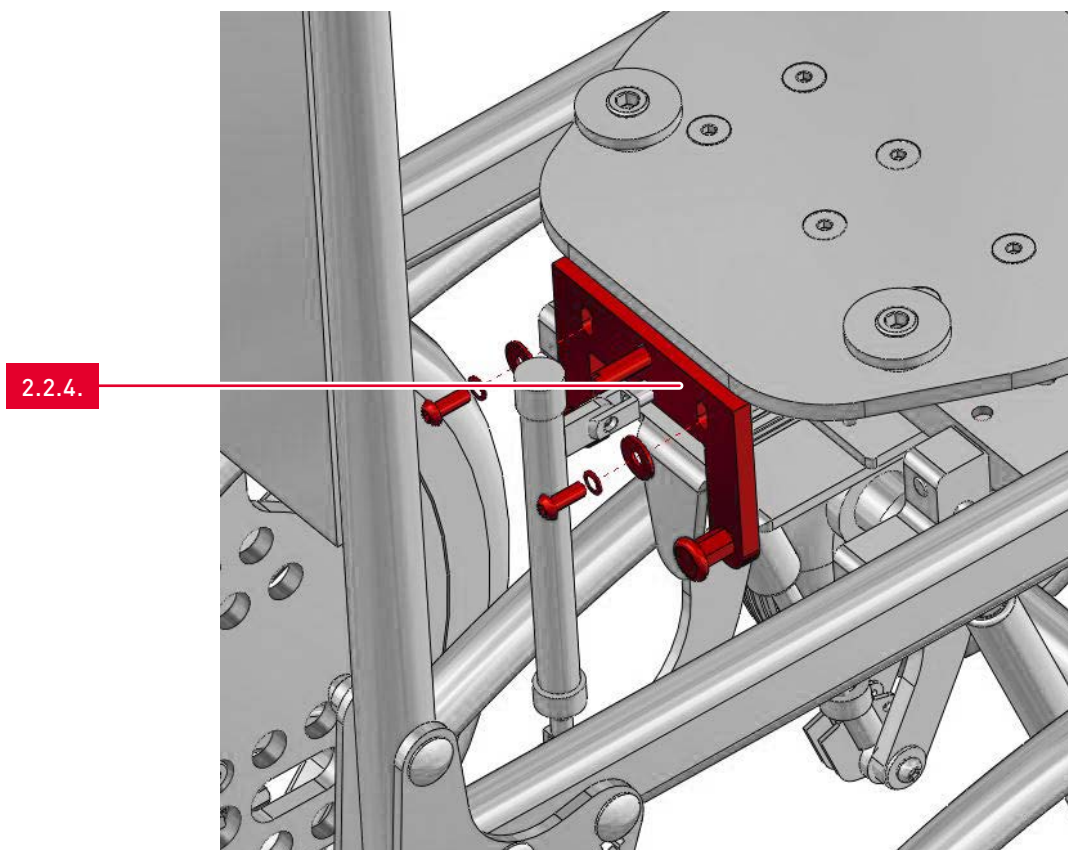

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.2.4.	Rückenarretierungseinheit inkl. Montagematerial/ Back locking unit incl. mounting material	ST	39273

2.2. Oberer Rahmen/Upper frame


2.2.5. Trapezadapteraufnahme/Trapezoidal adapter mount

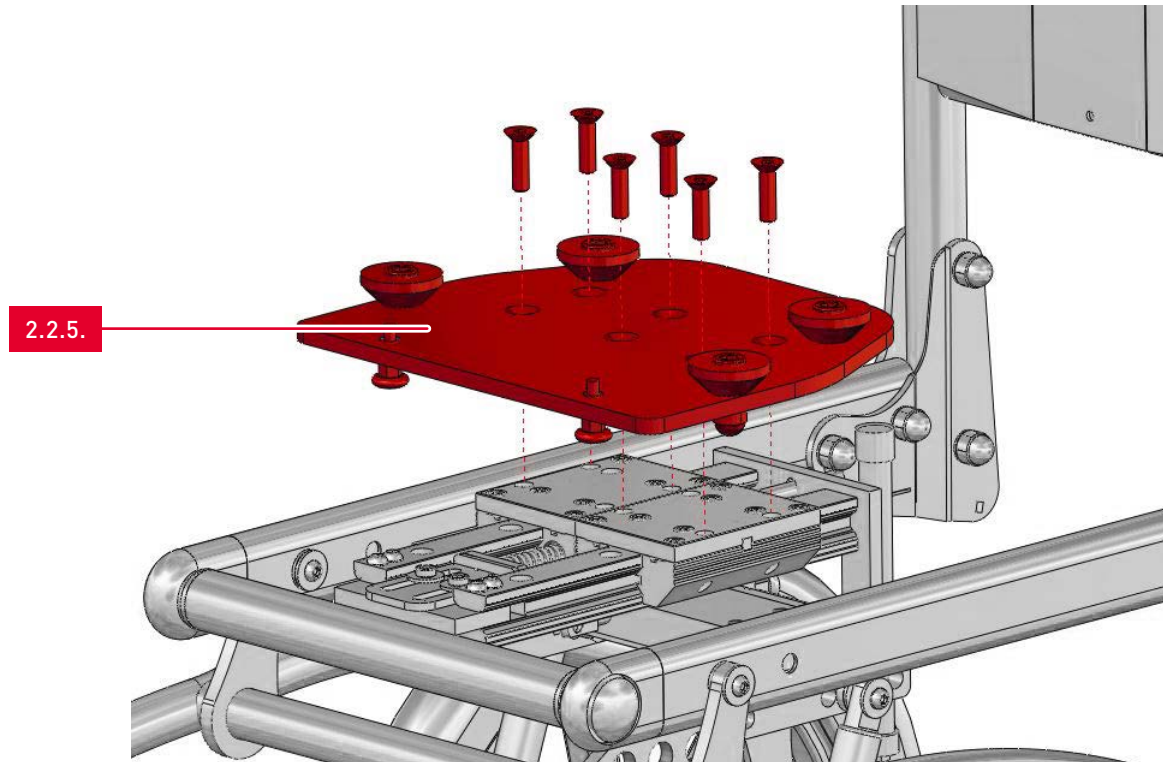

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.2.5.	Trapezadapteraufnahme für SB40/45 inkl. Montagematerial/ Trapezoidal adapter mount for SB40/45 incl. mounting material	ST	40119

2.2. Oberer Rahmen/Upper frame


2.2.6. Linearführung/Linear guide

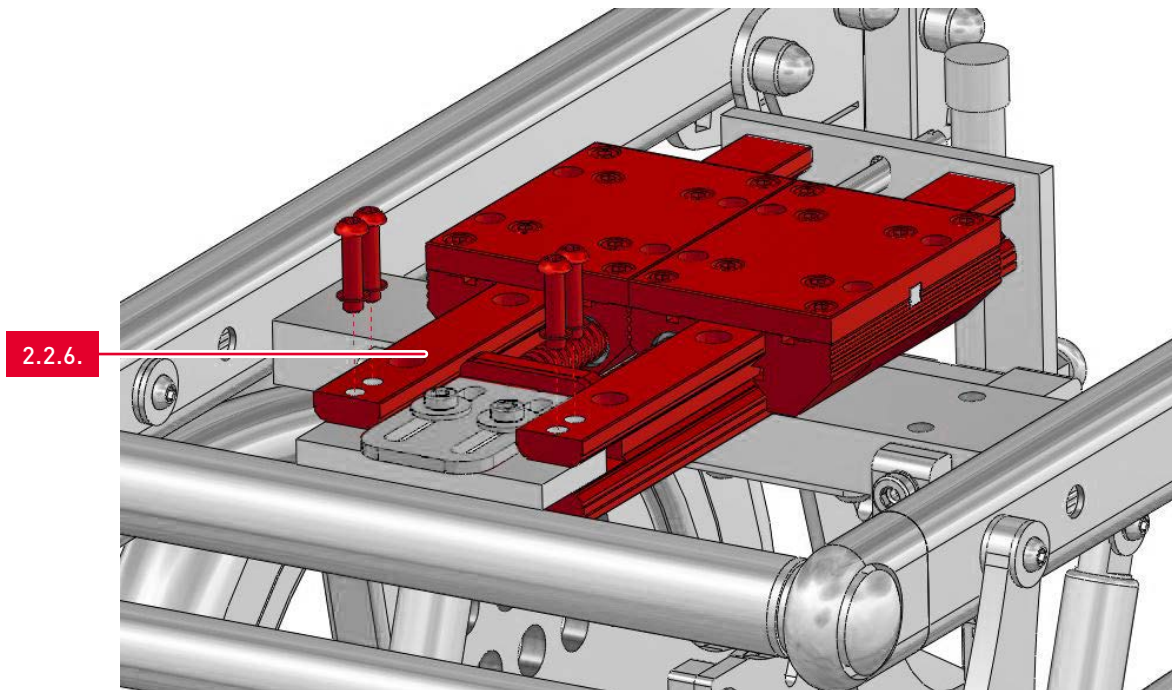

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.2.6.	Linearführung für Becken komplett inkl. Montagematerial/ Linear guide for Pelvis complete incl. mounting material	SA	39215

2.2. Oberer Rahmen/Upper frame


2.2.7. Drehpunkthülse/Pivot sleeve

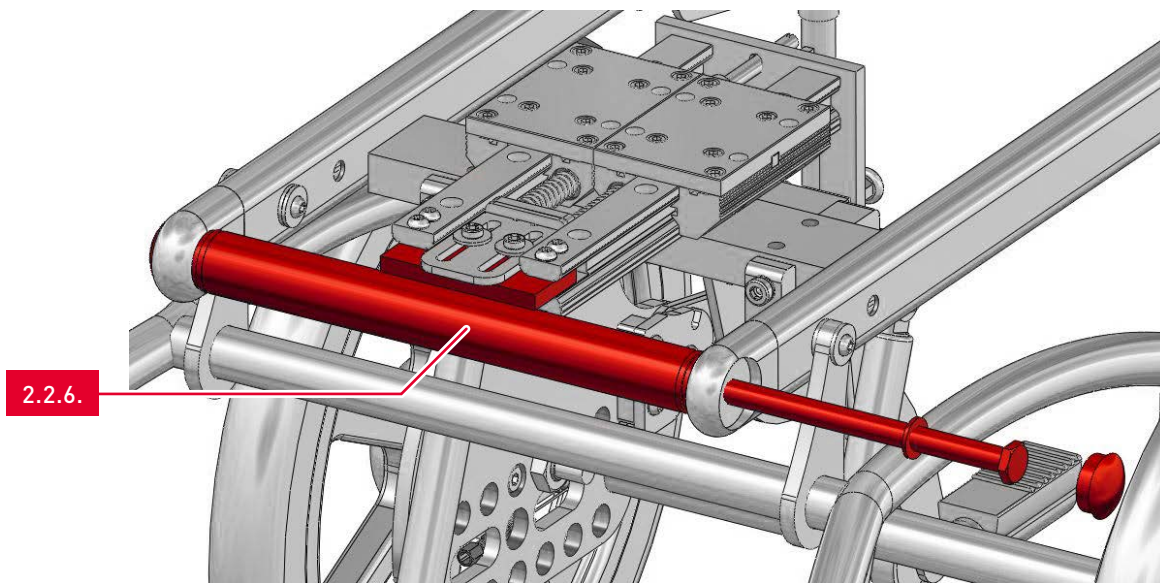

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.2.7.1.	Drehpunkthülse für SB40 inkl. Montagematerial/ Pivot sleeve for SB40 incl. mounting material	ST	39274
2.2.7.2.	Drehpunkthülse für SB45 inkl. Montagematerial/ Pivot sleeve for SB45 incl. mounting material	ST	39274

2.3. Rücken/Back


2.3.1. Schiebegriffwinkelverstellbleche/ Push handle angle adjustment plates

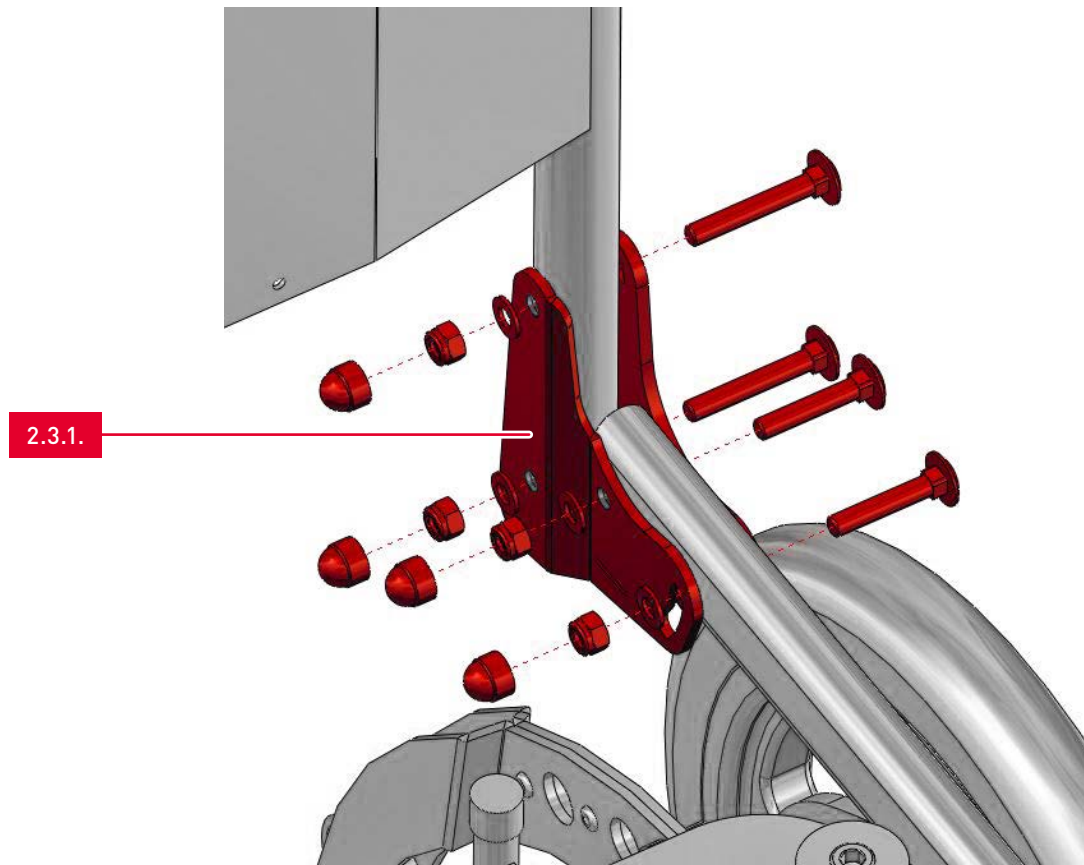

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.3.1.	Schiebegriffwinkelverstellbleche mit Raster inkl. Montagematerial/ Push handle angle adjustment plates with grid incl. mounting material	SA	38237

2.3. Rücken/Back


2.3.2. Rücken/Back

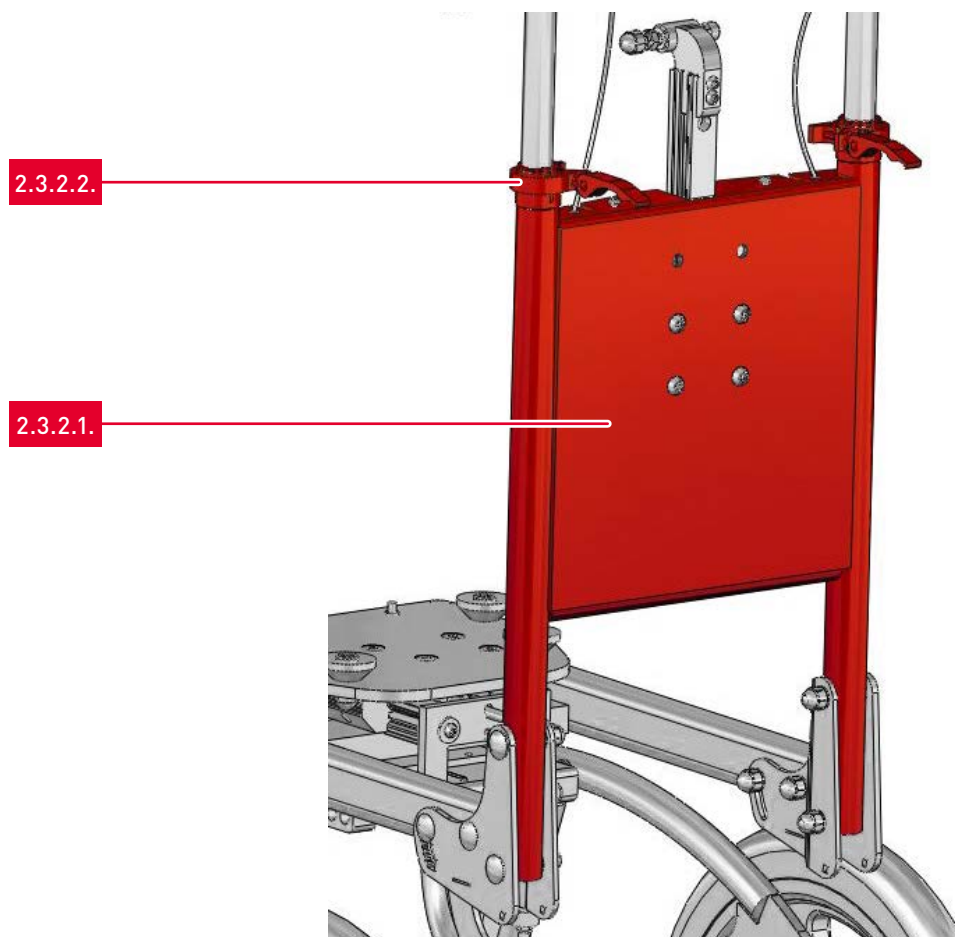

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.3.2.1.	Rücken für SB40/45 (bitte Commission und Farbe angeben)/ Back for SB40/45 (please indicate commission and color)	ST	39220
2.3.2.2.	Sattelstützklemme für Schiebegriff/Pipe clamp for push handle	SA	HW99-2080

2.3. Rücken/Back


2.3.3. Abdeckblech/Cover plate

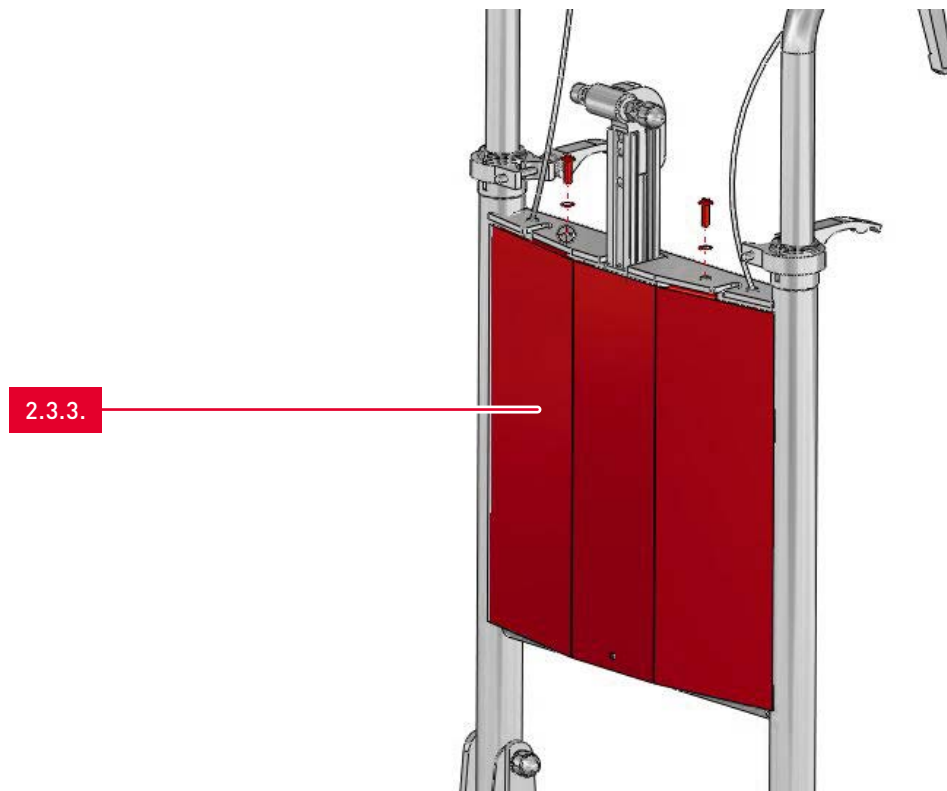

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.3.3.1.	Abdeckblech Gr. 1 (Höhe 235mm) inkl. Montagematerial (bitte Farbe angeben)/Cover plate size 1 (height 235mm) incl. mounting material (please indicate color)	ST	39275
2.3.3.2.	Abdeckblech Gr. 2 (Höhe 275mm) inkl. Montagematerial (bitte Farbe angeben)/Cover plate size 2 (height 275mm) incl. mounting material (please indicate color)	ST	39276

2.3. Rücken/Back


2.3.4. Linearführung/Linear guide

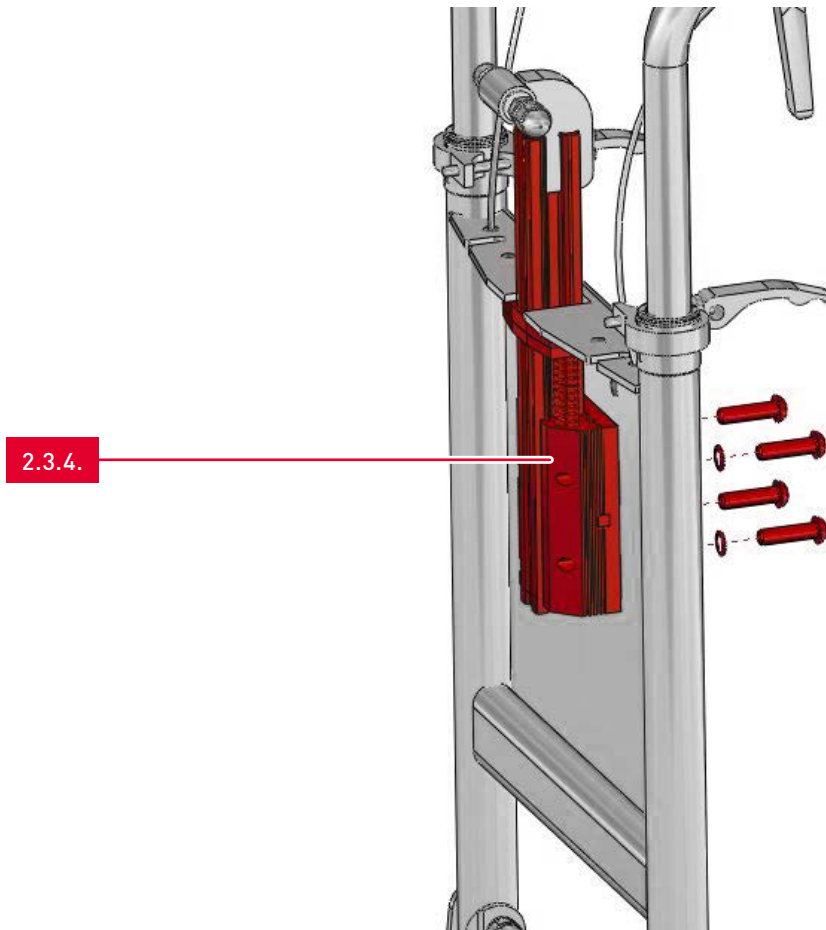

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.3.4.	Linearführung für Rücken komplett inkl. Montagematerial/ Linear guide for back complete incl. mounting material	SA	39215

2.3. Rücken/Back


2.3.5. Rückengelenkstück/Back joint piece

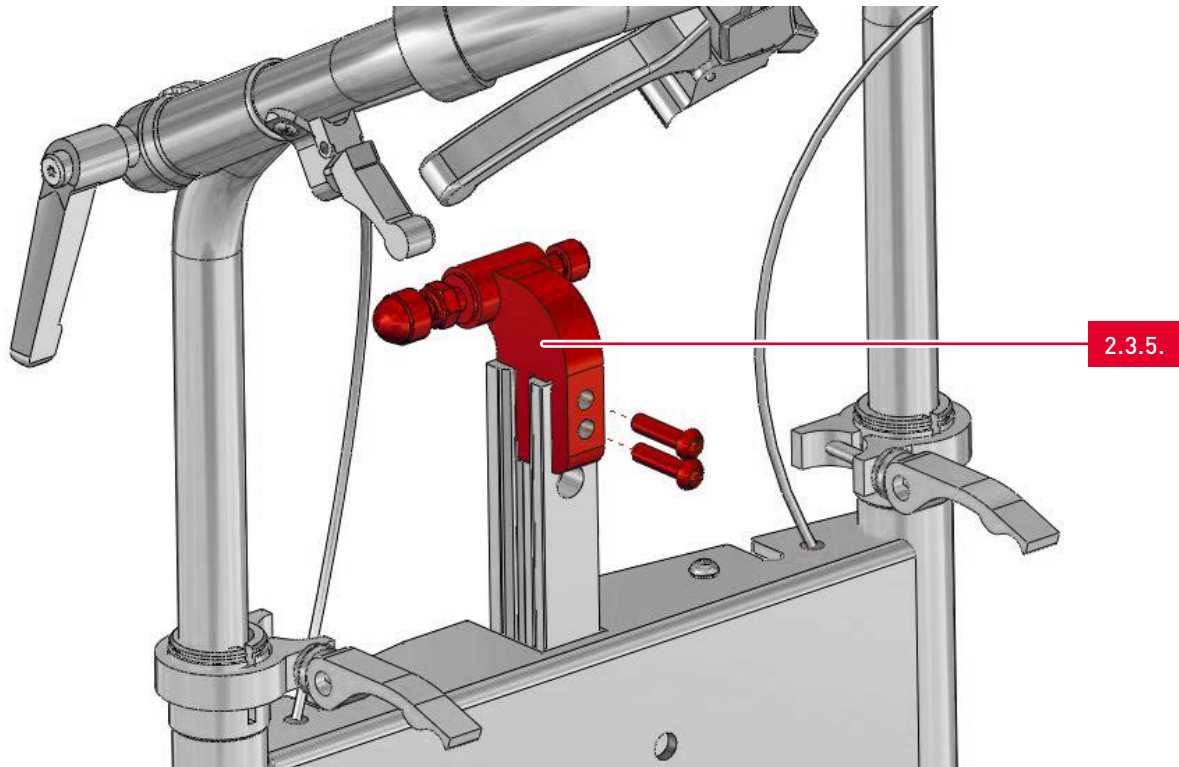

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.3.5.1.	Rückengelenkstück für Kopfstützenaufnahme vierkant inkl. Montagematerial/ Back joint piece for headrest mount square incl. mounting material	ST	39238-V
2.3.5.2.	Rückengelenkstück für Kopfstützenaufnahme ALULINE inkl. Montagematerial/ Back joint piece for headrest mount ALULINE incl. mounting material	ST	39238-A

2.3. Rücken/Back


2.3.6. Schiebegriff/ Push handle

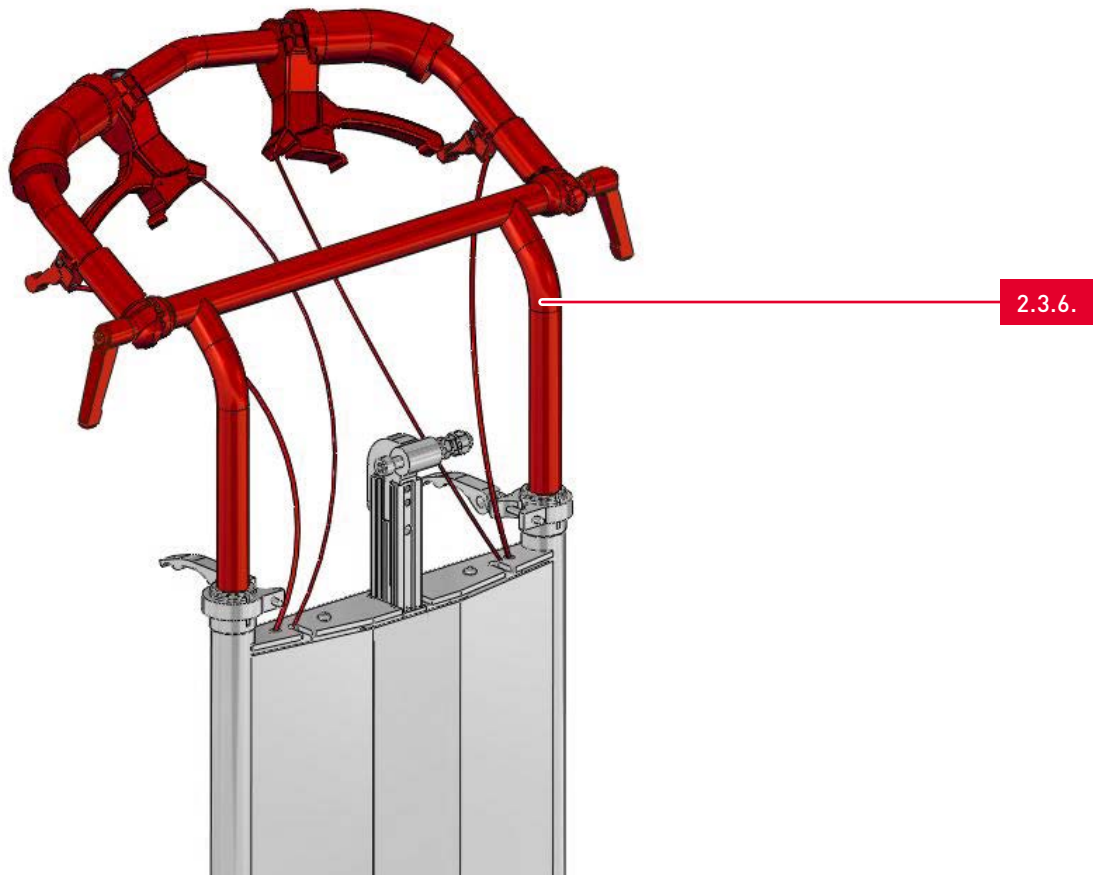

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.3.6.	Schiebegriff für SB 40/45 komplett vormontiert inkl. Bremsgriffe und Moosgummihandgriffe/ Push handle for SB40/45 complete pre-installed incl. brake handles and foam rubber handles	ST	39206


2.3. Rücken/Back

2.3.7. Bowdenzug/Bowden cables

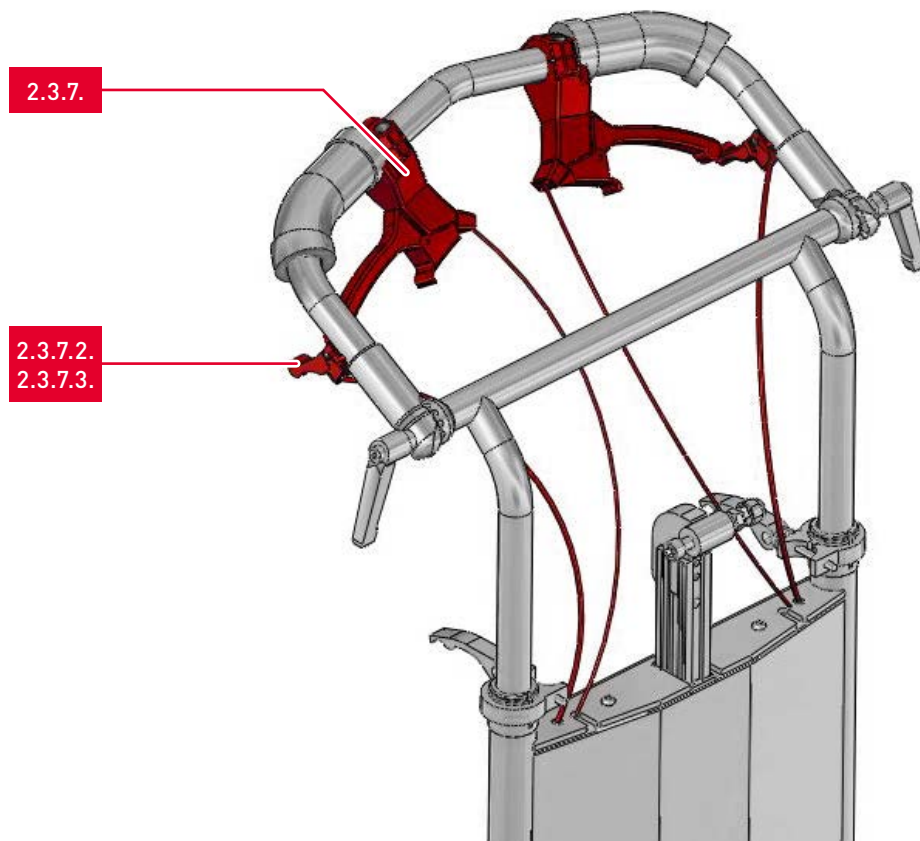

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
2.3.7.1.	Bowdenzug mit Bremsgriff (3 Rasten) für Trommelbremsrad-Bedienung als Komplettinbausatz/ Bowden cable with brake lever for drum brake incl. mounting material	SA	73072
2.3.7.2.	Bowdenzug mit Bedienhebel (kurz) einfach für Gasdruckfederverstellung als Komplettinbausatz/ Bowden cable with lever (short) for gas spring adjustment incl. mounting material	ST	73071-1
2.3.7.3.	Bowdenzug mit Bedienhebel (lang) einfach für Gasdruckfederverstellung als Komplettinbausatz/ Bowden cable with lever (long) for gas spring adjustment incl. mounting material	ST	73071-1_L


3. Übersicht Untergestell ROOMY NE/ Overview undercarriage ROOMY NE

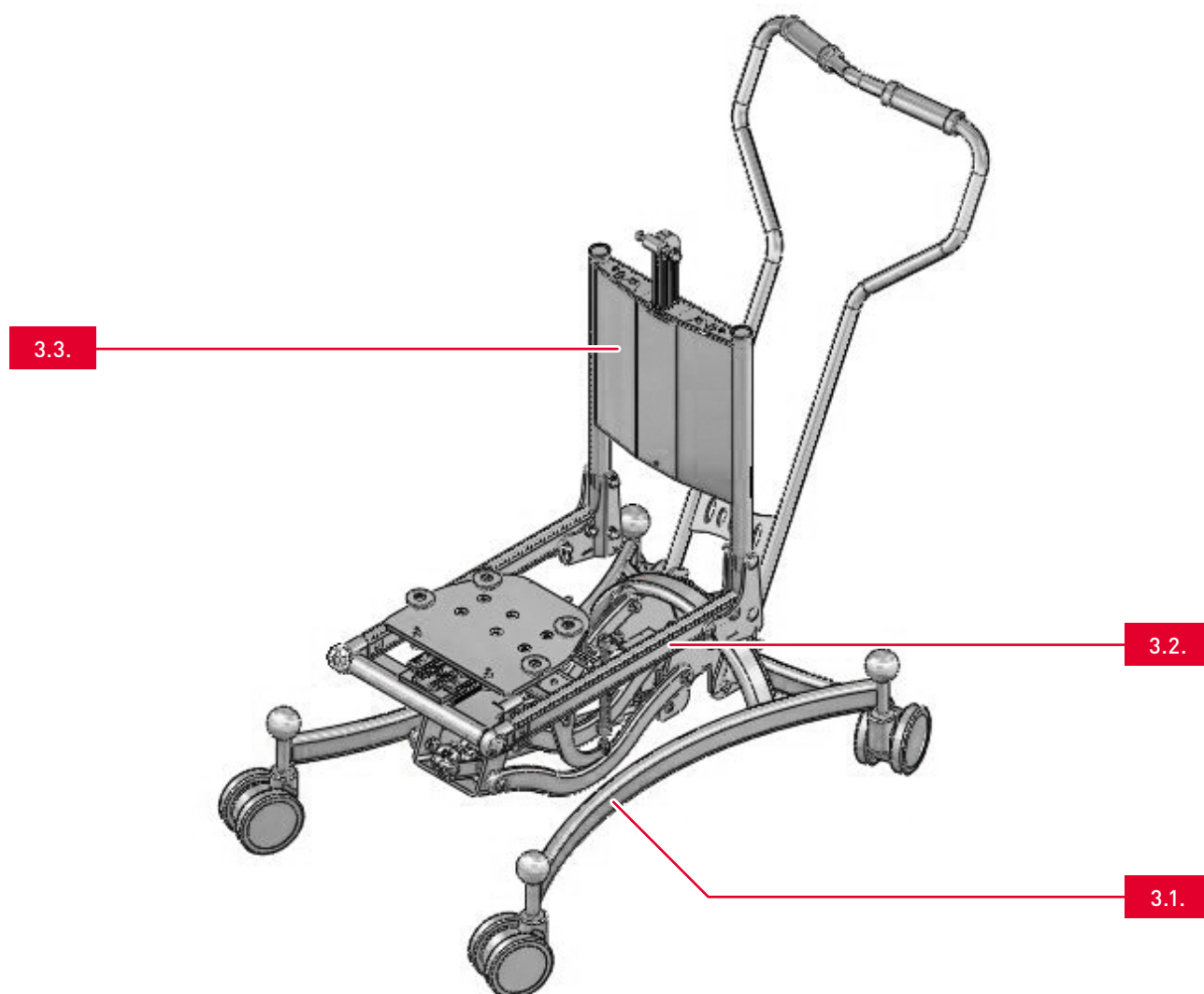

Nr./No.	Artikel/Article
3.1.	Unterer Rahmen/Lower frame
3.2.	Oberer Rahmen/Upper frame
3.3.	Rücken/Back

3.1. Unterer Rahmen/Lower frame


3.1.1. Unterer Rahmen/Lower frame

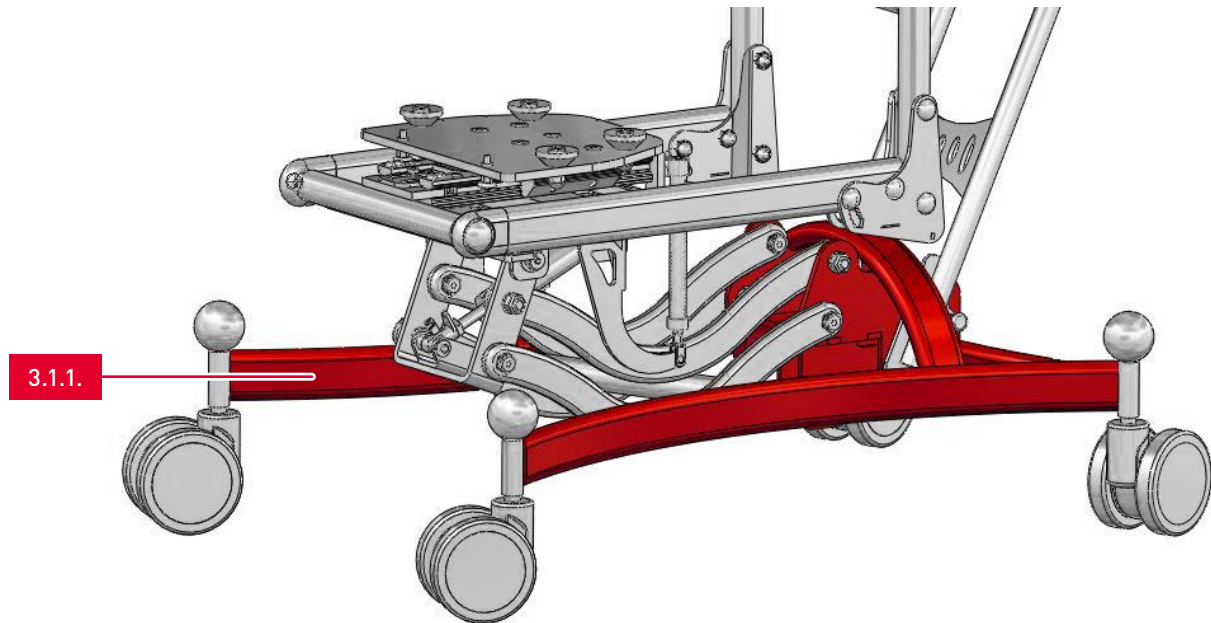

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.1.1.1.	Unterer Rahmen kurze Version (bitte Farbe angeben)/ Lower frame short version (please indicate color)	ST	49801-E
3.1.1.2.	Unterer Rahmen lange Version (bitte Farbe angeben)/ Lower frame long version (please indicate color)	ST	49801-E

3.1. Unterer Rahmen/Lower frame

3.1.2. Doppelrollen/Leading pulley

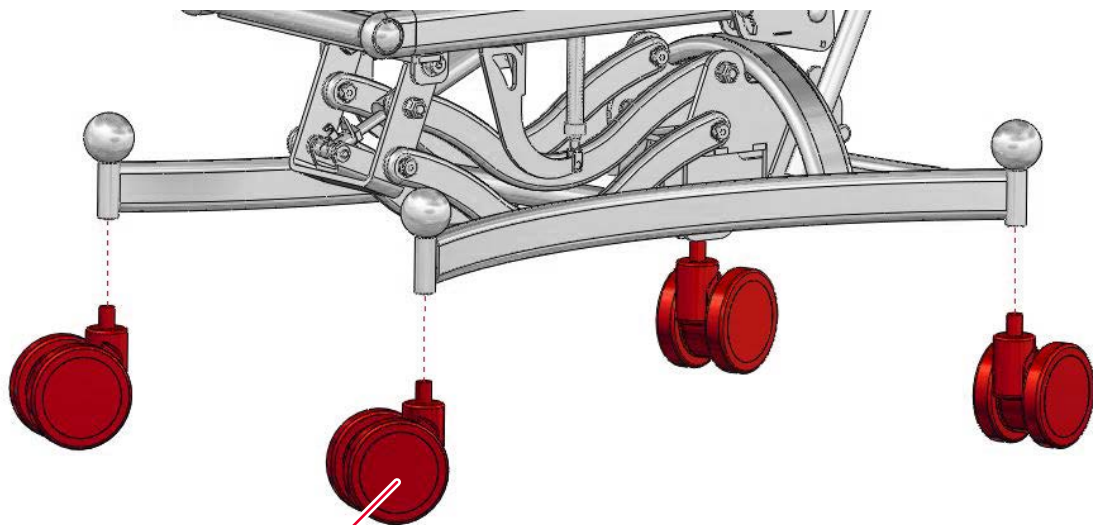


3.1.2.

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.1.2.1.	Bremsbare 100 mm Doppellenkrollen/ 100 mm leading pulley with breaks	SA	49831-100-E
3.1.2.2.	Bremsbare 125 mm Doppellenkrollen/ 125 mm leading pulley with brakes	SA	49831-125-E

3.1. Unterer Rahmen/Lower frame


3.1.3. Kugel-Puffer/Ball-buffer

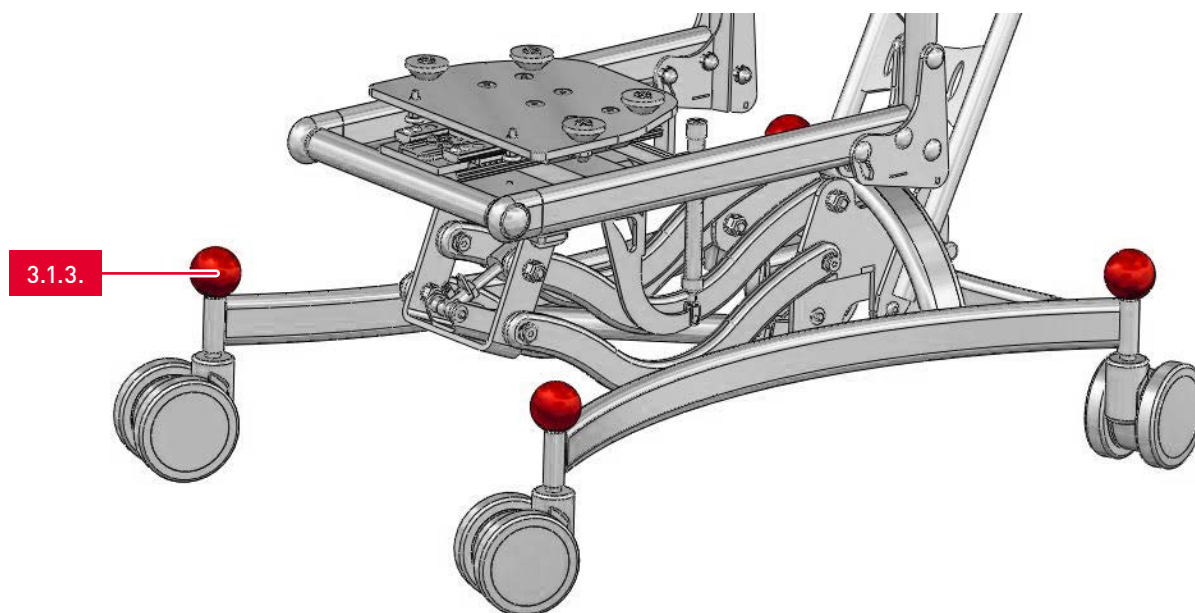

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.1.3.	Kugel-Puffer mit Gewinde/Ball-buffer with screw thread	SA	49830-E

3.1. Unterer Rahmen/Lower frame


3.1.4. Schwenkarme/Swinging arms

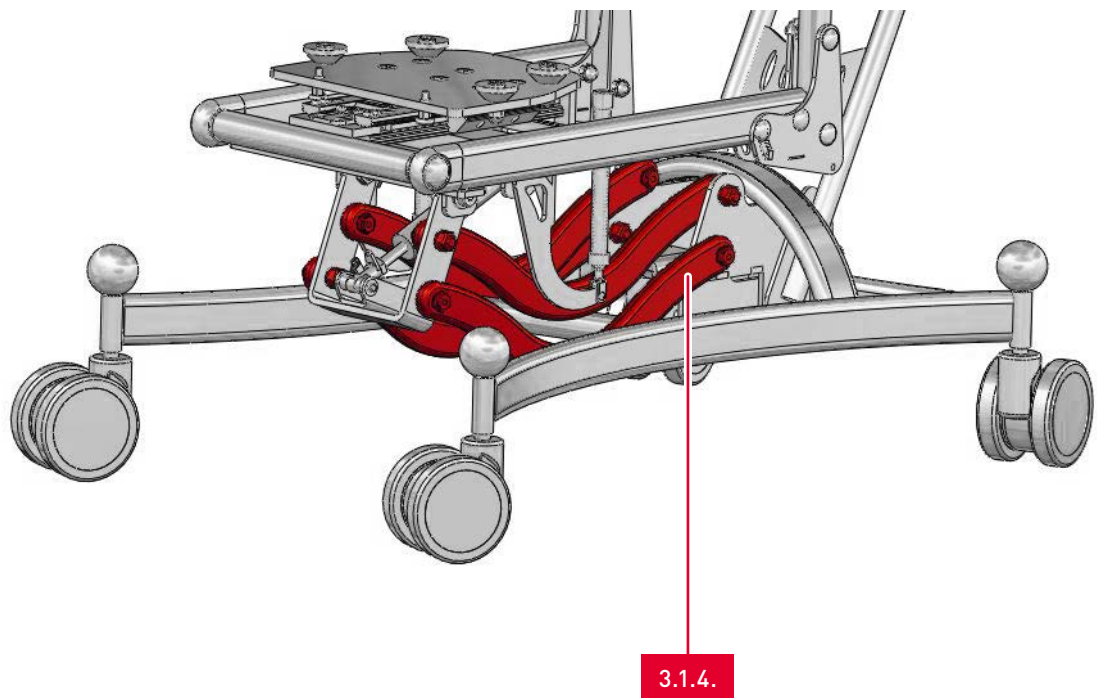

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.1.4.	Schwenkarme inkl. Montagematerial/ Swinging arms incl. mounting material	SA	49803-E

3.1. Unterer Rahmen/Lower frame


3.1.5. Gasdruckfedern/Gas pressure spring

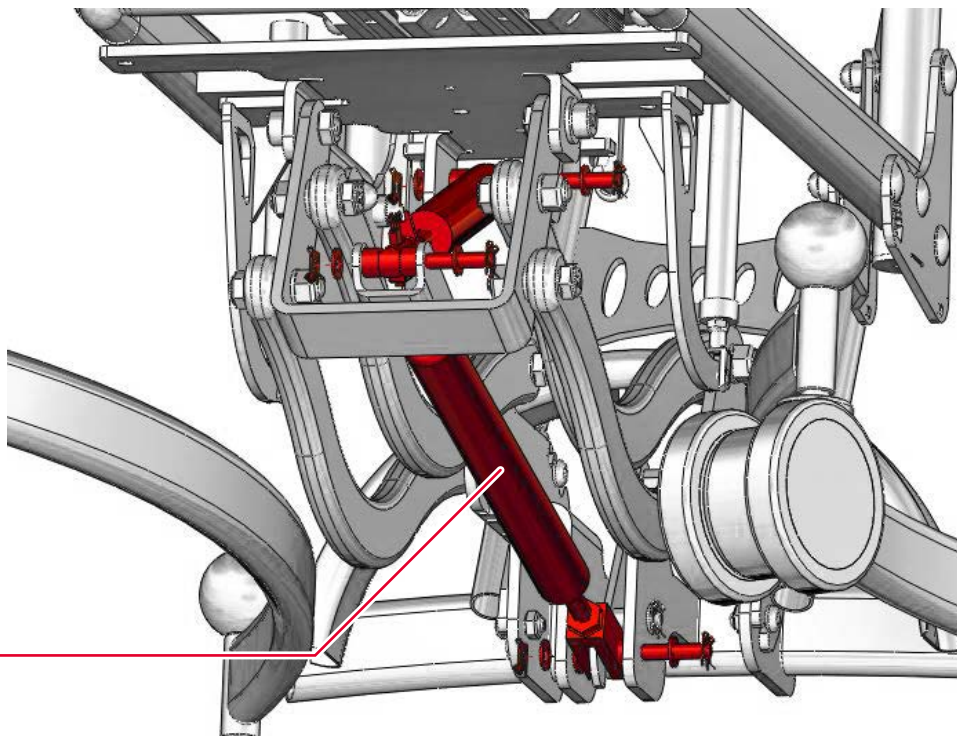

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.1.5.1.	Gasdruckfeder 1200N zur Höhenverstellung inkl. Montagematerial/ Gas pressure spring 1200N for height adjustment incl. mounting material	ST	49511-E
3.1.5.2.	Gasdruckfeder 500N zur Sitzkantelung inkl. Montagematerial/ Gas pressure spring 500N for seat tilting incl. mounting material	ST	49818-E

3.1. Unterer Rahmen/Lower frame


3.1.6. Auslösehebel mit Fußpedal/Release lever with foot pedal

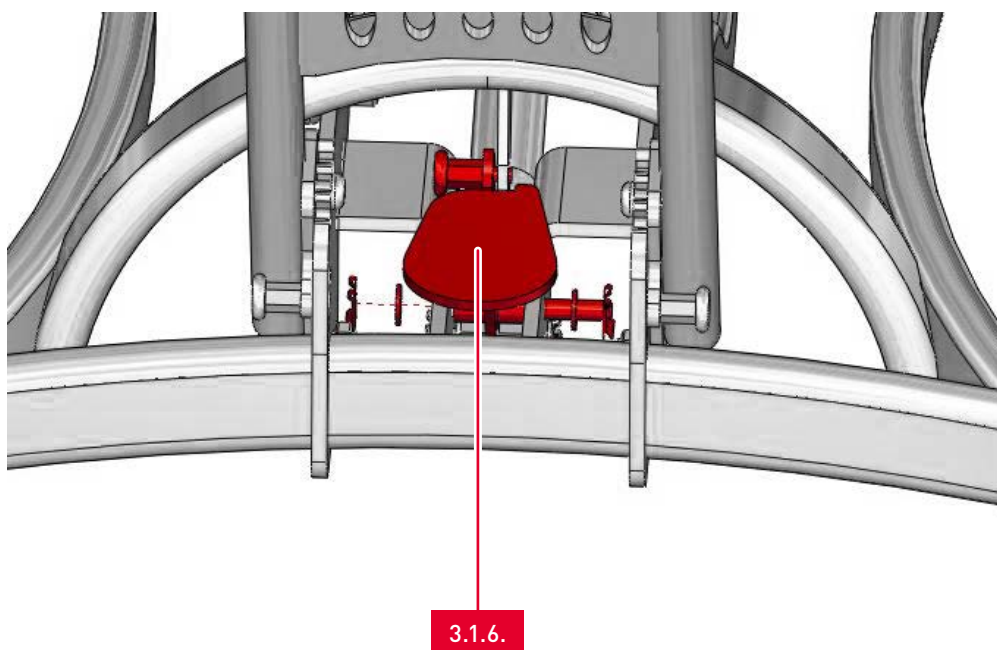

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.1.6.	Auslösehebel mit Fußpedal zur Höhenverstellung inkl. Montagematerial/ Release lever with foot pedal for height adjustment incl. mounting material	ST	49815-E

3.1. Unterer Rahmen/Lower frame


3.1.7. Adapterplatte

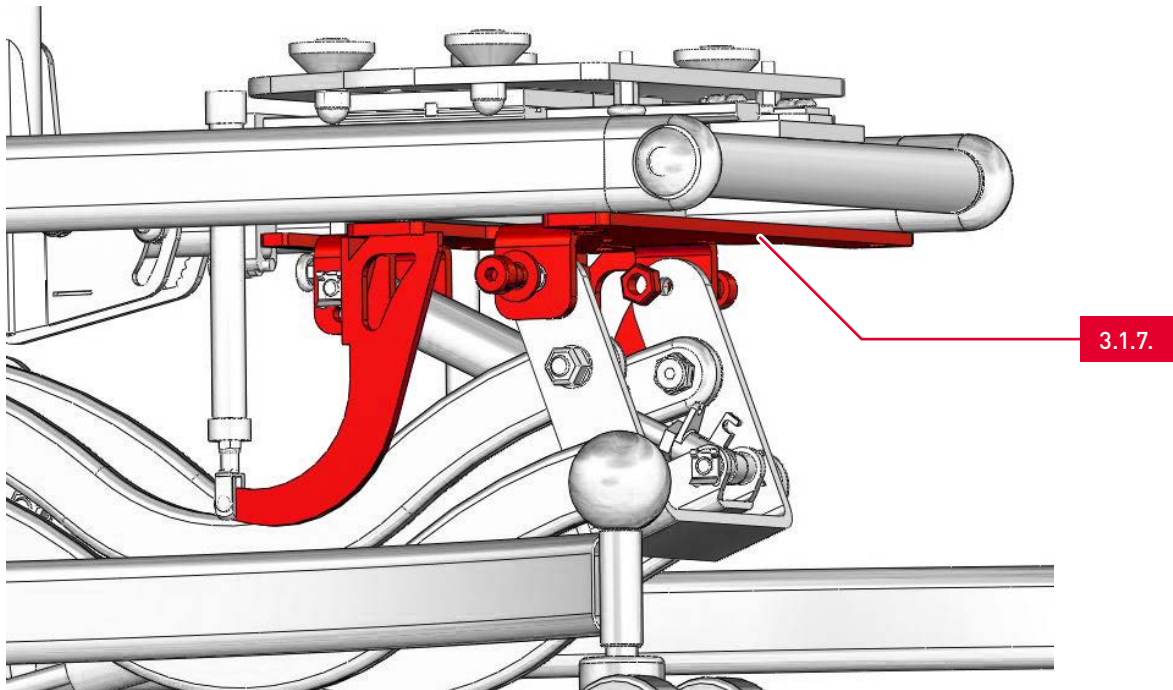

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.1.7.	Adapterplatte mit Aufnahme für Beckenrückzugseinheiten für ROOMY NE inkl. Montagematerial/ Adapter plate with holder for dynamic fixation for ROOMY NE incl. mounting material	ST	39015-ROOMY

3.2. Oberer Rahmen/Upper frame


3.2.1. Oberer Rahmen/Upper frame

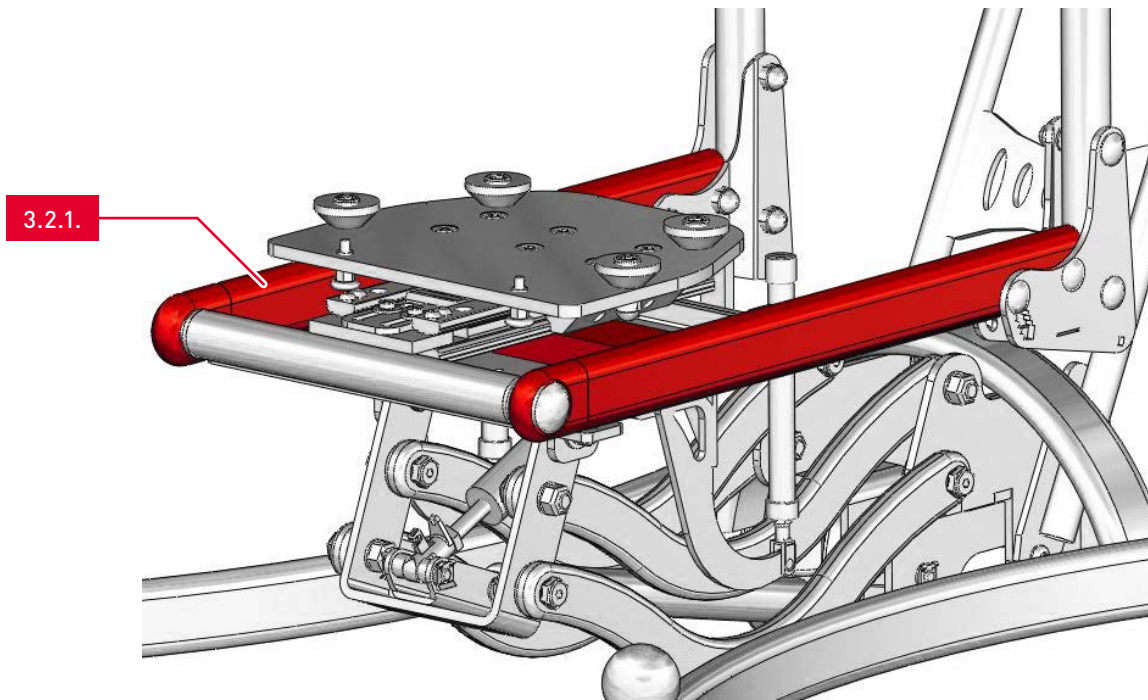

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.2.1.	Oberer Rahmen inkl. Montagematerial (bitte Commission und Farbe angeben)/ Upper frame incl. mounting material (please indicate commission and color)	ST	39245

3.2. Oberer Rahmen/Upper frame


3.2.2. Beckenrückzugseinheit/Pelvis retraction unit

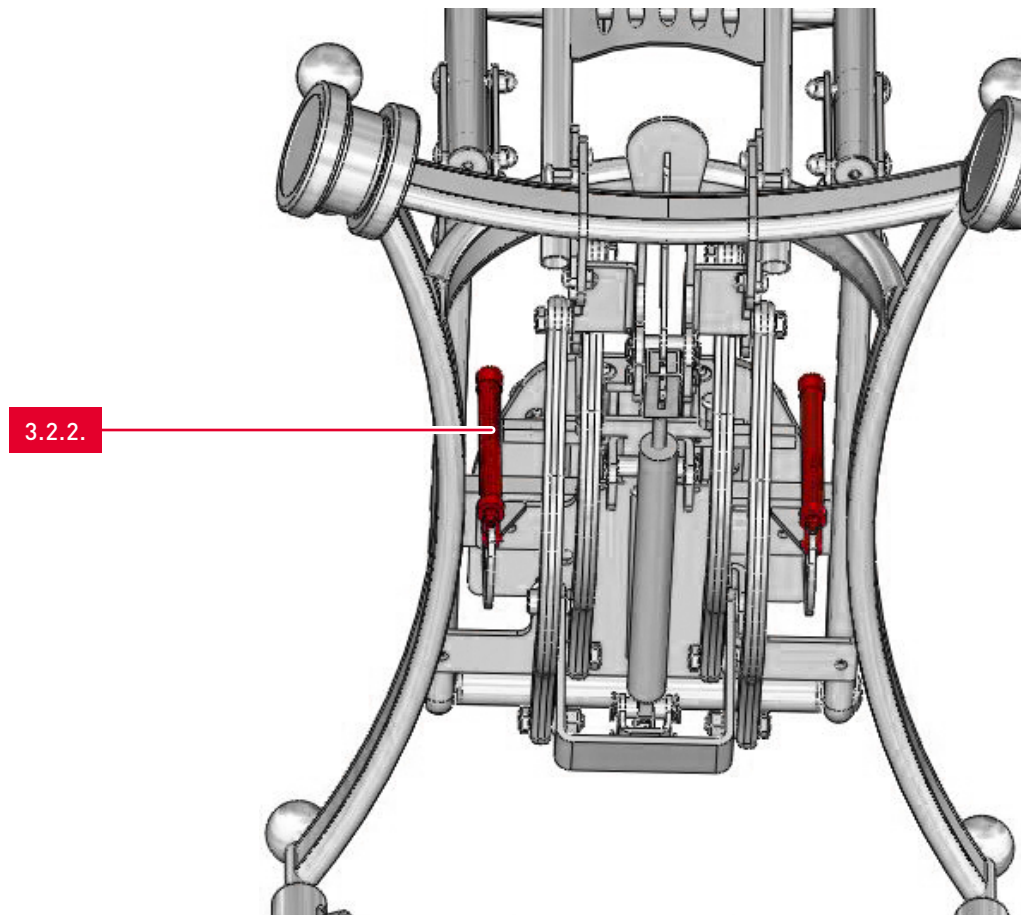

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.2.2.1.	Beckenrückzugseinheit Standard inkl. Montagematerial/ Pelvis retraction unit standard incl. mounting material	ST	39016-ROOMY
3.2.2.2.	Beckenrückzugseinheit für maximalen Hüftöffnungswinkel inkl. Montagematerial/ Pelvis retraction unit for maximum hip opening angle incl. mounting material	ST	39016-MAX-ROOMY

3.2. Oberer Rahmen/Upper frame


3.2.3. Rückenarretierungseinheit/Back locking unit

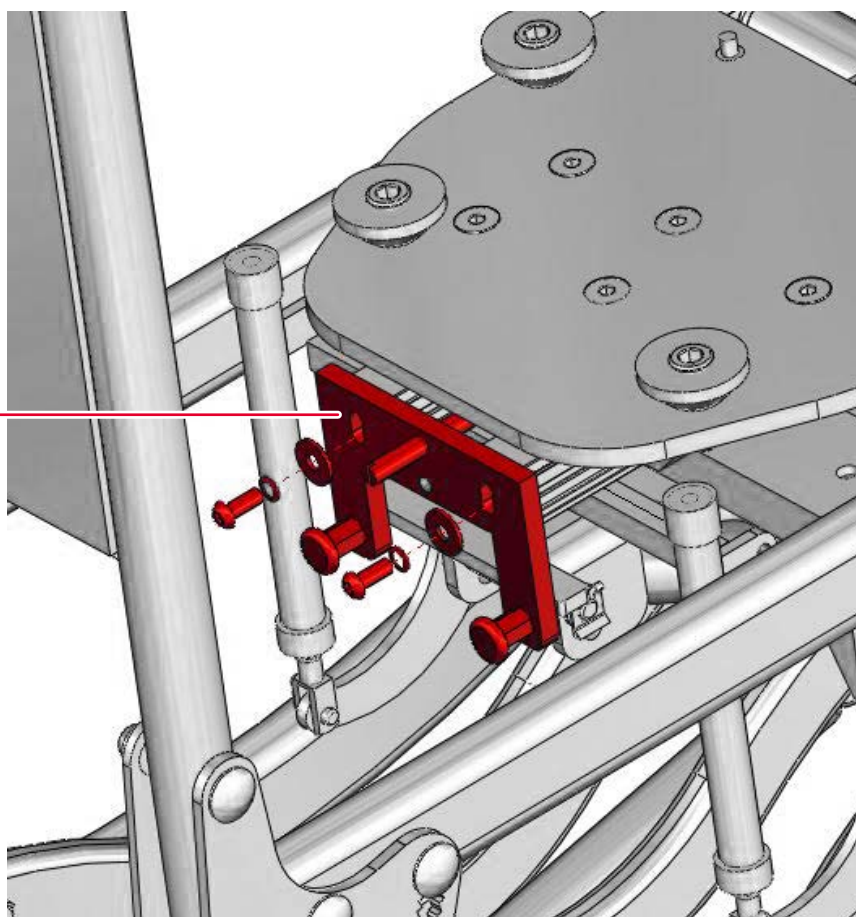

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.2.3.	Rückenarretierungseinheit inkl. Montagematerial/ Back locking unit incl. mounting material	ST	39273-ROOMY

3.2. Oberer Rahmen/Upper frame


3.2.4. Trapezadapteraufnahme/Trapezoidal adapter mount

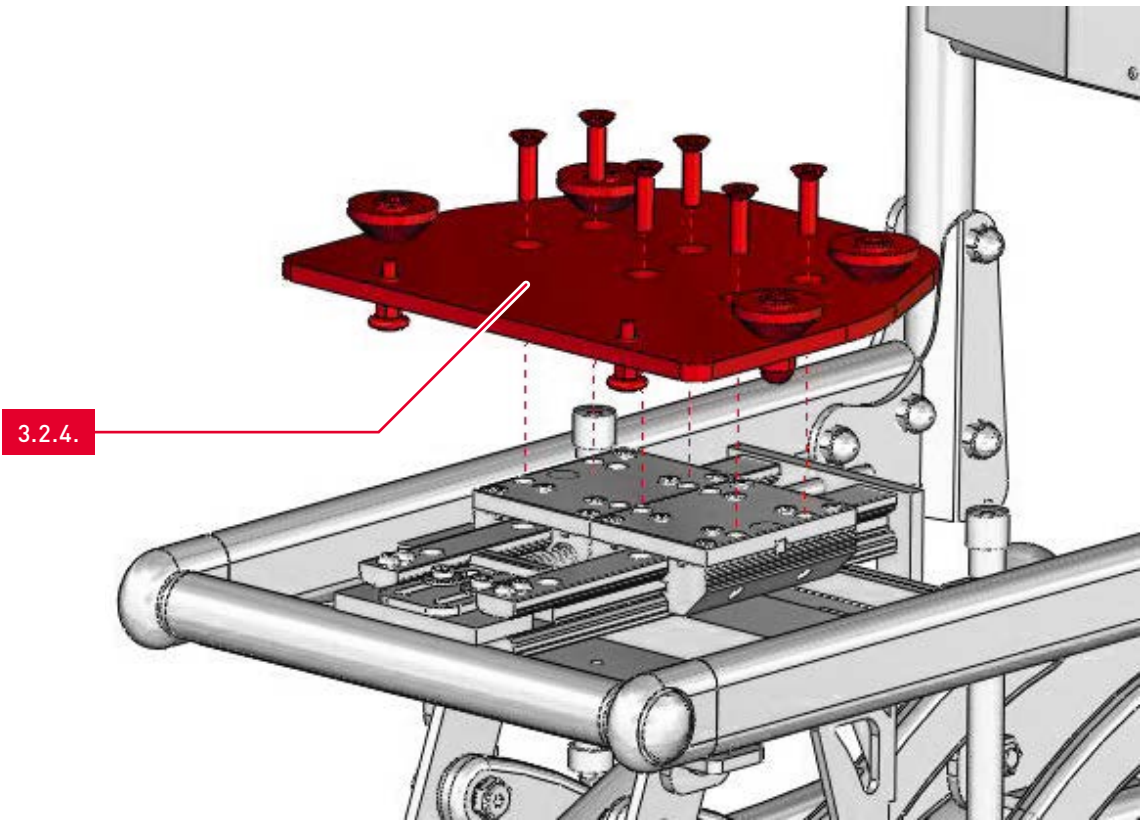

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.2.4.	Trapezadapteraufnahme inkl. Montagematerial/ Trapezoidal adapter mount incl. mounting material	ST	40118

3.2. Oberer Rahmen/Upper frame


3.2.5. Linearführung/Linear guide

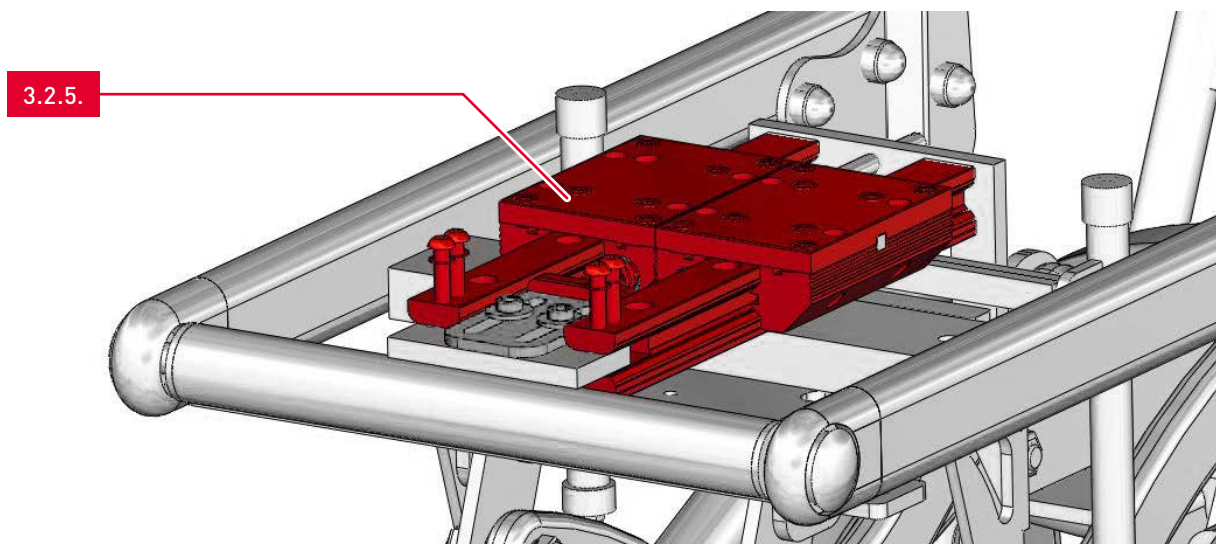

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.2.5.	Linearführung für Becken komplett inkl. Montagematerial/ Linear guide for pelvis complete incl. mounting material	SA	39215-R00MY

3.2. Oberer Rahmen/Upper frame


3.2.6. Drehpunkthülse/Pivot sleeve

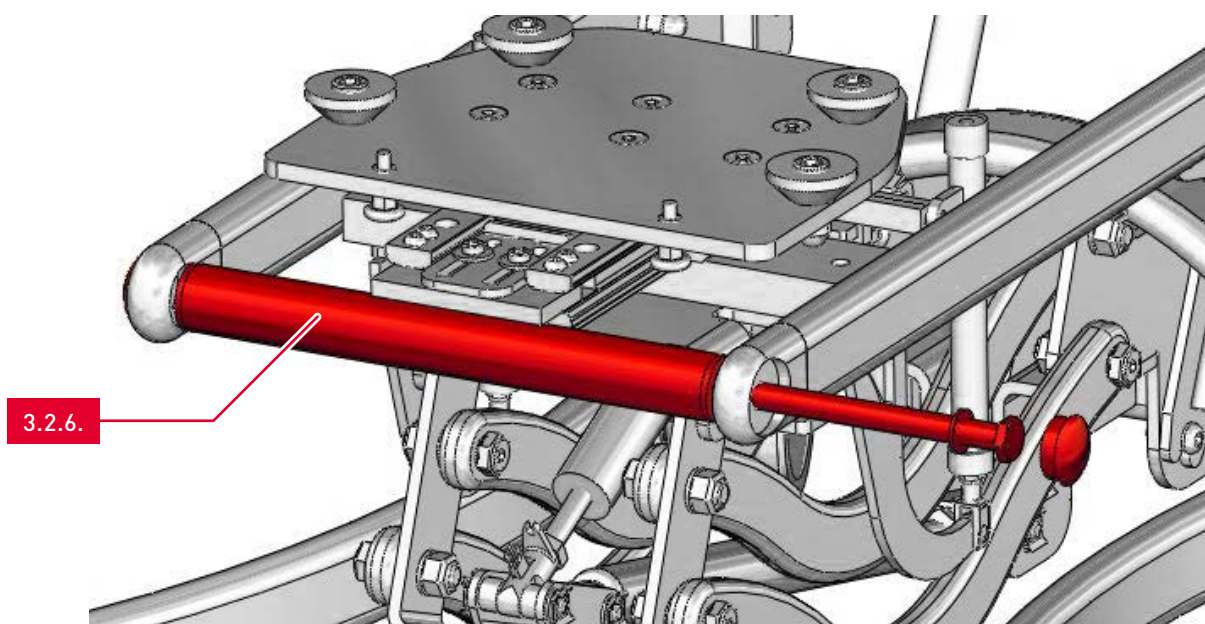

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.2.6.	Drehpunkthülse inkl. Montagematerial/ Pivot sleeve incl. mounting material	ST	39274-R00MY

3.3. Rücken/Back


3.3.1. Schiebegriffwinkelverstellbleche/ Push handle angle adjustment plates

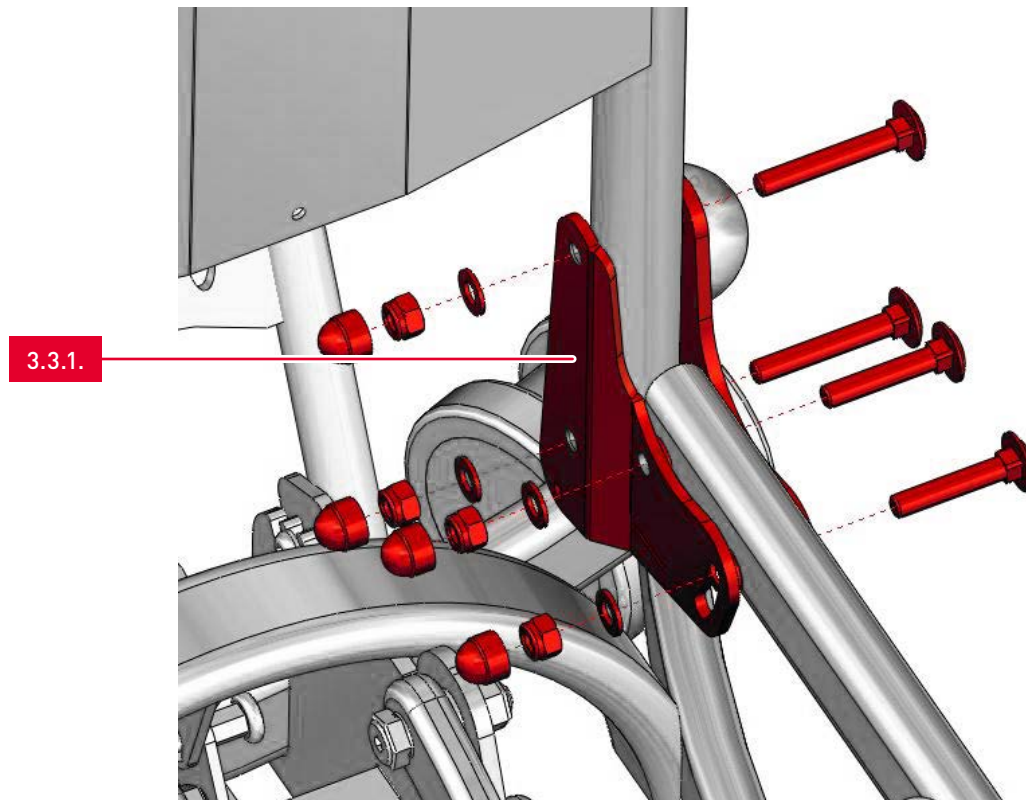

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.3.1.	Schiebegriffwinkelverstellbleche mit Raster inkl. Montagematerial/ Push handle angle adjustment plates with grid incl. mounting material	SA	39237

3.3. Rücken/Back


3.3.2. Rücken/Back

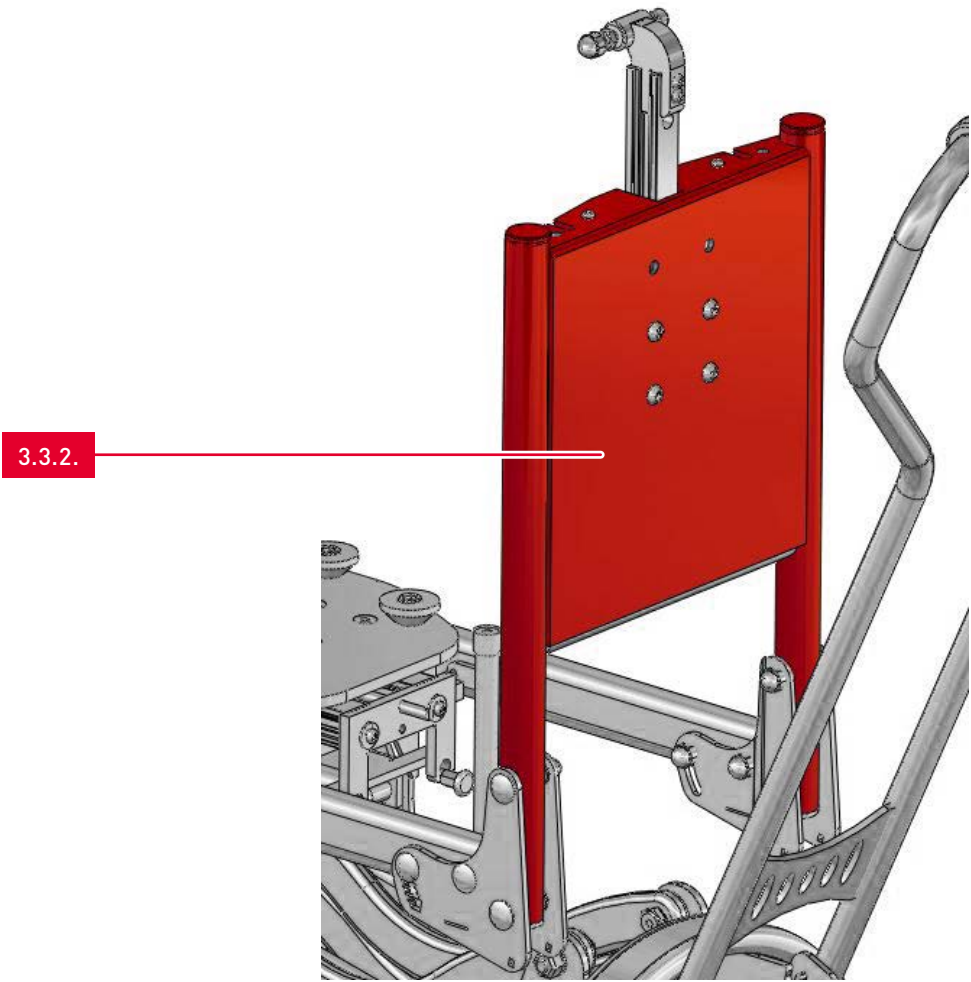

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.3.2.	Rücken (bitte Commission und Farbe angeben)/ Back (please indicate commission and color)	ST	39220

3.3. Rücken/Back


3.3.3. Abdeckblech/Cover plate

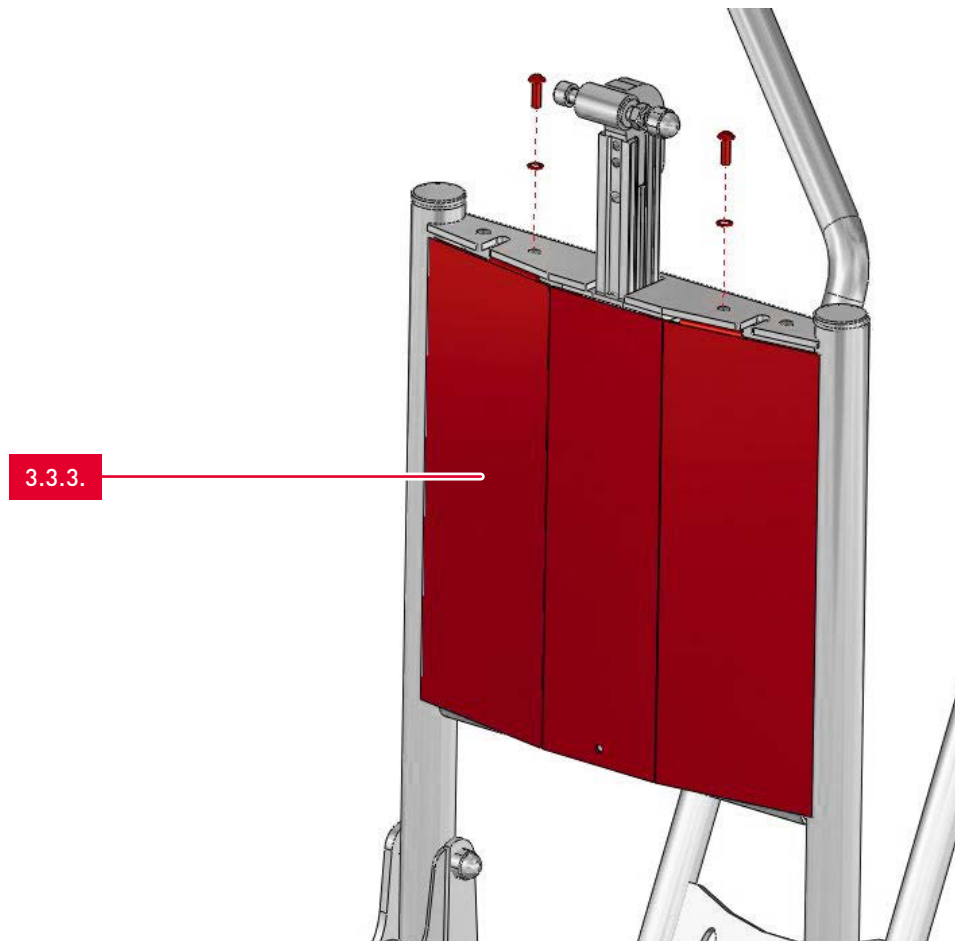

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.3.3.1.	Abdeckblech Gr. 1 (Höhe 235 mm) inkl. Montagematerial (bitte Farbe angeben)/ Cover plate size 1 (height 235 mm) incl. mounting material (please indicate color)	ST	39275
3.3.3.2.	Abdeckblech Gr. 2 (Höhe 275 mm) inkl. Montagematerial (bitte Farbe angeben)/ Cover plate size 2 (height 275 mm) incl. mounting material (please indicate color)	ST	39276

3.3. Rücken/Back


3.3.4. Linearführung/Linear guide

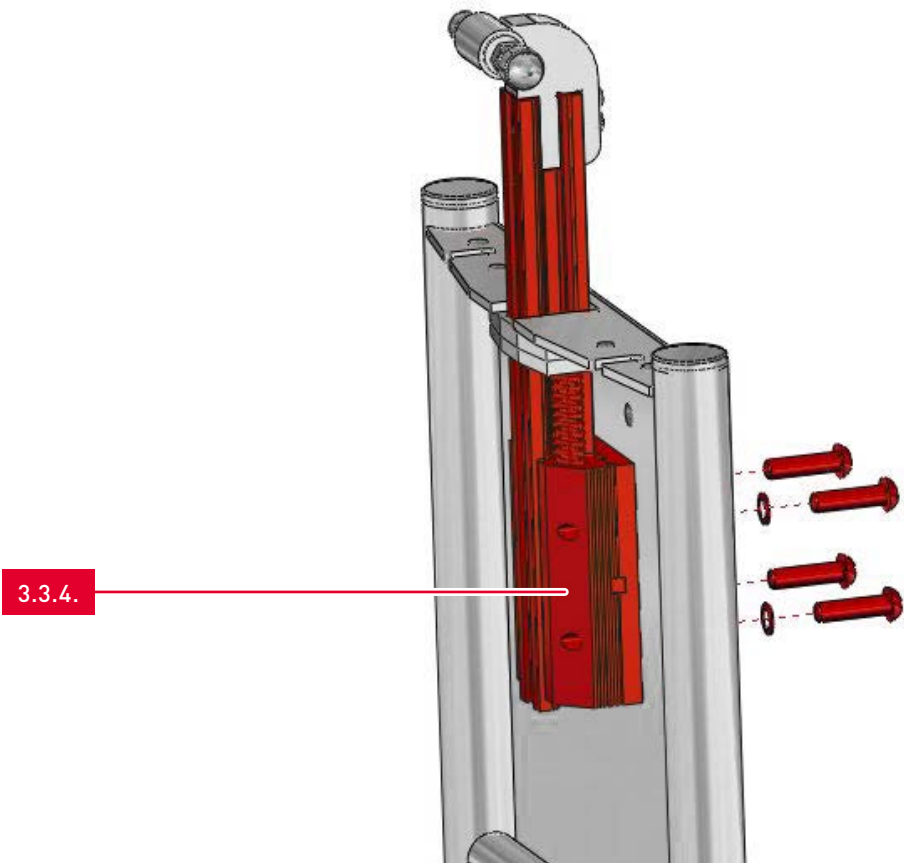

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.3.4.	Linearführung für Rücken komplett inkl. Montagematerial/ Linear guide back complete incl. mounting material	SA	39215

3.3. Rücken/Back


3.3.5. Rückengelenkstück/Back joint piece

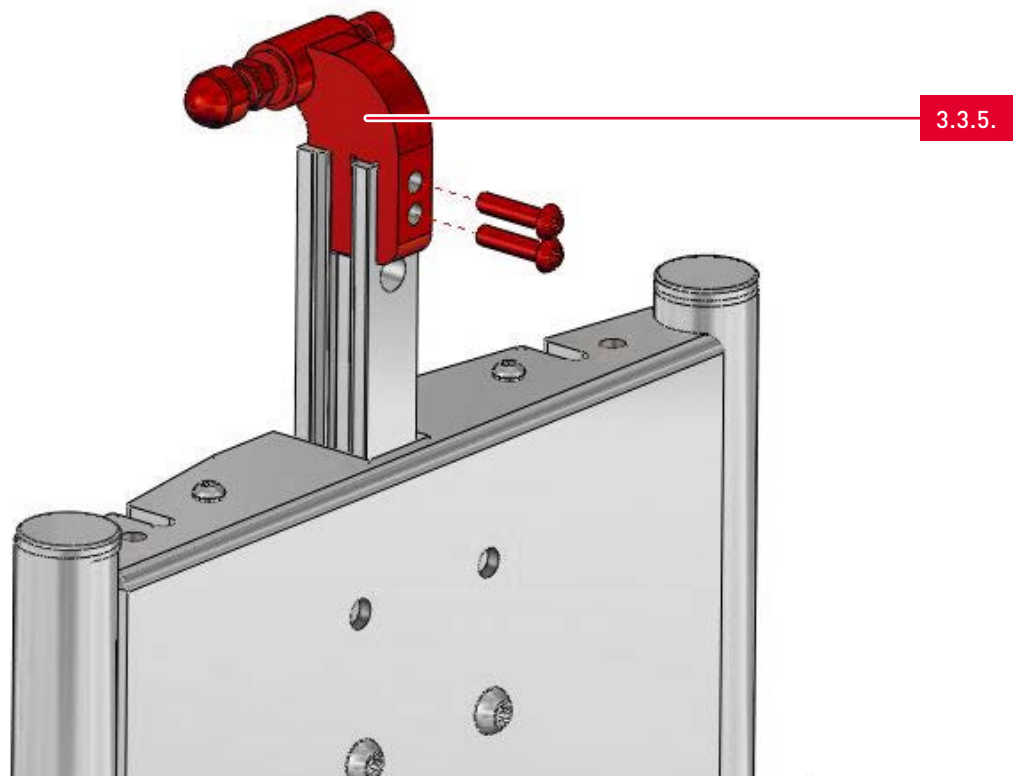

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.3.5.1.	Rückengelenkstück für Kopfstützenaufnahme vierkant inkl. Montagematerial/ Back joint piece for headrest mount square incl. mounting material	ST	39238-V
3.3.5.2.	Rückengelenkstück für Kopfstützenaufnahme ALULINE inkl. Montagematerial/ Back joint piece for headrest mount ALULINE incl. mounting material	ST	39238-A


3.3. Rücken/Back

3.3.6. Schiebegriff/ Push handle

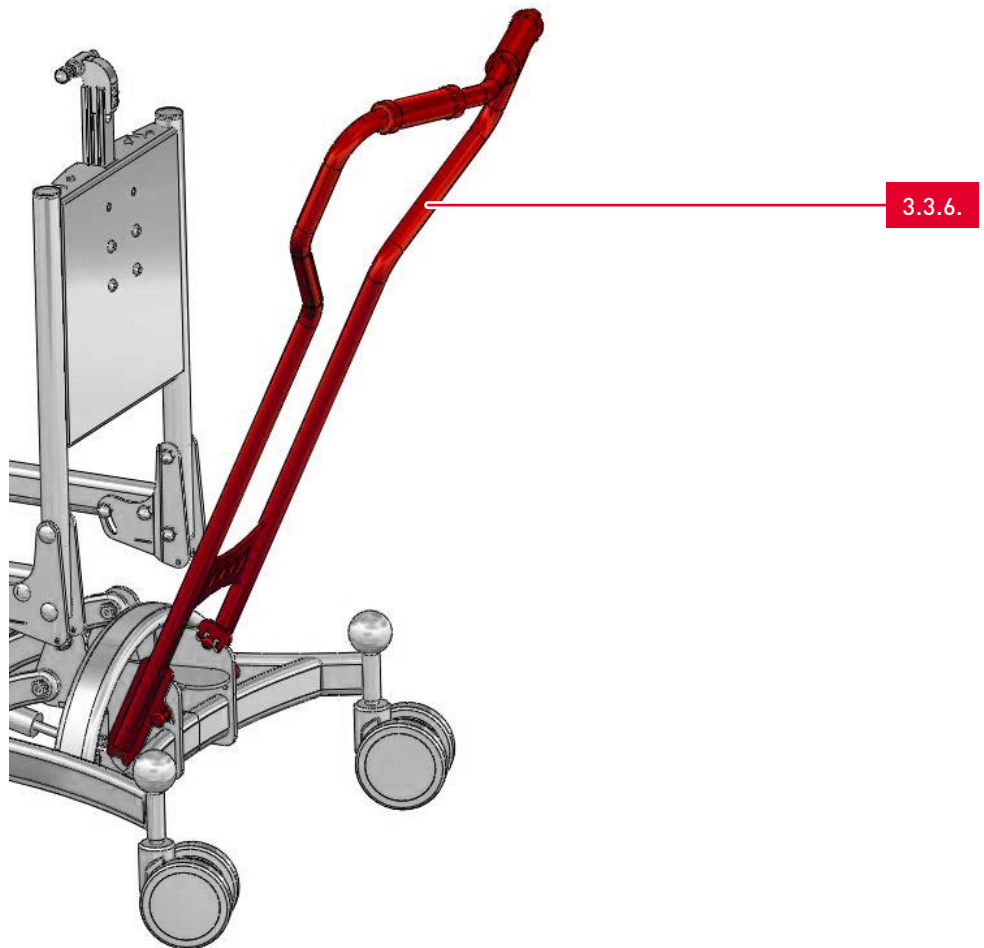

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
3.3.6.1.	Abnehmbarer Schiebegriff in langer Ausführung inkl. Montagematerial/ Removable push bar in long version incl. mounting material	ST	49500
3.3.6.2.	Abnehmbarer Schiebegriff mit Winkelverstellmöglichkeit inkl. Montagematerial/ Removable push bar with angular adjustment incl. mounting material	ST	49500-W


4. Übersicht Sitzschale / Overview seat shell

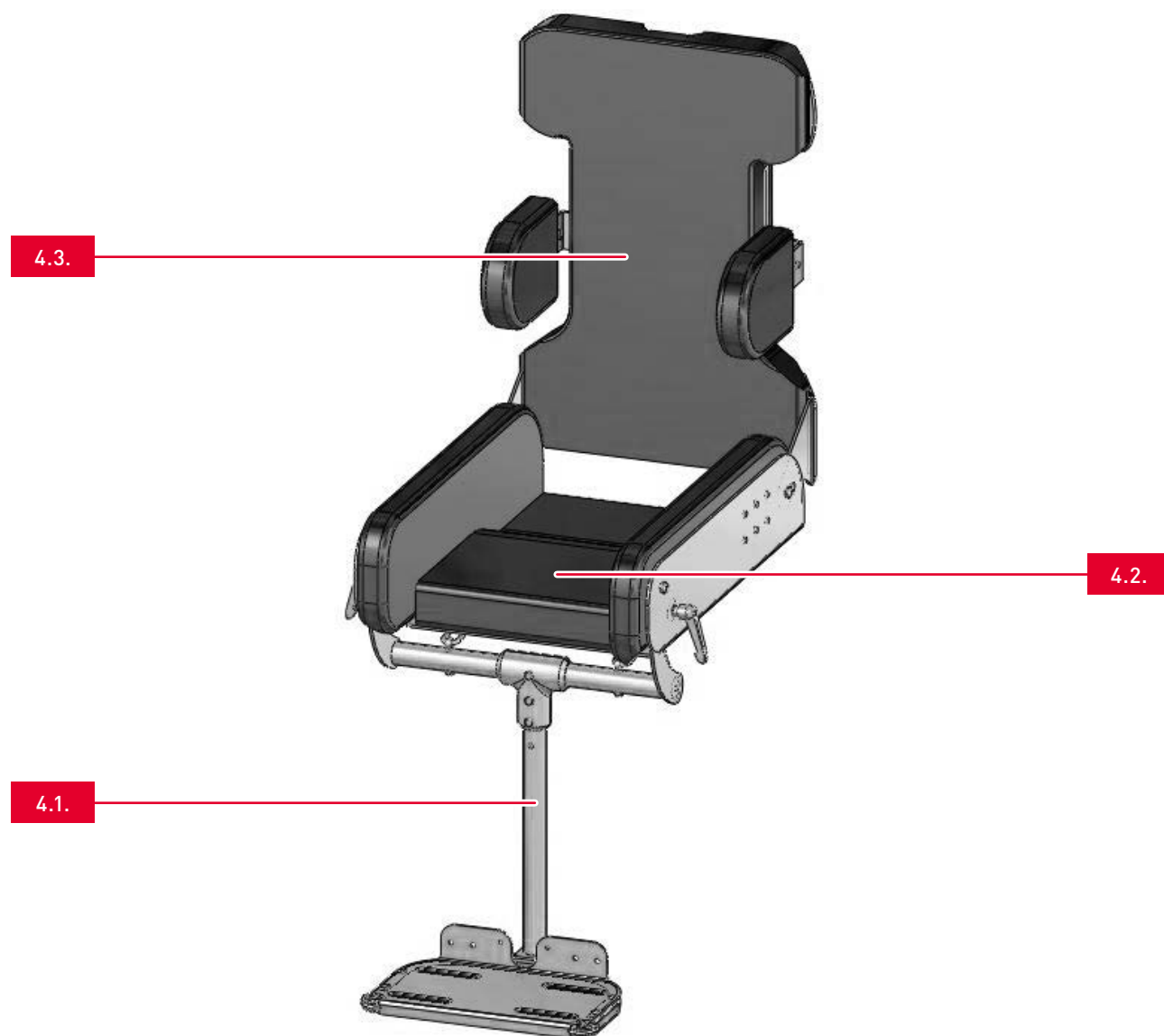

Nr./No.	Artikel/Article
4.1.	Untere Extremitäten/Lower extremities
4.2.	Becken/Pelvis
4.3.	Oberkörper/Upper body

4.1. Untere Extremitäten/Lower extremities

4.1.1. Fußbank durchgehend/Foot plate continuous

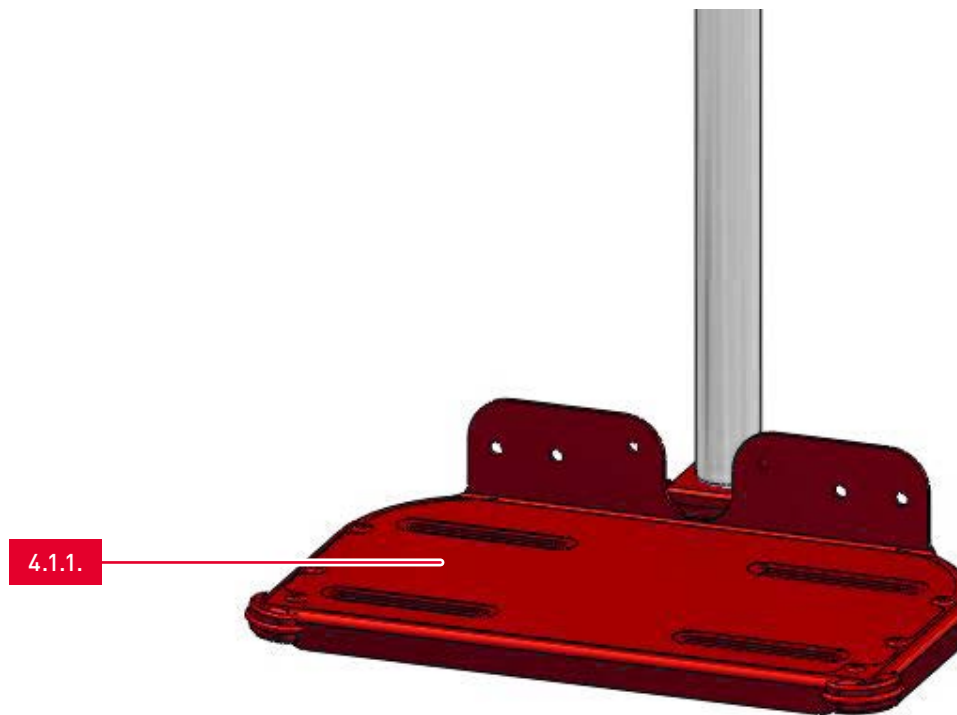

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.1.1.1.	Fußbank durchgehend Gr. 1 inkl. Horizontalklemmelement/ Foot plate continuous size 1 incl. horizontal clamping element	ST	39202
4.1.1.2.	Fußbank durchgehend Gr. 2 inkl. Horizontalklemmelement/ Foot plate continuous size 2 incl. horizontal clamping element	ST	39202
4.1.1.3.	Fußbank durchgehend Gr. 3 inkl. Horizontalklemmelement/ Foot plate continuous size 3 incl. horizontal clamping element	ST	39202
4.1.1.4.	Horizontalklemmelement aus Aluminium/ Horizontal clamping element made of aluminum	ST	39204

4.1. Untere Extremitäten/Lower extremities


4.1.2. Fußbank geteilt/Foot plate divided



Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.1.2.1.	Fußbank geteilt Gr.1 inkl. Horizontalklemmelement/ Foot plate divided size 1 incl. horizontal clamping element	PA	39202-G
4.1.2.2.	Fußbank geteilt Gr.2 inkl. Horizontalklemmelement/ Foot plate divided size 2 incl. horizontal clamping element	PA	39202-G
4.1.2.3.	Fußbank geteilt Gr.3 inkl. Horizontalklemmelement/ Foot plate divided size 3 incl. horizontal clamping element	PA	39202-G
4.1.2.4.	Horizontalklemmelement aus Aluminium/ Horizontal clamping element made of aluminum	PA	39204

4.1. Untere Extremitäten/Lower extremities


4.1.3. Fußbankgabel durchgehend/Foot plate fork continuous

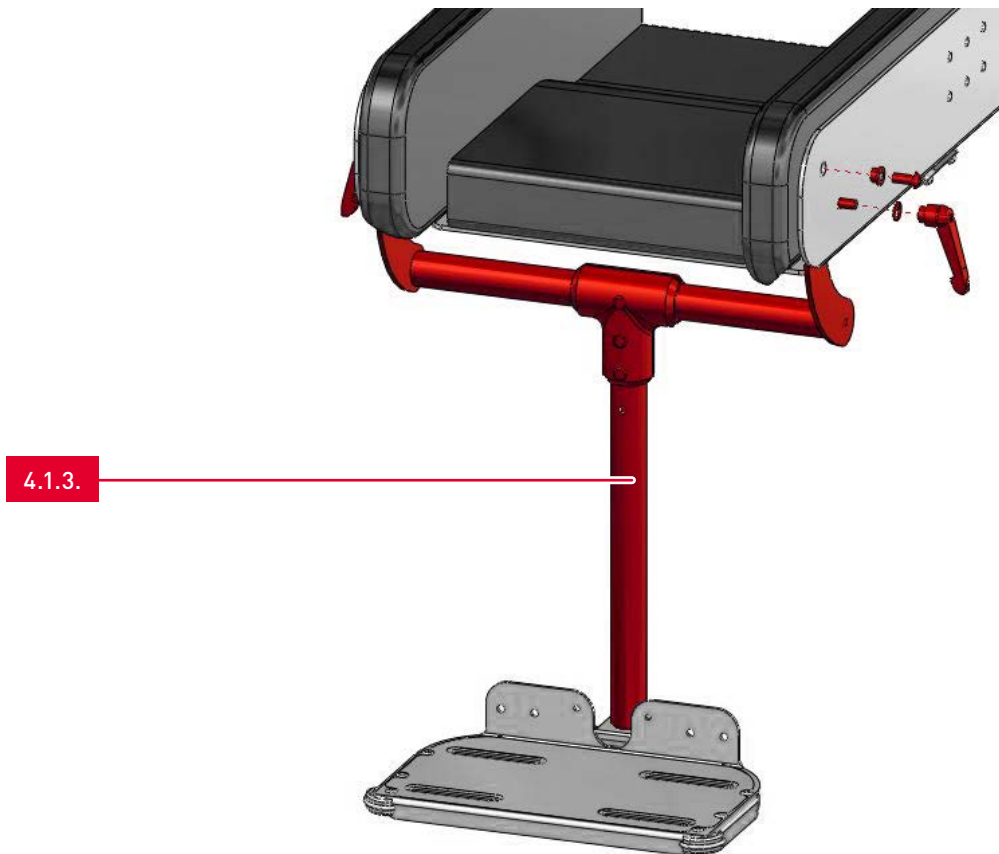

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.1.3.	Fußbankgabel durchgehend (bitte Commission angeben) inkl. Montagematerial/ Foot plate fork continuous (please indicate commission) incl. mounting material	ST	39226

4.1. Untere Extremitäten/Lower extremities


4.1.4. Fußbankgabel geteilt/Foot plate fork divided

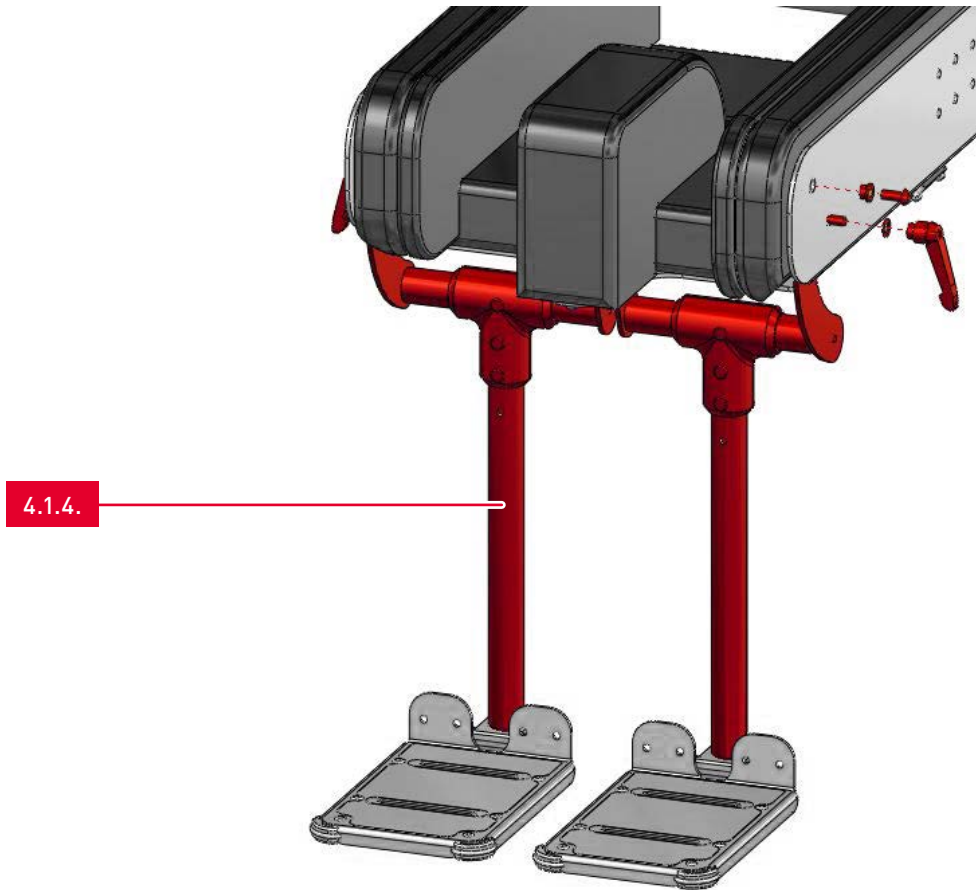

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.1.4.	Fußbankgabel geteilt (bitte Commission angeben) inkl. Montagematerial/ Foot plate fork divided (please indicate commission incl. mounting material	PA	39226-G

4.1. Untere Extremitäten/Lower extremities


4.1.5. Fußbanksystem durchgehend/Foot plate system continuous

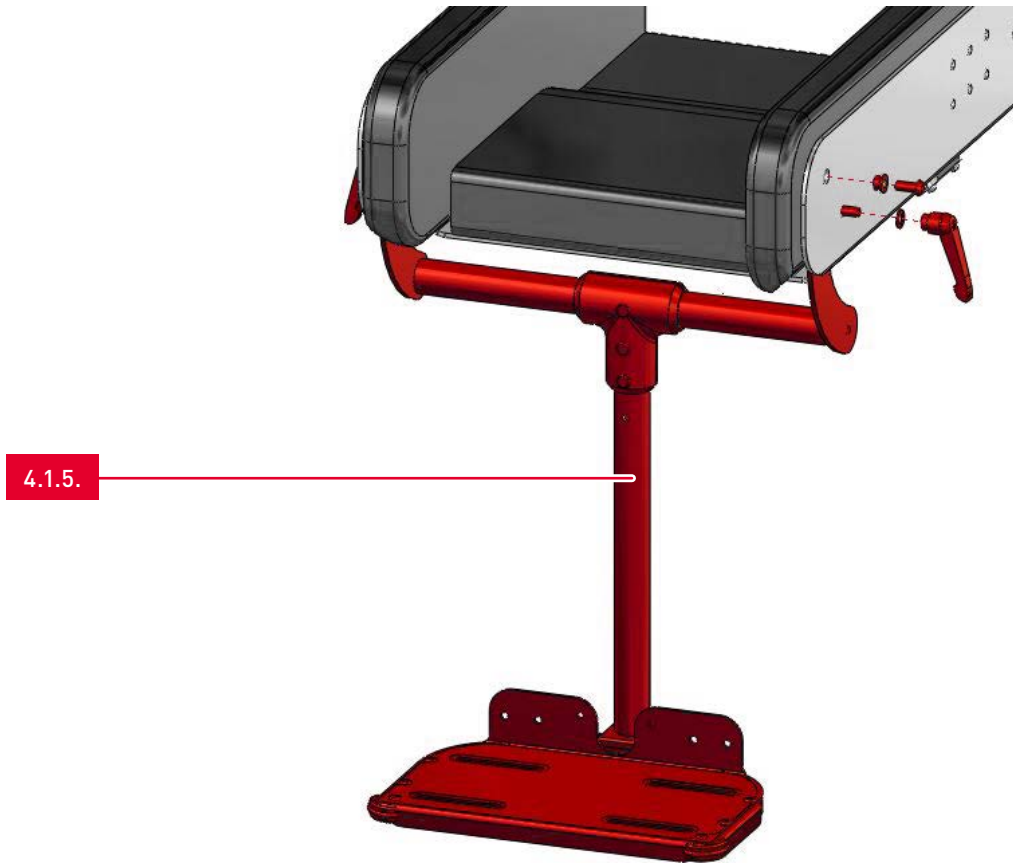

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.1.5.1.	Fußbanksystem durchgehend Gr. 1 (bitte Commission angeben) inkl. Montagematerial)/Foot plate system continuous size 1 (please indicate commission incl. mounting material	SA	39037
4.1.5.2.	Fußbanksystem durchgehend Gr. 2 (bitte Commission angeben) inkl. Montagematerial)/Foot plate system continuous size 2 (please indicate commission incl. mounting material	SA	39037
4.1.5.3.	Fußbanksystem durchgehend Gr. 3 (bitte Commission angeben) inkl. Montagematerial)/Foot plate system continuous size 3 (please indicate commission incl. mounting material	SA	39037

4.1. Untere Extremitäten/Lower extremities


4.1.6. Fußbanksystem geteilt/Foot plate system divided

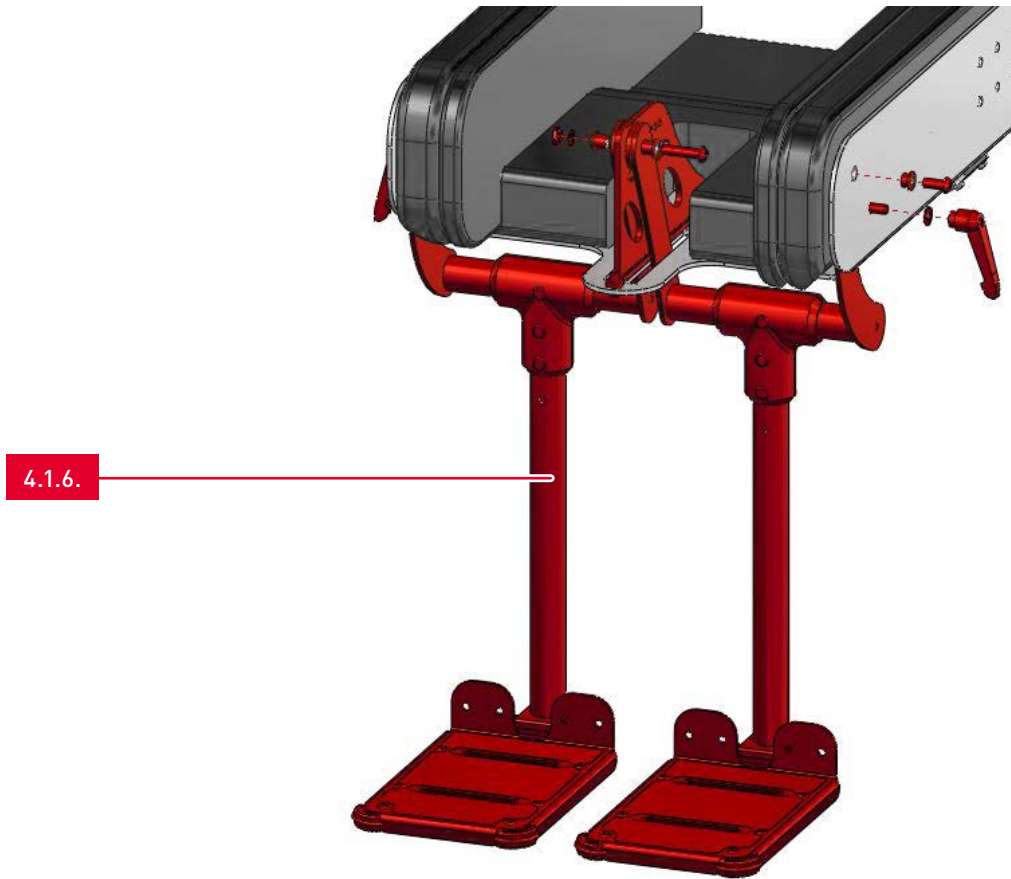

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.1.6.1.	Fußbanksystem geteilt Gr. 1 (bitte Commission angeben) inkl. Montagematerial)/Foot plate system divided size 1 (please indicate commission) incl. mounting material	SA	39038
4.1.6.2.	Fußbanksystem geteilt Gr. 2 (bitte Commission angeben) inkl. Montagematerial)/Foot plate system divided size 2 (please indicate commission) incl. mounting material	SA	39038
4.1.6.3.	Fußbanksystem geteilt Gr. 3 (bitte Commission angeben) inkl. Montagematerial)/Foot plate system divided size 3 (please innicate commission) incl. mounting material	SA	39038

4.1. Untere Extremitäten/Lower extremities


4.1.7. Fußbankrückzugseinheit über Expander/Foot plate retraction unit via expander

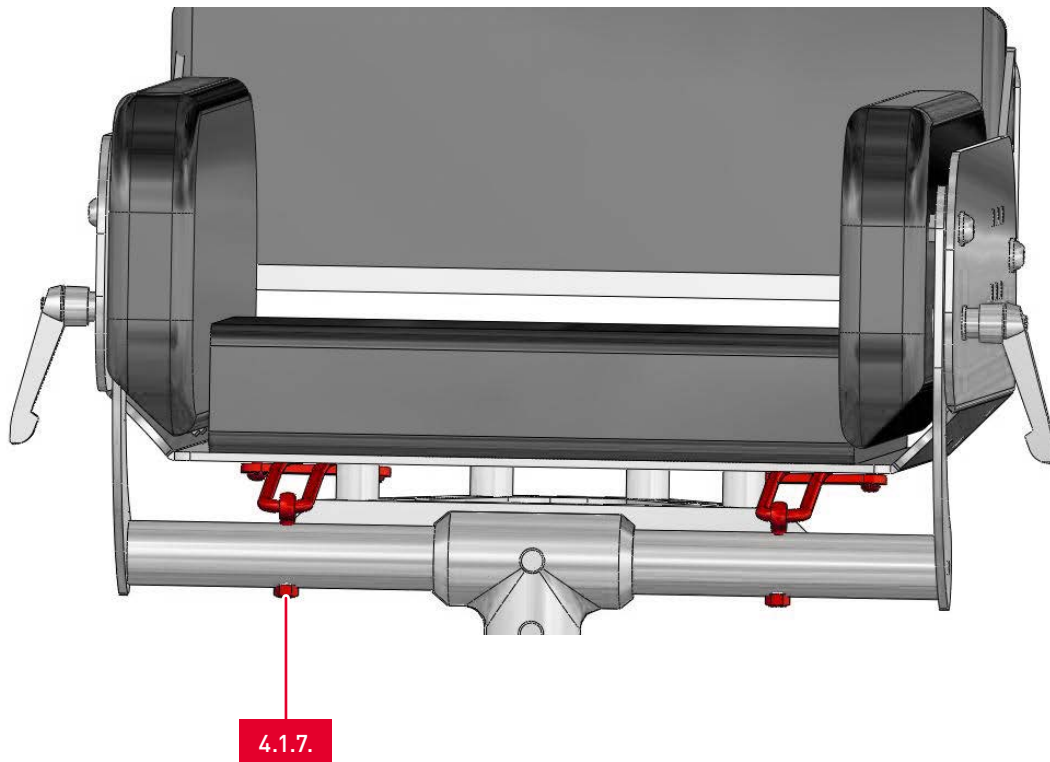

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.1.7.1.	Fußbankrückzugseinheit über Expander inkl. Montagematerial/ Foot plate retraction unit via expander incl. mounting material	SA	39201
4.1.7.2.	Fußbankrückzugseinheit über Feder inkl. Montagematerial/ Foot plate retraction unit via spring incl. mounting material	SA	39201

4.2. Becken/Pelvis


4.2.1. Bezug für Sitzpolster/Cover for seat cushion

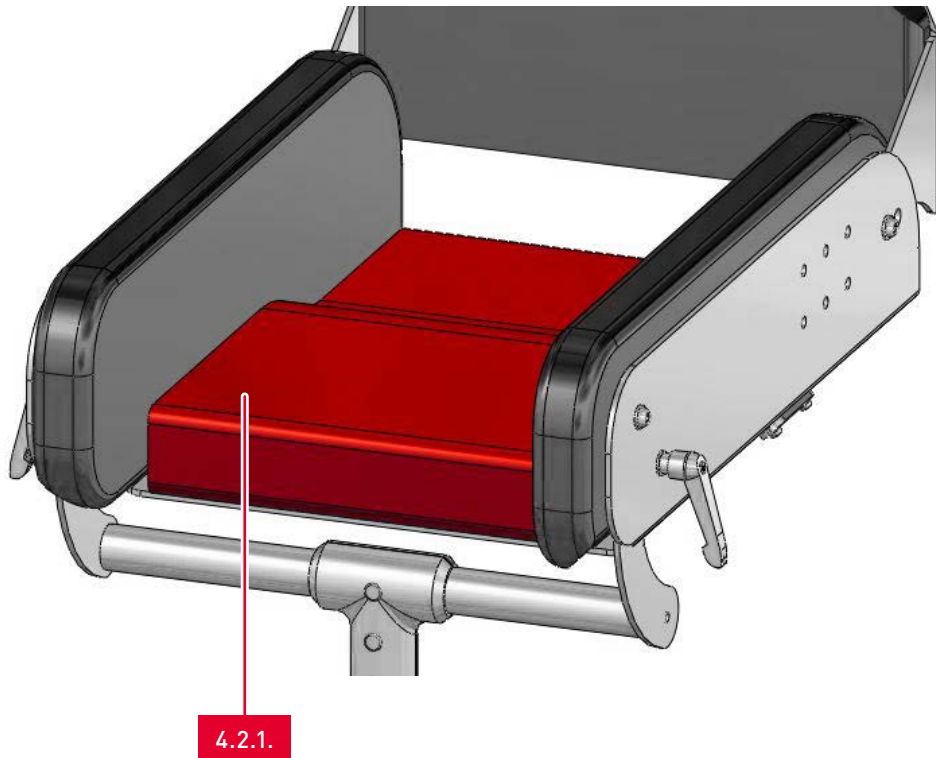

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.2.1.1.	Sitzpolster inkl. Adduktionsführungen mit Abdruck (bitte Commission angeben)/ Seat cushion incl. adduction guidance with molding (please indicate commission)	ST	39277
4.2.1.2.	Sitzpolster inkl. Adduktionsführungen ohne Abdruck (bitte Commission angeben)/ Seat cushion incl. adduction guidance without molding (please indicate commission)	ST	39278
4.2.1.3.	Bezug für Sitzpolster inkl. Adduktionsführungen mit Abdruck (bitte Commission und Stoff angeben)/ Cover for seat cushion incl. adduction guidance with molding (please indicate commission and fabric)	ST	39098k
4.2.1.4.	Bezug für Sitzpolster inkl. Adduktion ohne Abdruck (bitte Commission und Stoff angeben)/ Cover for seat cushion incl. adduction guidance without molding (please indicate commission and fabric)	ST	39097k

4.2. Becken/Pelvis


4.2.2. Klettbare Seitenpolster/Side cushions attachable with velcro

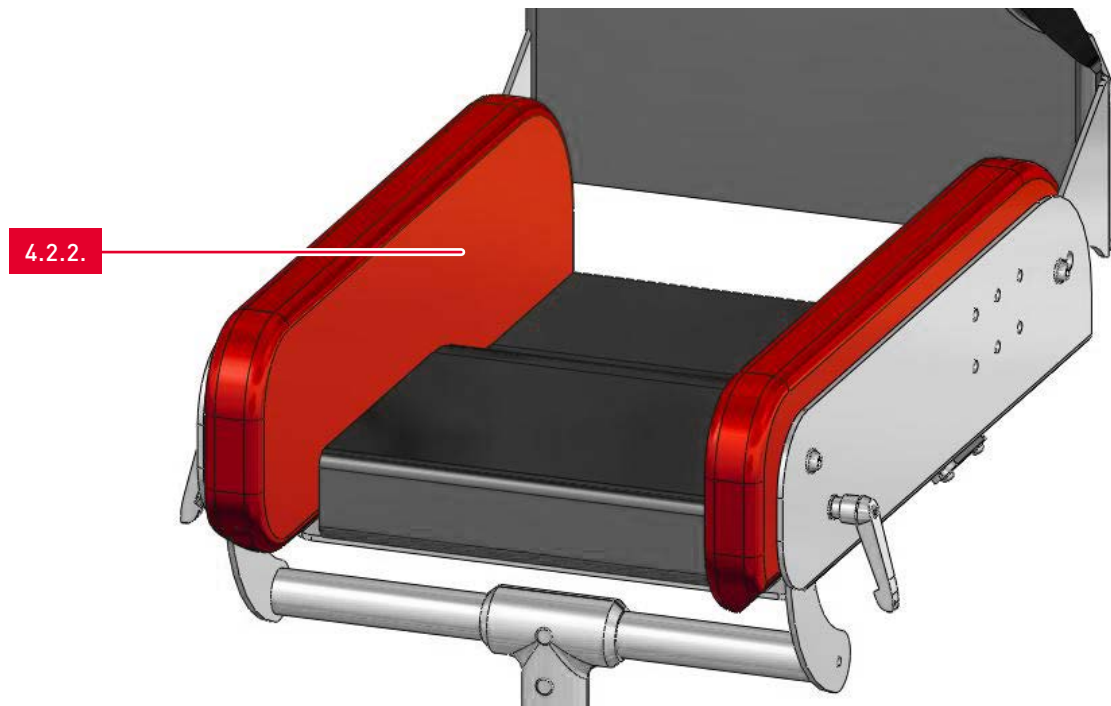

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.2.2.1.	Klettbare Seitenpolster (bitte Commission angeben)/ Side cushions attachable with velcro (please indicate Commission)	PA	39084
4.2.2.2.	Bezug für klettbare Seitenpolster (bitte Commission angeben)/ Cover for side cushions (please indicate commission)	PA	39079

4.2. Becken/Pelvis


4.2.3. Trapezadapter/Trapezoidal adapter

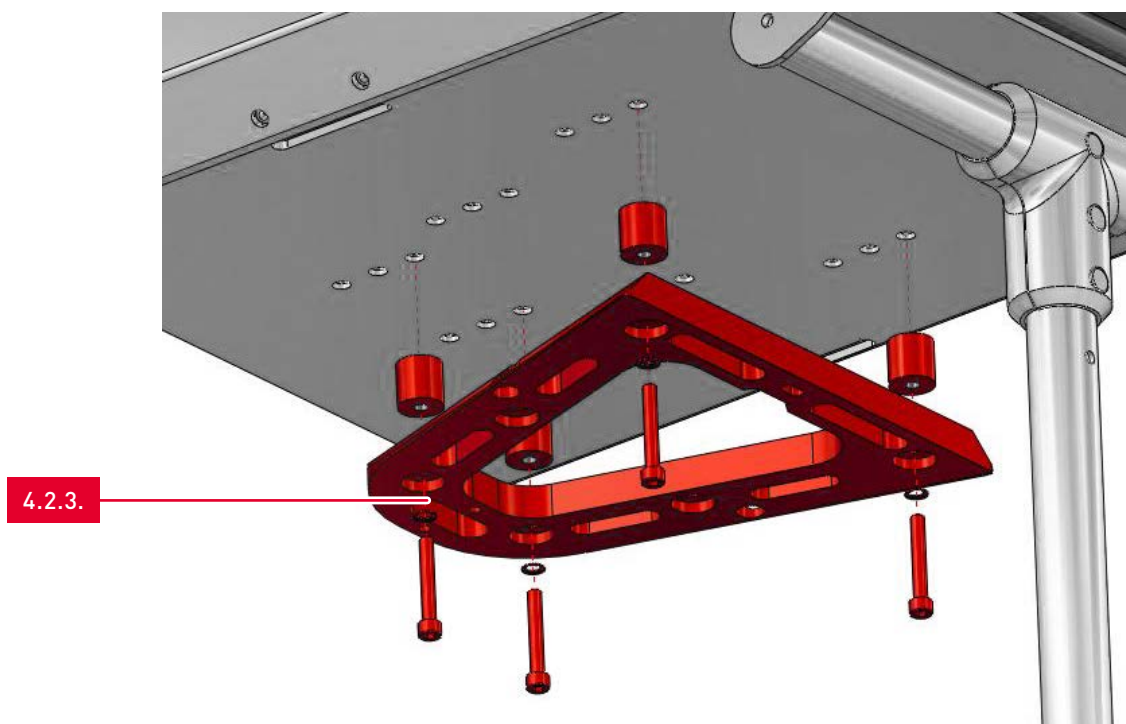

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.2.3.	Trapezadapter inkl. Montagematerial/ Trapezoidal adapter incl. mounting material	ST	40119

4.2. Becken/Pelvis


4.2.4. Drehpunktbleche/Pivot plates

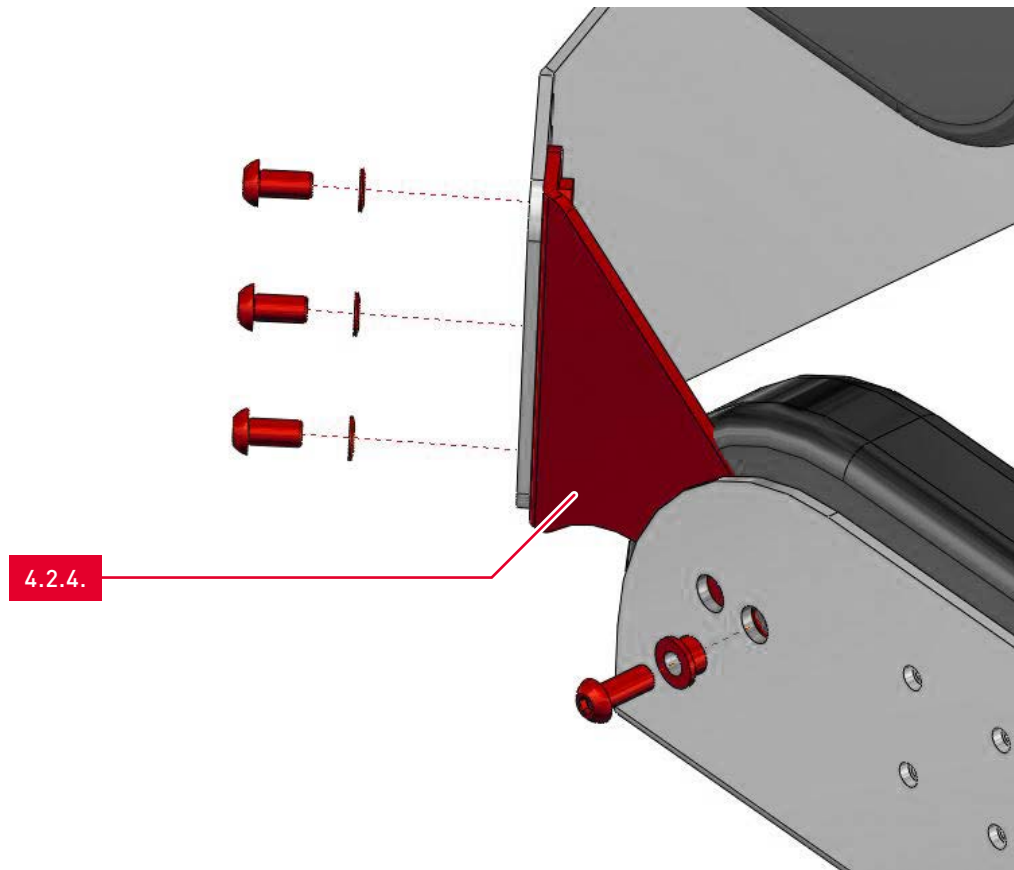

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.2.4.	Drehpunktbleche inkl. Montagematerial (bitte Commission angeben)/Pivot plates incl. mounting material (please indicate commission)	SA	39263

4.3. Oberkörper / Upper body


4.3.1. Rumpfführungspelottenhalter / Lateral side support holder

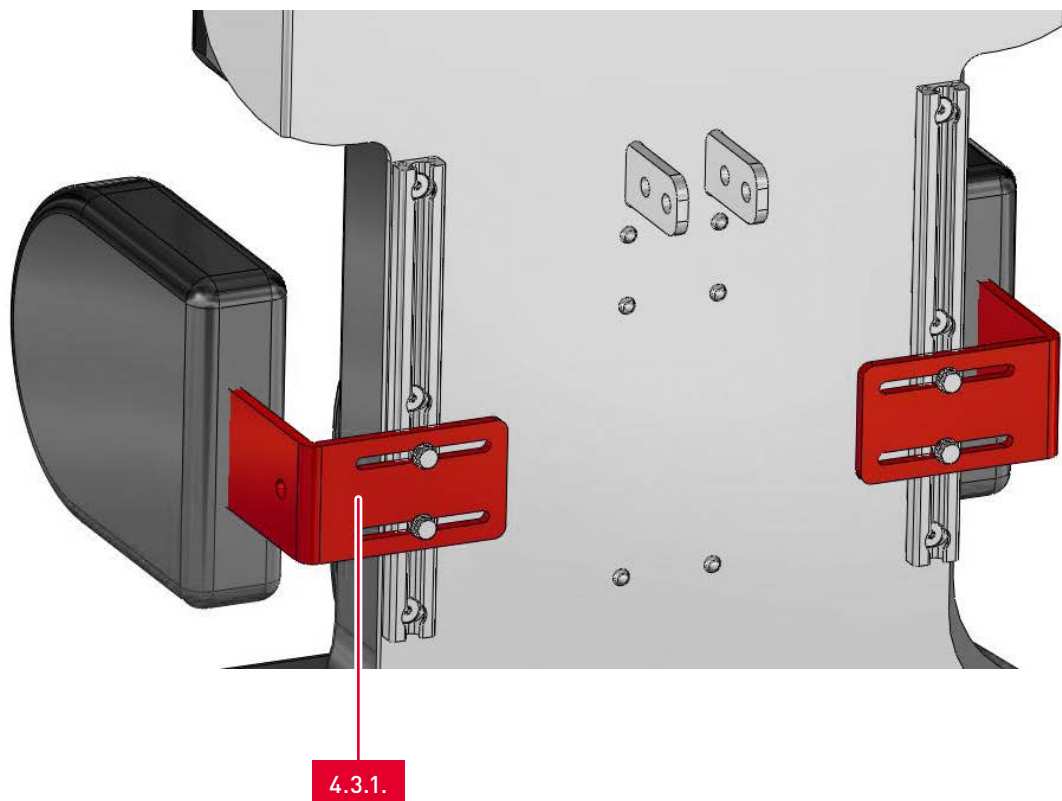

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.3.1.	Rumpfführungspelottenhalter inkl. Montagematerial/ Lateral side support holder incl. mounting material	PA	HW10533

4.3. Oberkörper / Upper body


4.3.3. Verstellschienen für Rumpfführungspelotten / Rail for lateral side support

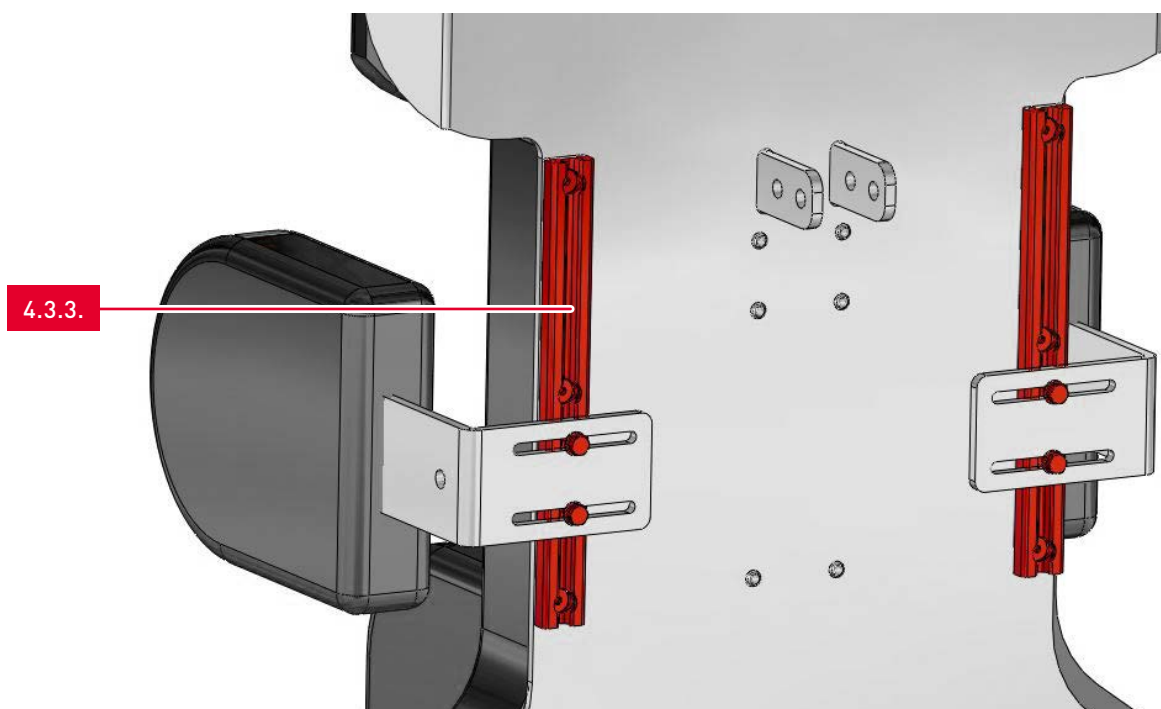

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.3.3.1.	Verstellschienen für Rumpfführungspelotten inkl. Montagematerial / Rail for lateral side support incl. mounting material	SA	39233
4.3.3.2.	Verstellschienen für Rumpfführungspelotten in verstärkter Ausführung inkl. Montagematerial / Rail for lateral side support reinforced version incl. mounting material	SA	39233-V

4.3. Oberkörper / Upper body


4.3.2. Rumpfführungspelotten / Lateral side support

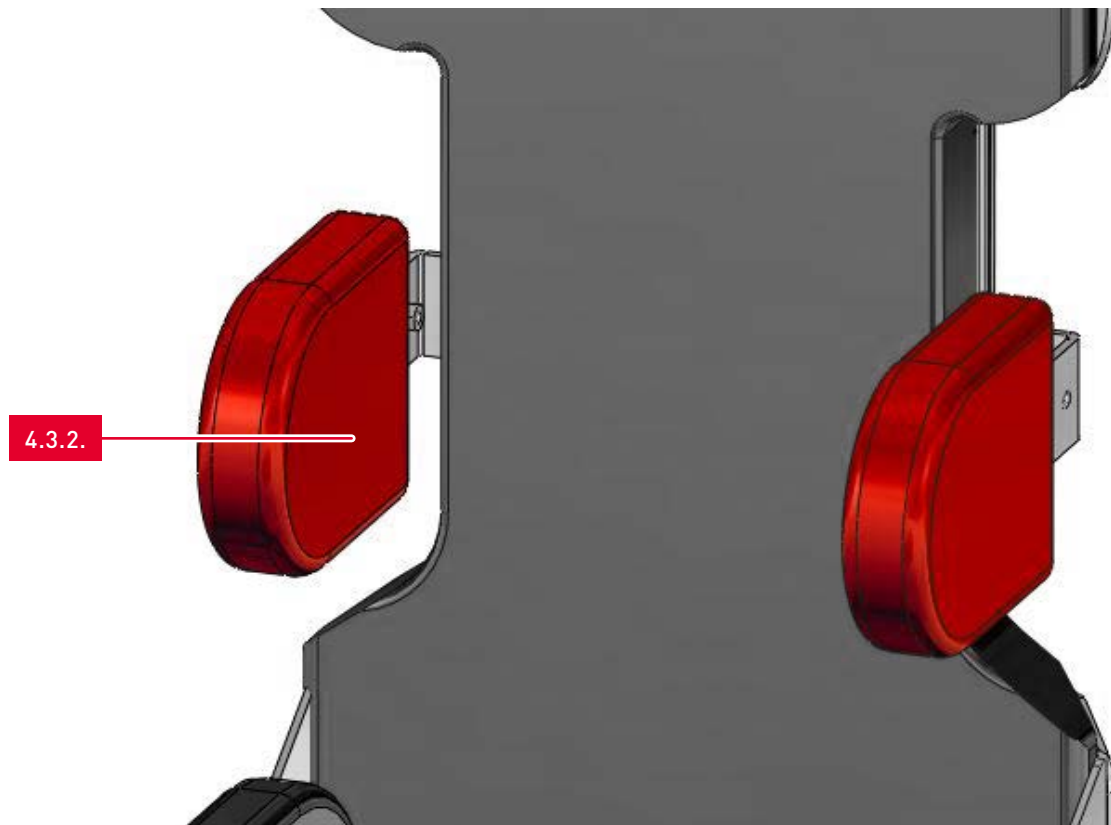

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.3.2.1.	Rumpfführungspelotten (bitte Commission angeben) inkl. Montagematerial/ Lateral side support (please indicate commission) incl. mounting material	PA	39221
4.3.2.2.	Bezug für Rumpfführungspelotten (bitte Commission angeben)/ Cover for lateral side support (please indicate commission)	PA	60081

4.3. Oberkörper / Upper body


4.3.4. Gurtführungsbleche / Belt guide for straps

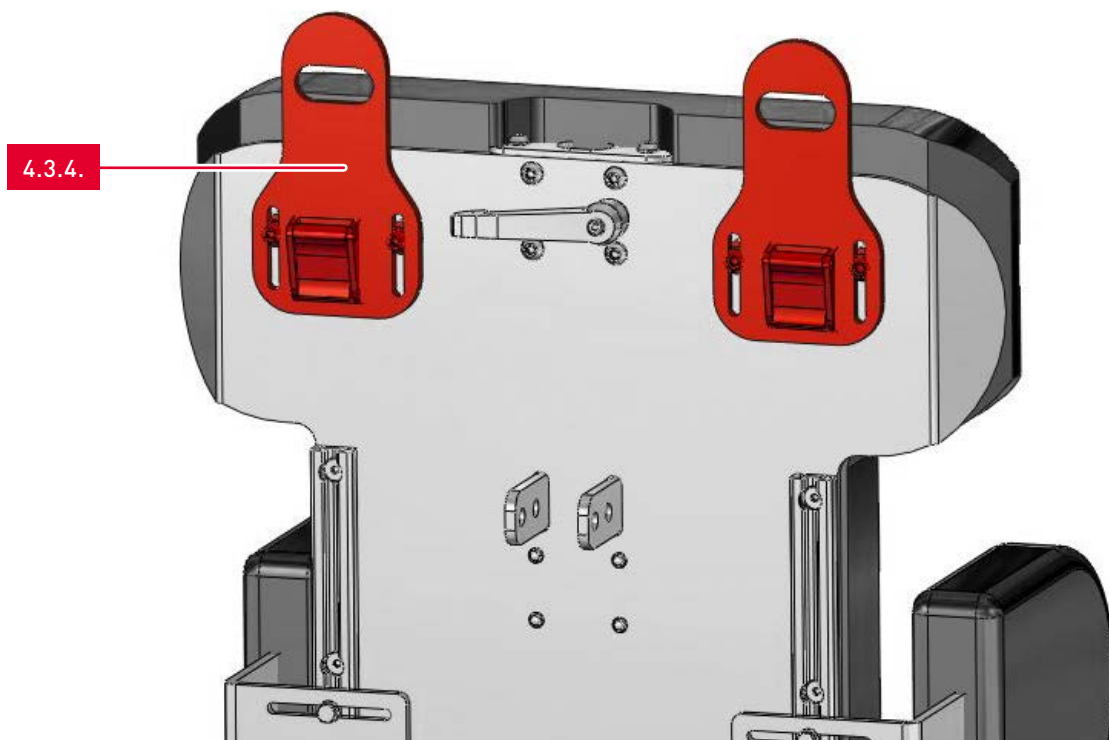

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.3.4.	Gurtführungsbleche inkl. Montagematerial/ Belt guide for straps incl. mounting material	SA	47200

4.3. Oberkörper / Upper body


4.3.5. Bezug für Rückenpolster / Cover for back cushion

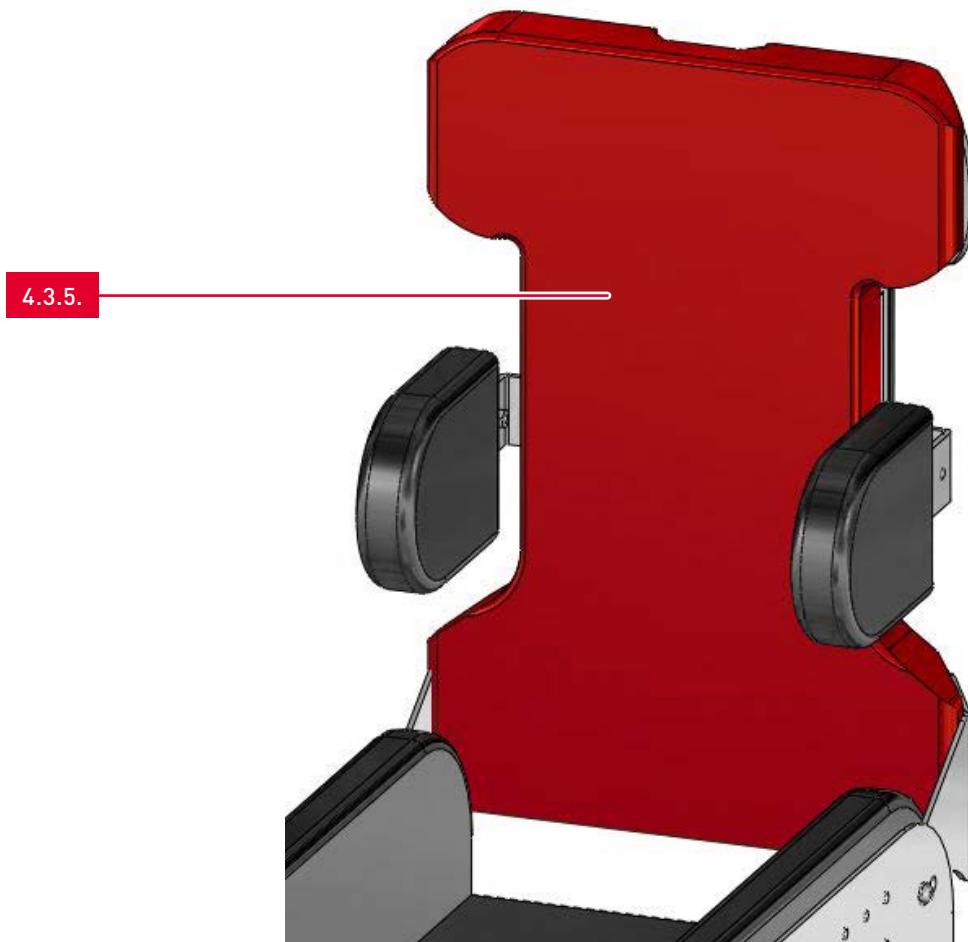

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.2.1.1.	Rückenpolster mit Abdruck (bitte Commission angeben)/ Back cushion with molding (please indicate commission)	ST	39279
4.2.1.2.	Rückenpolster ohne Abdruck (bitte Commission angeben)/ Back cushion without molding (please indicate commission)	ST	39280
4.3.5.3.	Bezug für Rückenpolster mit Abdruck (bitte Commission und Stoff angeben)/ Cover for back cushion with molding (please indicate commission and fabric)	ST	39095k
4.3.5.4.	Bezug für Rückenpolster ohne Abdruck (bitte Commission und Stoff angeben)/ Cover for back cushion without molding (please indicate commission and fabric)	ST	39094k

4.3. Oberkörper / Upper body

4.3.6. Kopfstützenaufnahme / Headrest mount

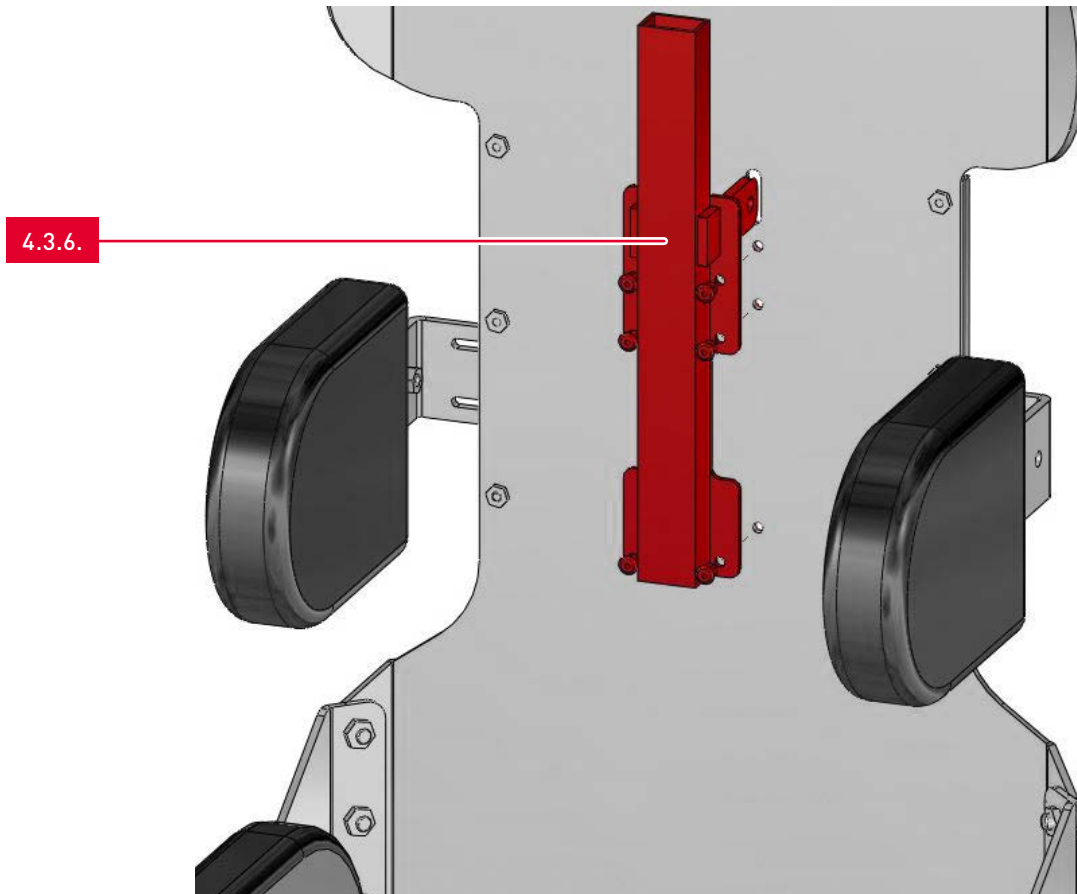

Nr./No.	Artikel/Article	EH/Unit	Art.-Nr./Art. no.
4.3.6.1.	Kopfstützenaufnahme vierkant inkl. Montagematerial/ Headrest mount square inkl. mounting material	ST	39017
4.3.6.2.	Kopfstützenaufnahme ALULINE inkl. Montagematerial/ Headrest mount ALULINE incl. mounting material	ST	39017-A



interco Group GmbH

Im Auel 50
53783 Eitorf
Germany

T. +49 2243 8807-0

F. +49 2243 8807-29

E. info@interco.gmbh

I. www.interco.gmbh

© interco Group GmbH, Eitorf, 2021

Stand Juni 2021 | Technische Änderungen vorbehalten

Status as per June 2021 | Subject to technical alterations without prior notification

Managementsystem zertifiziert nach

Management system certified as per

DIN EN ISO 13485:2016

Reg.-Nr. 73 105 6351

TÜV Hessen

DIN EN ISO 9001:2015

Reg.-Nr. 73 100 6351

TÜV Hessen